


WERKWIJZE ESWAB

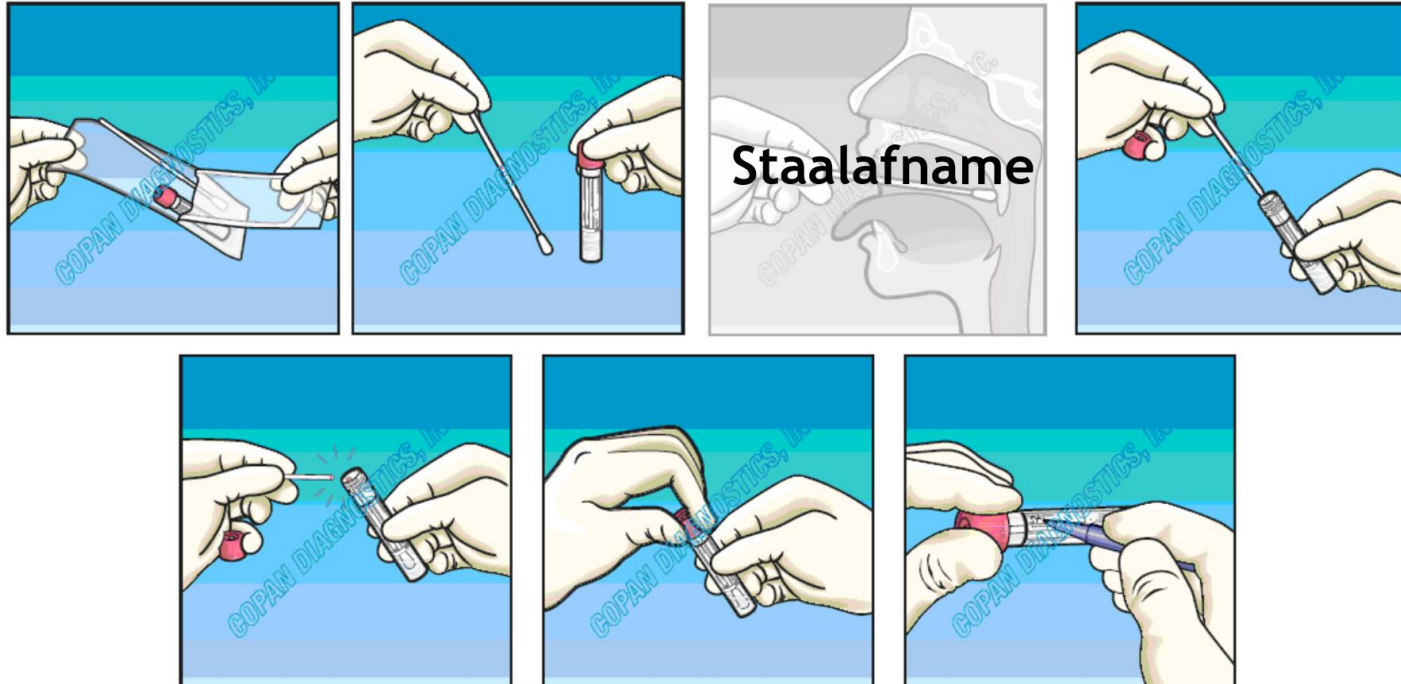

- Haal de wisser en de tube met transportmedium uit de verpakking.
- Voer de staalafname uit bij de patiënt.
- Draai op steriele wijze de tube met vloeistof open en breng de wisser in de vloeistof.
- Breek het bovenste deel van de wisser af ter hoogte van de breuklijn en gooi dit deel weg.
- Draai de schroefdop opnieuw op een steriele wijze op de tube en sluit zorgvuldig.
- Noteer de patiënt-identificatie en afnameplaats van de wisser op de tube.