

# あなたのマスク装着方法は大丈夫ですか？

高性能のマスクでも装着方法を誤れば機能をはたしません。例えば・・・

ノーズピースとプリーツ(ひだ)を合わせていない。




鼻の横の隙間から入ってしまう。

口だけを覆い、鼻は出ている。



自分の咳などが飛散しない効果はあるが自分の保護ができない。

着用していたマスクを顎にかける。

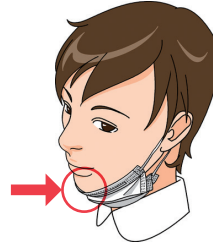

顎の部分には飛散物が付着している恐れがあり、それがマスクの内側になってしまう。

ゴムひもが緩い。



肌との接着面の数ヶ所に隙間ができ入ってくる。

マスクの装着は顔との密着性が大切です。手順を守って正しく装着しましょう。



**ゴムひもを溶着している面を外側にして装着してください。**

メディコムジャパンのマスクは、肌への刺激を避けると共にマスクの密着性を高めるためにゴムひもが溶着されている面を外側にして装着頂くように設計されております。

1.



イヤーループは外側にして、プリーツ(ひだ)を上下に伸ばし、マスクを完全に広げます。

2.



顔に当て、ノーズピースを鼻の形に合わせて顎の下まで伸ばします。

3.



顔にフィットさせながら、耳にひもを掛けてください。

レギュラーサイズ

Sサイズ

プロレーン®マスク



2714 : ホワイト



2715 : ブルー



2716 : ピンク



2714S : ホワイト



2716S : ピンク

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
 〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F

【代 表】 TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】 TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】 TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

メディコムジャパン