

# ハンドソープ+アルコールハンドジェル で徹底的な手指衛生を。

**1** まずは、ハンドソープ+流水で  
目に見える汚れを落としましょう。

## ハンドソープでの手の洗い方

- ① 流水で手を十分にぬらし、石鹸をよく泡立てます。
- ② 手のひらを合わせてよくこすります。
- ③ 指を組んで指の間をよくこすります。
- ④ 手のひらと手の甲を合わせて手の甲を伸ばすようにこすります。
- ⑤ 指先、爪を手のひらの上でひかくようにして爪の汚れを落とします。
- ⑥ 親指を握ってねじるようにこすります。
- ⑦ 手首を握ってねじるようにこすります。
- ⑧ 流水で石鹸を十分にすすぎます。その際、蛇口は洗う前の手で触れているので一緒に洗いましよ。
- ⑨ 清潔なタオル、またはペーパータオルでしっかりと手を拭きます。タオルの共有は控えましょう。

**2** アルコールハンドジェルでさらに清潔に。  
保湿も同時に行えます。

## アルコールハンドジェルの使用方法

- ① 2~4プッシュ分を手のひらに取ります。  
※あくまで目安です。手の大きさなどに応じて、調節してください。
- ② 手指全体にむらなく伸ばし、よく擦り込んでなじませてください。
- ③ 手の甲や指の間に擦り込みます。
- ④ 手のひら全体へまんべんなく伸ばします。
- ⑤ 指先、指の背にも忘れずになじませてください。
- ⑥ 反対の手でねじるようにして、両手の親指にも擦り込みます。
- ⑦ 乾くまでよく擦り込んでください。  
※洗い流したり、拭き取ったりしないでください。

## アニオセーフ サボンドゥー エイチエフ



洗い上がりしっとり  
肌にやさしい手指衛生用ハンドソープ

原液タイプ アレルギーフリー

- 手荒れの原因となる成分不使用の、中性ハンドソープです。
- 保湿力があり、手肌のバリア機能を高める成分を配合しています。
- 洗い上がりはしっとりとした肌触りです。

イルガサンDP-300  
(トリクロサン)  
FREE



500ml 5L

品番	内容量	入り数	参考医院価格	EANコード(本体)	EANコード(外箱)
ANI1918034	5L	4本/ケース	¥5,300/本	3597610110658	3597610244926
ANI1918228	500ml	12本/ケース	¥980/本	3597610007705	3597610246913

## アニオスジェル 85 NPC



しっとりサラサラの使い心地  
手指衛生用アルコールハンドジェル

無香料 無着色 アレルギーフリー

- 濃度70%のエタノールで、手指を清潔にします。
- 保湿成分配合で使用後はしっとりサラサラ。グローブの装着もスムーズです。
- 液の飛散や伝いこぼれの少ないジェルタイプです。
- 水洗い、拭き取りも不要で簡単にご使用いただけます。

内容成分	配合目的
エタノール	クリーン作用
グリセリン	保湿効果
2-メチル-1,3-プロパンジオール	保湿効果
水	-



75ml 500ml

品番	内容量	入り数	参考医院価格	EANコード(本体)	EANコード(外箱)
ANI1644636	500ml	12本/ケース	¥800/本	3597610236228	3597610156625
ANI1644274	75ml	20本/ケース	¥390/本	3597610186387	3597610219054

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【デンタル事業部】

〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F

TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ dental@medicom-japan.com

🌐 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

📍 メディコムジャパン

# あなたのマスク装着方法は大丈夫ですか？

高性能のマスクでも装着方法を誤れば機能をはたしません。例えば・・・

ノーズピースとプリーツ(ひだ)を合わせていない。




鼻の横の隙間から入ってしまう。

口だけを覆い、鼻は出ている。



自分の咳などが飛散しない効果はあるが自分の保護ができない。

着用していたマスクを顎にかける。

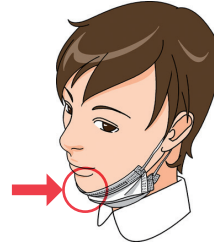

顎の部分には飛散物が付着している恐れがあり、それがマスクの内側についてしまう。

ゴムひもが緩い。



肌との接着面の数ヶ所に隙間ができ入ってくる。

マスクの装着は顔との密着性が大切です。手順を守って正しく装着しましょう。



**ゴムひもを溶着している面を外側にして装着してください。**

メディコムジャパンのマスクは、肌への刺激を避けると共にマスクの密着性を高めるためにゴムひもが溶着されている面を外側にして装着頂くように設計されております。

1.



イヤーループは外側にして、プリーツ(ひだ)を上下に伸ばし、マスクを完全に広げます。

2.



顔に当て、ノーズピースを鼻の形に合わせて顎の下まで伸ばします。

3.



顔にフィットさせながら、耳にひもを掛けてください。

レギュラーサイズ

プロレーン<sup>®</sup>マスク



2714 : ホワイト



2715 : ブルー



2716 : ピンク

Sサイズ



2714S : ホワイト



2716S : ピンク

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
 〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F

【代 表】 TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】 TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】 TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

メディコムジャパン

その咳で、感染させてしまうかもしれません。



## 知っていますか？ 咳エチケット




咳・くしゃみが出るときは、マスクを着けましょう。

●医療現場にて使用される「サージカルマスク」がより予防効果が高くなります。



マスクがないときは、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、咳・くしゃみをするとき他の人から顔をそむけましょう。

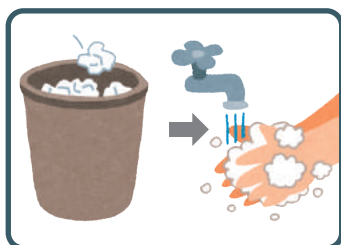

使ったティッシュはすぐに蓋付きのごみ箱に捨て、その後は手洗い・消毒をしましょう。

予防効果の高い  
メディコム  
のサージカルマスク

プロレーンマスク LEVEL-2



2883:ホワイト

プロレーンマスク LEVEL-1



2714:ホワイト



2715:ブルー



2716:ピンク

プロレーンマスク LEVEL-1  
Sサイズ



2714S:ホワイト



2716S:ピンク

# 正しい手の洗い方

- 

1 手を洗う前に爪は短く切っているか、指輪・時計をはずしているか確認してください。
- 

2 流水で手を十分にぬらし、石鹸をよく泡立てます。
- 

3 手のひらを合わせてよくこすります。
- 

4 指を組んで指の間をよくこすります。
- 

5 手のひらと手の甲を合わせて手の甲を伸ばすようにこすります。
- 

6 指先、爪を手のひらの上でひかくようにして爪の汚れを落とします。
- 

7 親指を握ってねじるようにこすります。
- 

8 手首を握ってねじるようにこすります。
- 

9 流水で石鹸を十分にすすぎます。その際、蛇口は洗う前の手で触れているので一緒に洗いましょう。
- 

10 清潔なタオル、またはペーパータオルでしっかりと手を拭きます。タオルの共有は控えましょう。

## 手洗いのタイミング

- 帰宅時
- 鼻をかんだり、咳やくしゃみをした後
- 食事や調理の前
- 電車、バスなどでつり革や手すりを触った後
- トイレの後
- 排泄物を触った後
- 動物を触った後
- ごみを触った後
- 切り傷などを手当する前後

## 手洗いが不十分になりやすい部位

- 指先
- 指と指の間
- 手のひらのシワ
- 指輪のまわり
- 親指のまわり
- 手首

- 洗い残しが多い
- 洗い残しがやや多い



W 塩素処理加工



入り数: 10箱/ケース(100枚/箱)

## アキュフィット® ラテックスグローブ パウダーフリー

- ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ
  - 両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ
  - 安定した品質とリーズナブルな価格
- XXS [ACFJL1124Z](#)  
 XS [ACFJL1124A](#)  
 S [ACFJL1124B](#)  
 M [ACFJL1124C](#)  
 L [ACFJL1124D](#)
- 一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋  
 製造販売届出番号: 28B3X00001000038 JMDN70977000

# 滅菌ロール・バッグを安全に正しくお使い頂くために

本製品は医療材料等のオートクレーブ滅菌またはEOガス滅菌する際に用いる包装材です。他の用途、目的、滅菌方法には使用しないで下さい。

## ① 滅菌物の洗浄・乾燥は十分に 行って下さい。

濡れた状態でパックすると、滅菌不良や破裂をおこす恐れがあります。またインジケーターが異常変色する可能性があります。




## ② ガウンやガーゼなど、蒸気の浸透が難しいとされる物は詰めすぎないで下さい。

滅菌不良や破裂（シール部の剥がれ）の原因となります。




## ③ インstrumentなどの先の尖った物などをパックする場合は先端を不織布などで包み滅菌して下さい。

紙やフィルムが破損する恐れがあります。

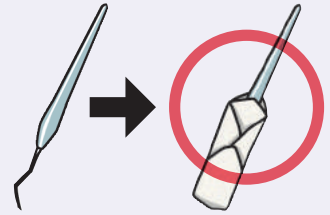

## ④ 先の尖った物、重量物をパックする場合は勢良く落とし込まないで下さい。

本品の底部が破れる恐れがあります。

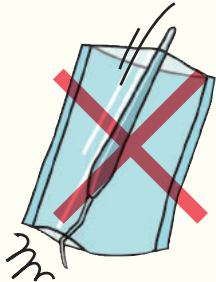


## ⑤ ヒートシール作業は完全に実施して下さい。

ヒートシール作業前には本品内のエアは十分に抜いておいて下さい。未完了だと破裂の原因となります。ヒートシールにあたっては170～220℃を目安としてご使用下さい。ただ、シール条件はシール機毎、滅菌バッグの種類等によって異なります。シール機の使用方法に基づいて適切にシールして下さい。

## ⑥ インジケーターについて。

本品に印刷してあるインジケーターは滅菌工程を通ったかどうかの確認用です。インジケーターの変色が滅菌を保証するものではありません。内容物が滅菌条件に達したかどうかの確認には滅菌カード（別売）などをご使用下さい。

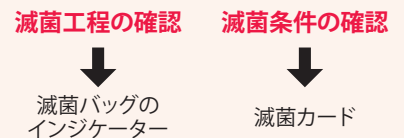


## ⑦ 本品はプラズマ、ガンマ線滅菌等には使用出来ません。

またEOガス滅菌の場合、洗浄成分が残っていた場合、正常な色変化にならない場合があります。



## ⑧ 本製品には、テープを使用している「繋ぎ目」が入っている製品があります。

これは製造工程中に必ず発生する「ロス」部分で、粘着が弱くなっています。この箇所はご使用にならないで下さい。「ロス」部分については同じ長さを余分に巻いています。

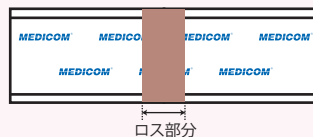

## ⑨ 再使用について。

本品は使い捨てのディスポーザブル商品です。再使用・再滅菌はお控え下さい。

## ⑩ 保管上の注意。

インジケーターの性能を劣化させる原因となりますので直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F

【代 表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2112 info@medicom-japan.com

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112 medical@medicom-japan.com

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074 dental@medicom-japan.com

 <https://www.facebook.com/medicomjapan>

YAHOO! Google で **メディコムジャパン** と検索ください! 