



ヒートシーラー シールツ



Seal12

シール幅

幅広
はばひろ

12 mm

「滅菌パックに関するEN規格」
滅菌シール幅は6mm以上と
規定されています

規格

ISO11607-2


適合



実際のシール幅

幅広
はばひろ
12 mm

「シンプル」で「高性能」

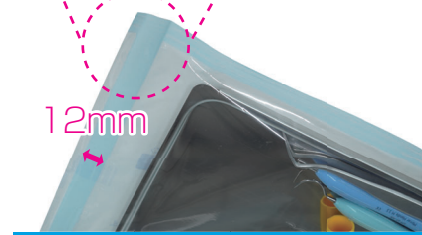

12mm



「12mm」のシール幅で
強力にシーリング

「クラスBオートクレーブ」に
おすすめ

操作が
カンタン

洗練された スタイリッシュなデザイン




壁掛け



本体取付

設置する場所によって、レイアウトを選ぶ事が可能です

分かりやすい操作法

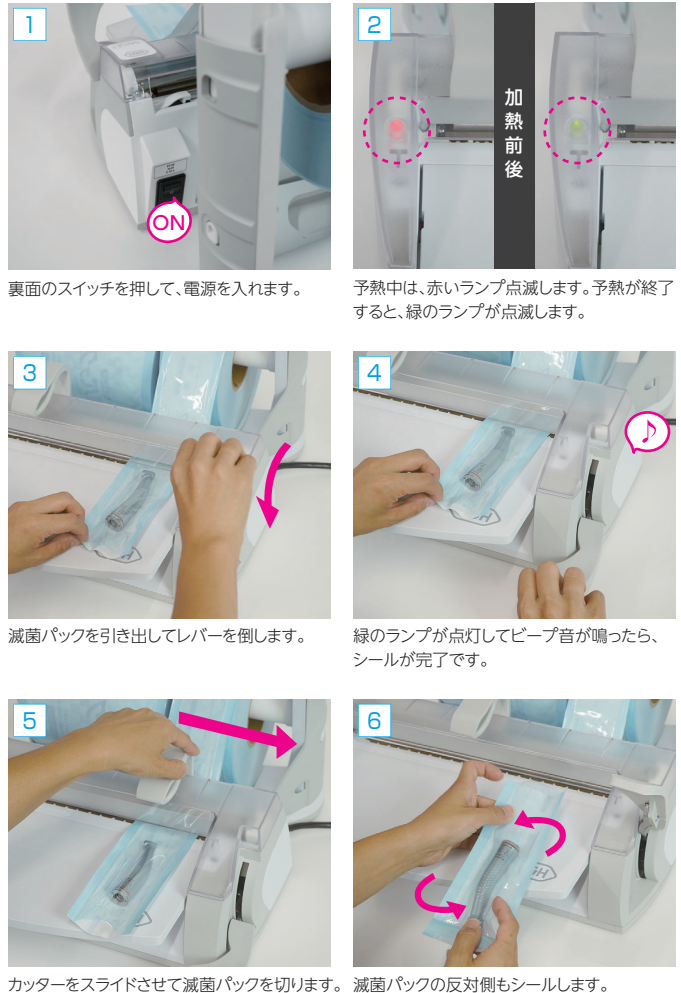

裏面のスイッチを押して、電源を入れます。

予熱中は、赤いランプ点滅します。予熱が終了すると、緑のランプが点滅します。

滅菌パックを引き出してレバーを倒します。

緑のランプが点灯してピープ音が鳴ったら、シールが完了です。

カッターをスライドさせて滅菌パックを切ります。滅菌パックの反対側もシールします。

〈 関連商品 〉

感染予防！

リサ・ララは**減圧乾燥**
器具は乾燥してサイクル完了！

必ず器具を乾燥させてから滅菌してください。お急ぎサイクル(リサのみ)は乾燥しません。



小型高圧蒸気滅菌器

クラスBオートクレーブ

lisa 22ℓ

大容量と時短を両立

lara 17ℓ

コストと滅菌性能を両立

販売名:クラスBオートクレーブ リサ / クラスBオートクレーブ ララ 一般的名称:小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号:228ALBZX00008000 / 301ALBZX00013000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ヒートシーラー Seal2

商品コード 07801100

仕様

※滅菌パックは含まれておりません

電源電圧	: 100-120V
最大消費電力	: 100 W
電源	: 50/60Hz
シール幅	: 12x310mm
寸法	: W452xD480xH420mm(平面設置、作業台取付時)
重さ	: 7.1kg

記載価格は2022年8月現在のものです。税別です。



W&H ステリライゼーション社
(イタリア)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎(048)884-3951
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クrost12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2022.08.P2,000 B27 Ver1.3.2