

SpeedCEM[®] Plus

セルフアドヒーズ接着性レジンセメント スピードセム Plus



酸化ジルコニウムの
接着に、大きな
プラス

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

SpeedCEM® Plus

セルフアドヒーズブ接着性レジンセメント スピードセム Plus

スピードセム Plusは、性能と使いやすさを兼ね備えたセルフアドヒーズブタイプの接着性レジンセメントです。




優れた化学重合力

化学重合をメインとしたデュアルキュア型で光を通しにくい、酸化ジルコニウムや、修復物に厚みが出るインプラント上部構造でも安定した接着を得られます。

- 酸化ジルコニウム
- 卑金属合金(チタン等)
- メタルセラミックス
- ニケイ酸リチウムガラスセラミックス*

*修復物側の前処理が必要です。

酸化ジルコニウムとのせん断接着強度(化学重合後)

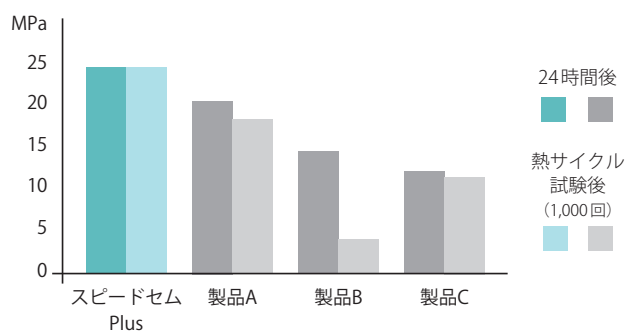

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015

使いやすさを追求

• 余剰セメント除去

予備照射することにより、半硬化したセメントをスケーラー等で素早く除去できます。

• どんな状況でも


象牙質の湿潤状態に関係なく、高い接着強度が得られ、防湿できない場合にも使用できます。

• X線造影性(330% AI)

セメントの取り残しや二次齲蝕をX線写真で見分けることができます。



余剰セメント除去の動画はこちらから

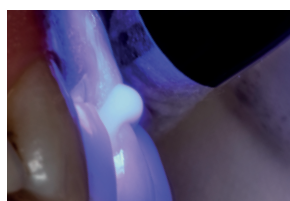

予備照射し、半硬化させます。



スケーラー等で素早く除去。

写真：Dr Lukas Enggist, Ivoclar Vivadent AG, 2015

前処理が不要

MDPを含有するスピードセム Plusは、歯質や修復物(酸化ジルコニウムや卑金属合金)の処理が不要で、接着のステップを減らし、操作中のエラーを軽減できます。



ステップ

酸化ジルコニウムブリッジ



1. セット前

2. 口腔内試適後、イボクリーンで清掃

3. 余剰セメント除去

4. 最終重合

5. セット後

写真：Zenostar T bridge cemented onto natural abutment teeth: Dr Lukas Enggist, Dentist / Dominik Monreal, DT, Ivoclar Vivadent AG, 2014

シェード

光透過性によって3種類をラインナップ。光透過性が2～3%の「オパーク」は、チタンアバットメントを使用したインプラント上部構造の接着に適しています。



| | |
|------------------|------------------|
| 使用回数 | 13～18歯(クラウンの場合)* |
| 操作時間 | 1分間 |
| 硬化時間 (操作時間含む) | 3分間 (化学重合の場合) |
| 保管方法 | 2～8℃ |

*シリンジ1本(9g)あたり



酸化ジルコニウム修復物のクリーニングには、イボクリーン

口腔内試適で接着面に付着した唾液や血液を効果的に除去します。

特に、酸化ジルコニウムや卑金属合金は、接着力の低下を招くリン酸ではなく、イボクリーンで清掃することで、強固な接着をサポートします。



Fixed Prosthetics

スピードセム Plusは、「Fixed Prosthetics (固定式補綴物)」に分類されます。

この製品群は、固定式補綴物による修復(テンポラリー～セット後のメンテナンスまで)を網羅しています。

各製品はそれぞれバランス良く組み合わせられており、技工物製作と診療を成功に導きます。



製品内容



スピードセム Plus

シリンジ 各 9g×1 ¥12,000

681710WW イエロー

681711WW オペーク

681712WW トランスペアレント

ミキシングチップ ブラック 15本、
ルートチャンネルチップ ブラック5本付属



システムキット トランスペアレント

681714WW 1セット ¥15,700

シリンジ トランスペアレント 9g×1、イボクリーン 5g×1、
ミキシングチップ ブラック 15本

スターターパック トランスペアレント

681713WW 1セット ¥5,000

シリンジ トランスペアレント 2.5g×1、イボクリーン 1g×1、
ミキシングチップ ブラック 4本

イボクリーン

637568AN 5g×1

口腔内試適後の修復物内面クリーニング液
内面に塗布し、20秒後水洗・エアードライ
するだけの簡単操作です。



オプトラゲート

立体構造のソフト開口器

特長

- ・ソフトな素材で口唇をサポート
- ・広い術野を確保し、診療をスムーズに
- ・新色のブルーとピンクが登場



2017年6月時点の価格となります。

カタログ掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

一般的名称：歯科接着用レジセメント / 販売名：スピードセム / 認証番号：221AGBZX00208000 / 管理医療機器
一般的名称：歯科用開口器 / 販売名：オプトラゲート / 届出番号：13B1X10049IV0001 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PRO225B04

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation