

Multilink® Automix

歯科接着用レジンセメント マルチリンク オートミックス

セメントの
目的を果たす、
強固な接着力



Clinically proven with
IPS e.max®

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Multilink®


The adhesive cementation system

修復物の寿命を左右する、接着力

マルチリンク オートミックスは、デュアルキュア型の接着性レジンセメントです。歯面と修復物内面に前処理を行うことで、様々な種類の材料と長期に渡り安定した接着を実現します。化学重合をベースとしており、透過性が低い酸化ジルコニウムやメタルにも使用できます。

二ケイ酸リチウムガラスセラミックスはもちろん、酸化ジルコニウム、メタル等の修復物や CAD/CAM 冠修復物との接着で、その威力を発揮します。

Clinically proven with
IPS e.max®

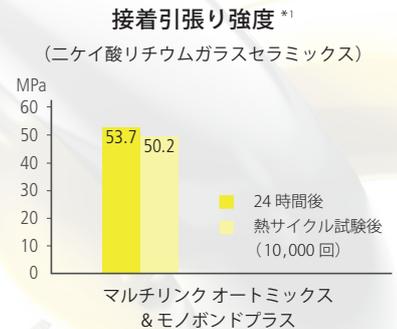


接着力に重要な、歯面処理

マルチリンク プライマー (セルフエッチタイプ) バランスよく配合された重合開始材により、マルチリンク オートミックスの化学重合を促進します。

ステップ

- マルチリンク プライマー A/B を 1:1 で混和
- ▶ エナメル質から被着面全体に 30 秒間塗布
 - ▶ 表面の液が動かなくなるまでエアードライ

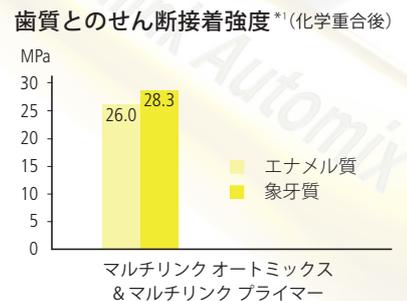

修復物を問わず、1液で処理

モノボンドプラス

(1液性プライマー：シラン系/リン酸系/イオウ系) ガラスセラミックス、酸化セラミックス、メタル、レジン等の材料に使用でき、強固な接着をサポートします。

ステップ

- 修復物内面に塗布 ▶ 60 秒後にエアードライ



特長

- エナメル質、象牙質ともに強固な接着
- 歯質に近い蛍光性
- 高い X 線造影性 (350% Al)
- 低い溶解性と吸水性
- 2 ~ 28°C での保管が可能

蛍光性の比較*¹



*¹ R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein, 2012

Automix

NEXT GENERATION

さらなる進化を遂げた、レジンセメント

守備範囲を広げる、4種類のシェード

光透過性の異なる4種類のシェードをラインナップし、審美性が求められる症例にも柔軟に対応します。



審美修復に不可欠の、Try-In ペースト

最終修復物の色調を正確にシミュレーションできます。
水溶性グリセリンのため、試適後は水で簡単に洗い流せます。



予後に影響する、エアバリア材


リキッドストリップを使用し、マージン部と酸素を遮断することで、セメントの未重合層を抑制し、吸水・変色を防ぎます。
辺縁封鎖を確実に行うことで、長期的な予知性を高めます。



容易な余剰セメントの除去

歯面を1/4面ずつ軽く光照射(クォーターテクニック)することでセメントがジェル状になり、余剰セメントの除去が簡単に行えます。除去可能な時間が約40%長くなり、さらに操作しやすくなりました。

(光が届かない部位は、2分間で完全硬化します。)

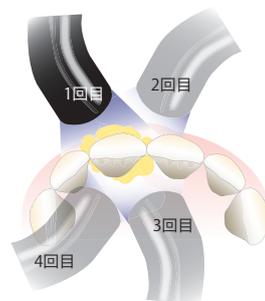

わずかなステップで、診療をサポート

2004年以來、世界で1千万を超える症例でマルチリンクが使用されています。



Try-In ペーストで修復物の色調を確認



支台歯にマルチリンク プライマーを塗布



修復物内面にモノボンドプラスを塗布



修復物内面にマルチリンクオートミックスを塗布し、セット*2

*2 歯面に直接塗布しないでください

*3 約650mW/cm²: 各3秒間

約1,000mW/cm²: 各1~2秒間

*4 約1,000mW/cm²



1/4面ずつ光照射後、余剰セメントを除去*3



マージン部全体にリキッドストリップを塗布



多方向から各20秒間光照射*4



必要に応じてマージン部を研磨し完成



Fixed Prosthetics

マルチリンク オートミックスは、「Fixed Prosthetics (固定式補綴物)」に分類されます。
この製品群は、固定式補綴物による修復(テンポラリー～セット後のメンテナンスまで)を網羅しています。
各製品はそれぞれバランス良く組み合わせられており、技工物製作と診療を成功に導きます。



製品内容 / 関連製品



システムパック 各1セット

627471WW T (トランスペアレント) 627473WW Y (イエロー)
645954WW W (ホワイト) 627472WW O (オパール)

シリンジいずれか1種と、各ステップに必要な製品を含んだセット品です。
・シリンジ 9g×1本 ・マルチリンク プライマー A/B 各3g
・モノボンドプラス 5g×1本 ・リキッドストリップ 2.5g×1本
・その他付属品
ミキシングパッド / ミキシングプレート / アプリケーター
ミキシングチップ / ルートキャナルチップ

モノボンドプラス 626221AN 5g×1本 修復用プライマー

試適後の修復物内面クリーニング液

イボククリーン 637568AN 5g×1本

水洗だけでは不十分な、試適後の唾液による修復物接着面の汚染を効果的に清掃し、強固な接着をサポートします。



シリンジ 各9g×1 (ミキシングチップブラック 15本付属)

615216WW T (トランスペアレント) 615217WW Y (イエロー)
645952WW W (ホワイト) 615218WW O (オパール)

ミキシングチップブラック 645951 15本×1

エンド用アプリケーター

ルートキャナルチップブラック 645955 5本×1

Try-In ペースト 各1.7g×1

645956WW T (トランスペアレント) 645957WW Y (イエロー)
645959WW W (ホワイト) 645958WW O (オパール)

カニューレ ブラック (23mm) 559224 20個×1

マルチリンク プライマー 各3g 歯面処理材

576825WW A+B (各1本) 613626WW A (1本) 613627WW B (1本)

アプリケーター 592435 25本×2種

リキッドストリップ 632505AN 2.5g×1本 重合補助エアバリア材

セルフエッチングプライマー

モノボンド エッチ & プライム 673026WW 5g×1

ガラスセラミックスをマイルドにエッチングでき、同時に試適後のクリーニングとシラン処理まで1本で行えます。

口腔内での使用はできません



一般的名称：歯科接着用レジンセメント / 販売名：マルチリンク オートミックス / 医療機器認証番号：225 AGBZX00001000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0229B06

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation