


ThinPrep® Pap Test


Anleitung zur Probenentnahme mit dem besenartigen Entnahmegerät

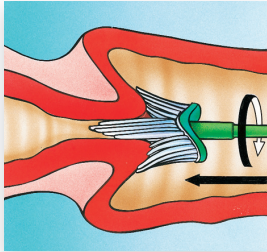

Entnahme

eines geeigneten Zervixabstrichs mit dem „**besenartigen**“ **Entnahmegerät**.

Führen Sie die mittleren Borsten des Besens so tief in den Zervixkanal ein, bis die kürzeren Borsten voll mit der Ektozervix in Kontakt sind. Drehen Sie den Besen vorsichtig fünfmal 360° im Uhrzeigersinn.

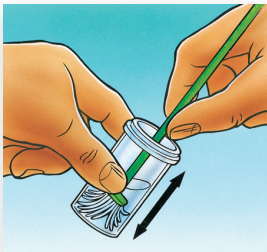

Ausspülen


des Besens in der PreservCyt®-Lösung, indem Sie ihn zehnmal gegen den Boden des Probengefäßes drücken und dabei die Borsten auseinanderschieben. Abschließend drehen Sie den Besen kräftig, um noch mehr Abstrichmaterial auszuspülen. Entsorgen Sie das Entnahmegerät.

*Lassen Sie den Borstenteil des Entnahmegerätes **nicht** in der Lösung zurück.*



Zuschrauben

des Deckels, bis die Drehlinie des Deckels die Drehlinie des Probengefäßes überdeckt.

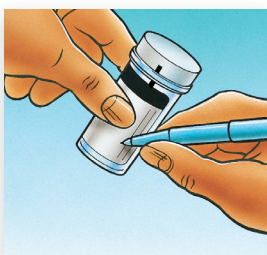

Eintragen

des Namens und der Kennnummer der Patientin auf dem dafür vorgesehenen Schriftfeld auf dem Probengefäß und der anatomischen Daten der Patientin auf dem Begleitformular.




Versand

des Probengefäßes und Begleitformulars in einer Versandtasche ins Labor.

ThinPrep® Pap Test

Anleitung zur Probenentnahme mit der Kombination Bürste/ Spatel

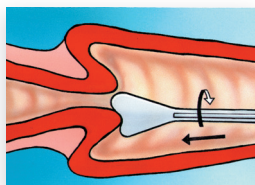


Entnahme

eines geeigneten **Ektocervixabstrichs** mit dem **Plastikspatel**.



Ausspülen

des Spatels in der PreservCyt-Lösung. Drehen Sie den Spatel zehnmal energisch im Probengefäß um. Entsorgen Sie den Plastikspatel.

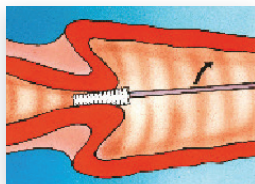

Entnahme

eines geeigneten **Endocervixabstrichs** mit der **Endocervixbürste**.

Führen Sie die Bürste in den Zervixkanal ein, bis nur noch die untersten Fasern sichtbar sind. Drehen Sie die Bürste langsam um eine viertel oder halbe Drehung in eine Richtung. DREHEN SIE NICHT ZU WEIT.



Ausspülen

der Bürste in derselben PreservCyt-Lösung. Drehen Sie die Entnahmebürste zehnmal in der PreservCyt-Lösung und schieben Sie sie dabei gegen die Wand des Probengefäßes. Abschließend drehen Sie die Bürste kräftig, um noch mehr Abstrichmaterial abzuspielen. Entsorgen Sie die Bürste.



Zuschrauben

des Deckels, bis die Drehlinie des Deckels die Drehlinie des Probengefäßes überdeckt.



Eintragen

des Namens und der Kennnummer der Patientin auf dem dafür vorgesehenen Schriftfeld auf dem Probengefäß und der anatomischen Daten der Patientin auf dem Begleitformular.



Versand

des Probengefäßes und Begleitformulars in einer Versandtasche ins Labor.



hologic.de | germany@hologic.com