

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośna wanna dmuchana dla osób starszych, WN-05



Dziękujemy za zakup Wanny pneumatycznej. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie używaj wanny na nierównym, ostrym lub gorącym podłożu.
2. Podczas kąpieli osoba kąpana musi pozostawać pod stałym nadzorem opiekuna.
3. Nie używaj gorącej wody powyżej 40°C – grozi to poparzeniem skóry.
4. Przed użyciem sprawdź, czy wanna jest stabilna i odpowiednio napompowana.
5. Nie stosuj rozpuszczalników (acetonu itp.) ani materiałów ściernych do czyszczenia wanny.
6. Nie kąp osoby z otwartymi ranami lub ranami pooperacyjnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
7. Nie używaj wanny, jeśli materiał jest uszkodzony, przetarty lub nieszczelny.
8. Osoby z zaburzeniami świadomości lub orientacji mogą być kąpane wyłącznie pod stałym nadzorem opiekuna lub personelu medycznego.
9. U osób z chorobami układu krążenia oddechowego lub neurologicznymi skonsultuj kąpiel z lekarzem.
10. Unikaj przeciążenia wanny – nie siadaj na jej krawędziach ani nie opieraj się na nich z dużą siłą.
11. Nie używaj suszarek elektrycznych ani innych urządzeń zasilanych prądem w pobliżu wanny wypełnionej wodą.
12. Nie nalewaj do wanny wody bez wcześniejszego sprawdzenia, czy odpływ jest szczelnie zamknięty.
13. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody – przepełnienie może spowodować przelanie i uszkodzenie otoczenia.
14. Przed założeniem i schowaniem wanny upewnij się, że jest całkowicie sucha.
15. Produkt przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła oraz ostrych przedmiotów.
16. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
17. Nie kładź wanny łatwopalnych powierzchniach podczas użytkowania ani tuż po jego zakończeniu.
18. Nie korzystaj z wanny jeśli widzisz, że jest ona widocznie uszkodzona.
19. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
20. Nie należy czyścić elementów zestawu silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
21. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
22. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
23. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiejkolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.
24. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.

Zestaw zawiera:

- 1x dmuchana wanna pneumatyczna WN-05;
- 1x nadmuchiwana poduszka;
- 1x wąż odpływowy;
- 2x łatka naprawcza.

Parametry techniczne:

- Kolor: biały
- Materiał: PVC
- Wymiar: 195 x 90 x 20 cm (długość x szerokość x wysokość)
- Waga: ok. 2 kg

Zastosowanie produktu

Wanna pneumatyczna przeznaczona jest do higieny osób leżących, które nie mogą korzystać z tradycyjnej łazienki. Może być używana na łóżkach rehabilitacyjnych i zwykłych. Idealnie sprawdza się w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych i szpitalach.

Instrukcja użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Rozłóż wannę na czystej, równej powierzchni, najlepiej bezpośrednio na łóżku.
- Upewnij się, że pod wanny nie znajdują się żadne ostre elementy mogące uszkodzić materiał.
- Ułóż wannę pod osobą kąpaną, korzystając z technik podobnych do zmiany pościeli.
- Napompuj wannę (wszystkie komory) za pomocą pompki – do momentu, gdy będzie sztywna, ale nie przepełniona.
- Sprawdź szczelność zaworów oraz zamknięcie korka odpływowego.

2. Napełnianie wodą:

- Użyj przenośnego prysznica, dzbanka lub innego źródła ciepłej wody (zalecana temperatura: 35–38°C).
- Wlewaj wodę powoli, kontrolując poziom – nie przekraczaj oznaczonej granicy napełnienia.
- Osoba kąpana powinna być stabilnie podparta – można użyć dołączonej poduszki lub ręcznika.

3. Przebieg kąpieli:

- Upewnij się, że osoba kąpana jest w bezpiecznej pozycji półleżącej lub siedzącej.
- Do mycia używaj łagodnych środków myjących i miękkiej gąbki.
- W razie potrzeby zabezpiecz głowę osoby kąpanej za pomocą nadmuchiwanej poduszki.

4. Opróżnianie wanny:

- Otwórz korek odpływowy i podłącz do wanny wąż odpływowy.
- Skieruj wylot węża do odpowiedniego odpływu (wiadro, toaleta, brodzik).
- Poczekaj, aż cała woda spłynie, następnie przetrzyj wnętrze wanny suchą szmatką.

5. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po każdej kąpieli przemyj wnętrze wanny letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Dokładnie opłucz i pozostaw do wyschnięcia w pozycji rozłożonej.
- Po całkowitym wyschnięciu spuść powietrze, złóż i przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu.

