



Instrukcja obsługi


Mankietu do ciśnieniomierzy

Mankiet Misure pasuje do wszystkich ciśnieniomierzy naramiennych: automatycznych, półautomatycznych oraz mechanicznych jednowężykowych.


Rękaw o rozmiarze 22-42 cm z jednym przewodem.

Używanie mankietu

1. Włożyć rurkę mankietu do otworu po lewej stronie urządzenia, jak pokazano na poniższym rysunku.

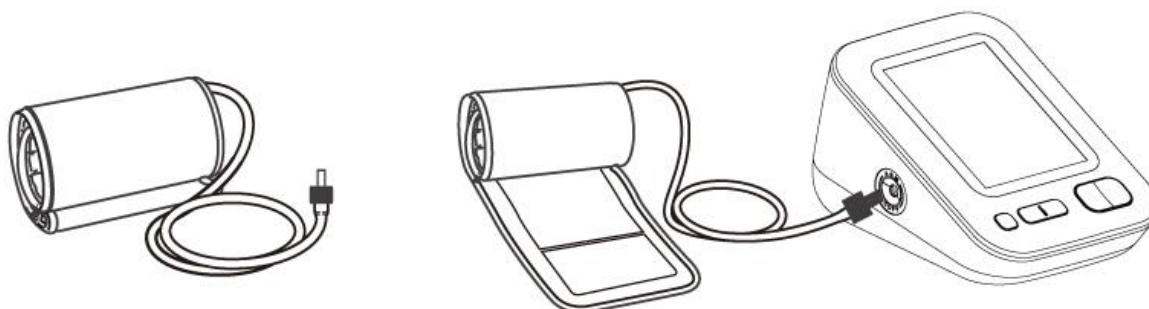


2. Mankiet jest wyprofilowany w celu łatwiejszego użycia. Zdjąć ciasne lub przeszkadzające ubranie z ramienia.
3. Owinąć mankiet wokół górnej części lewej ręki. Gumowa rurka powinna znajdować się po wewnętrznej stronie ramienia, sięgając w dół do dłoni. Upewnić się, że mankiet leży około 2 do 3 cm powyżej łokcia. **Uwaga!** Symbol  na krawędzi mankietu (znak tętnicy) musi znajdować się nad tętnicą biegnącą po wewnętrznej stronie ramienia.

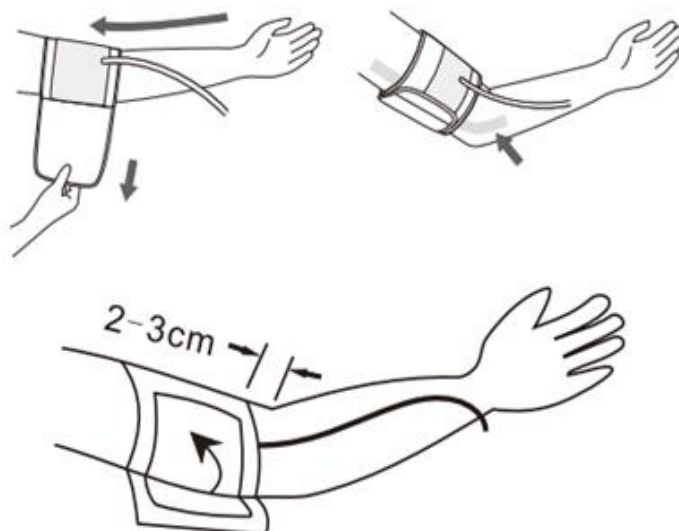

4. Aby umocować mankiet, owinąć go wokół ramienia i zaciśnąć zamknięcie na rzep.
5. Pomiędzy ramieniem a mankietem powinno być trochę wolnej przestrzeni. Powinny się w niej zmieścić 2 palce. Mankiety, które nie są prawidłowo dopasowane, skutkują fałszywymi wartościami pomiarowymi. Zmierzyć obwód ramienia, w razie braku pewności co do odpowiedniego dopasowania.
6. Położyć rękę na stole (dłoń w górę), aby mankiet był na wysokości serca. Upewnić się, że rurka nie jest załamana.
7. Pozostać w pozycji siedzącej w zrelaksowanym stanie przez co najmniej dwie minuty przed rozpoczęciem pomiaru.

Poprawna pozycja do pomiaru ciśnienia

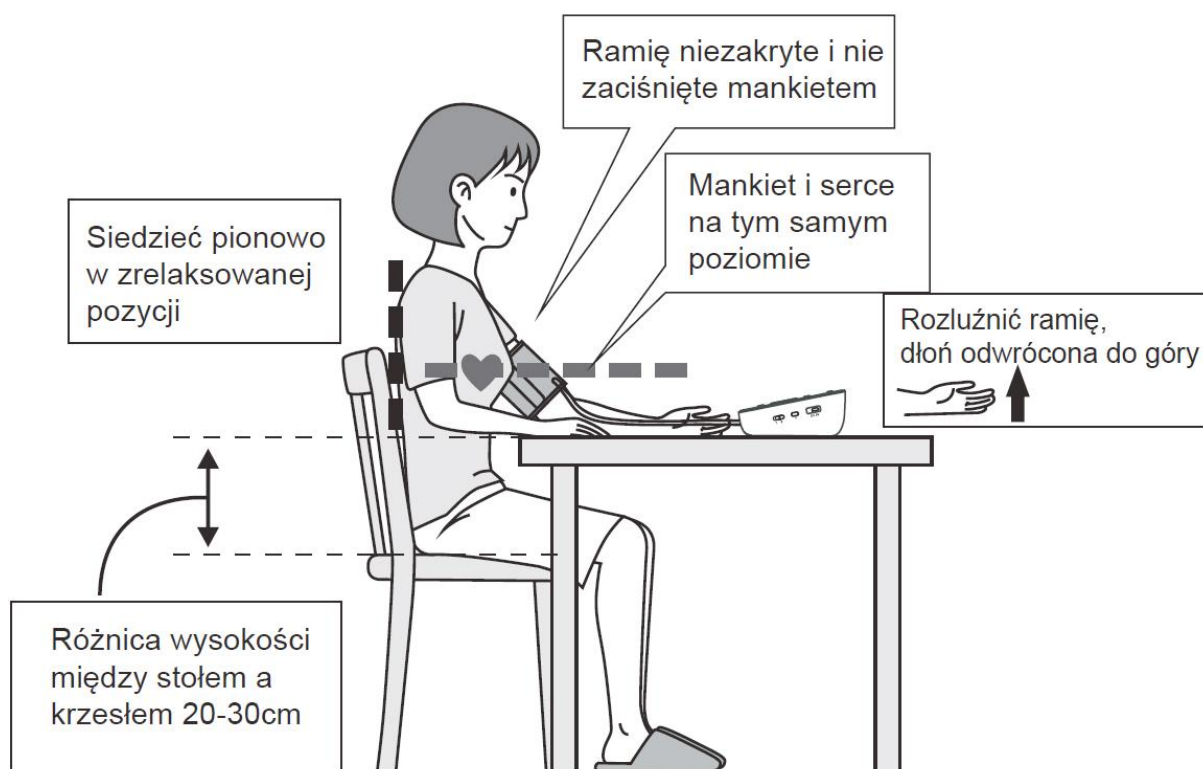

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Urządzenie może być jedynie używane w celach określonych w niniejszej instrukcji. Za szkody wynikłe z nieprawidłowego zastosowania urządzenia producent, importer ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić, czy mankiet jest sprawny i w dobrym stanie technicznym, czy nie jest uszkodzony i jest wolny od wad. Nie używać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń.
3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w urządzeniu jest niedozwolone.
4. Nie wolno prac mankieta w pralce lub myć w zmywarce.
5. Mankiet powinien być używany przez osoby dorosłe, zgodnie z przeznaczeniem i według zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
6. Przechowywać mankiet w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nie pozwolić aby dzieci samodzielnie go używały.
7. Utylizować urządzenia medyczne zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów.
8. Nigdy nie naprawiać samodzielnie urządzenia. Wszelkie naprawy mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis firmy MISURE.
9. Nie zakładać przewodu mankieta na szyi, trzymać go z dala od zasięgu dzieci.
10. Materiał, z którego wykonany jest mankiet i rurki nie zawiera lateksu.
11. Nie należy zakładać mankieta na rany lub inne uszkodzenia skóry ze względu na ryzyko zwiększenia obrażeń.
12. Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z używaniem urządzenia, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.
13. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania mankieta lub zauważenia zmian w jego działaniu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, należy zaprzestać używania przedmiotu i skontaktować się niezwłocznie z serwisem Misure.
14. Chronić przed wilgocią, wysoką temperaturą, kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opis użytych symboli

	Znak CE, produkt spełnia regulacje wynikające z unijnej dyrektywy <i>nowego podejścia</i> .		Urządzenie medyczne
	Opakowanie nadające się do recyklingu		Zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Skład zestawu: mankiet Misure z końcówką do ciśnieniomierzy.

Wymiary mankieta: 55 x 14 cm.

Gwarancja: 6 miesięcy.

Producent: Shenzhen Xuyangxingye Technology Co., Ltd.
No.16, 1 District, Tantou Second Industrial Zone, Songgang town, Bao'an District, Shenzhen,
China

Europejski przedstawiciel: MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 Munich, Germany

Importer: „Amar”, Rzemieślnicza 25, 77-400 Złotów
Tel. +48 501-760-290
www.misure.pl

Edycja: V 1.1
Ver. 01.10 2024r.
Made in PRC

