

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stolik przyłóżkowy


Kod produktu: TableTIM Multi



1. Wykonanie

Rama stolika przyłóżkowego jest w kształcie litery C, co zapewnia możliwość poruszania oraz przesuwania nad łóżkiem. Stolik posiada blat, na którym można umieszczać obiekty oraz kółka z hamulcem. Wysokość oraz kąt nachylenia blatu można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Zestaw zawiera: ramę podstawy, ramę blatu, blat, motylek montażowy.

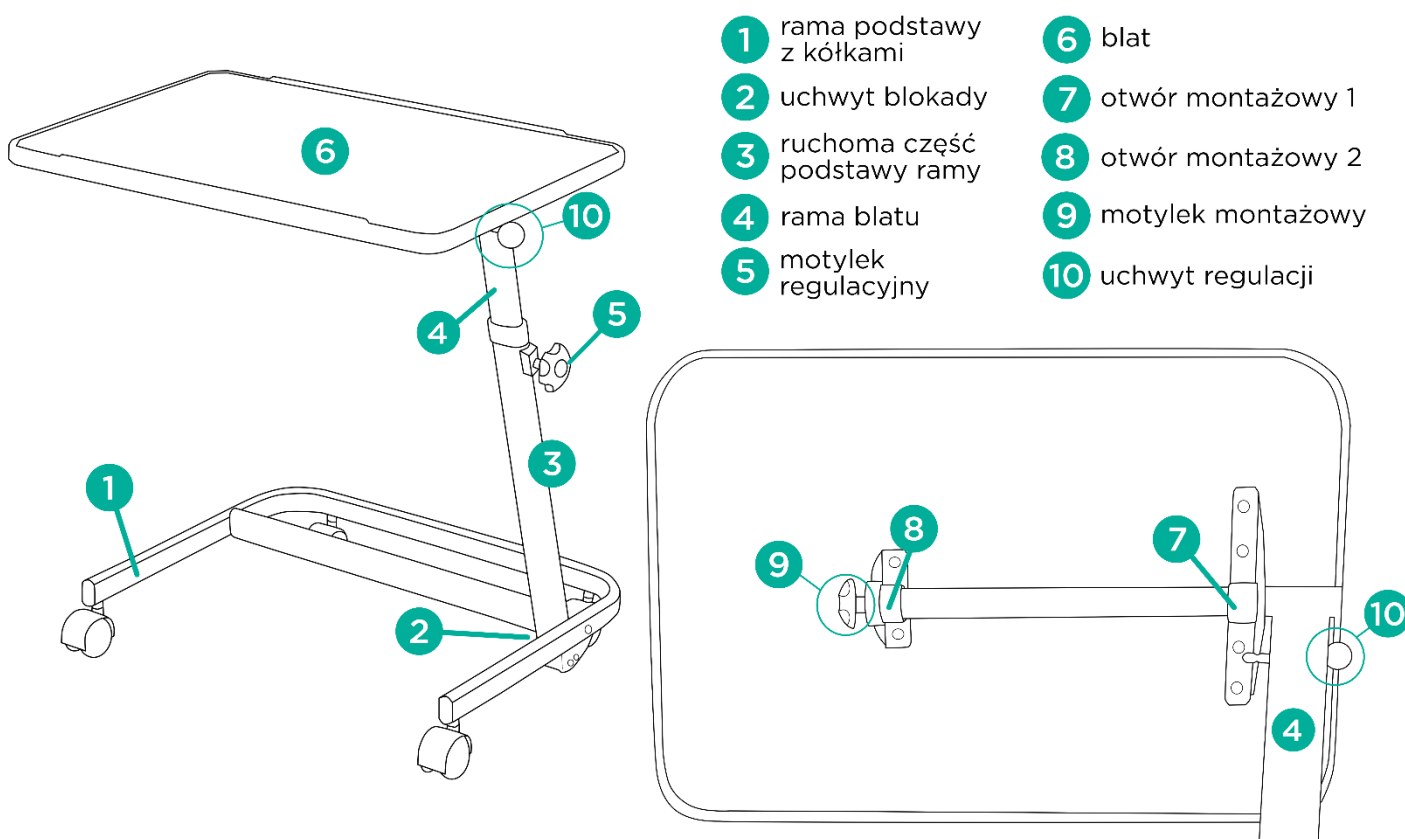

2. Zastosowanie

Stolik przyłóżkowy przeznaczony do użytkowania bezpośrednio nad łóżkiem pacjenta, aby zapewnić mu powierzchnię do jedzenia, czytania lub pisania podczas przebywania w łóżku. Produkt przeznaczony jest do stosowania zarówno podczas opieki w placówkach medycznych jak i w warunkach domowych.

3. Montaż i regulacja

- Ustawić ramę podstawy (1) na kołach i zablokować hamulce na czas dalszego montażu.
- Pociągnąć i przytrzymać uchwyt blokady (2) w ramie podstawy, a następnie unieść ruchomą część ramy (3) do góry, aż do pozycji pionowej. Pin blokujący powinien zablokować wybrane ustawienie (kliknięcie).
- Do kwadratowego otworu ramy podstawy włożyć ramę blatu (4) i dokręcić na wybranej wysokości motylkiem regulacyjnym (5) - po złożeniu, złożona rama stolika powinna przypominać literę C.
- Połączyć blat (6) z ramą blatu (4). W pierwszej kolejności, okrągły trzpień ramy powinien przejść przez otwór montażowy 1 (7), a następnie przez otwór montażowy 2 zlokalizowany bliżej środka blatu (8).
- Po przejściu trzpienia przez drugi otwór montażowy, wkręcić motylek montażowy (9) w trzpień ramy blatu od strony zewnętrznej.

Regulacja pochylenia blatu

- Aby wyregulować kąt nachylenia blatu, należy pociągnąć i przytrzymać uchwyt regulacji (10).
- Po ustawieniu właściwego kąta opuścić uchwyt regulacji w taki sposób aby pin regulacyjny zablokował jedną z 9 możliwych opcji regulacyjnych.

Regulacja pochylenia ramy

- Aby wyregulować kąt nachylenia ruchomej ramy podstawy (3), należy pociągnąć i przytrzymać uchwyt blokady (2), a następnie ustawić nowe położenie ramy.
- Po ustawieniu właściwego kąta opuścić uchwyt blokady - pin blokujący powinien zablokować wybrane ustawienie (kliknięcie).

Regulacja wysokości blatu

- Aby wyregulować wysokość blatu należy poluzować motylek regulacyjny (5).
- Po ustawieniu właściwej wysokości należy dokręcić motylek.

Hamulce

- Na czas użytkowania stolika należy zablokować hamulce kół.

4. Specyfikacja techniczna

Wymiary ramy (dł. x szer.)	58,6 cm x 53,8 cm
Wymiary blatu	60 x 40 cm
Reg. kąta ustawienia blatu	0° - 90°
Reg. kąta ustawienia ramy	72° / 90°
Regulacja wysokości	70 – 93 cm
Waga	8,3 kg
Maks. obciążenie	10 kg
Średnica kół	2,00"

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie ze stolika, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Produkt należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów produktu (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



07/2024(I)