

SKŁADNIKI

Tabletki RAPIDENT® zawierają:

- Wodorowęglan sodu
 - Kwas cytrynowy
 - Nadtlenek sodu
 - Węglan sodu
 - TAED (Tetraacetyletylenodiamina)
 - Środki powierzchniowo czynne niejonowe
 - Aromaty
 - Barwniki
 - Środki antybakteryjne
 - Środki wybielające na bazie tlenu
-

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotowanie roztworu

- Napełnij pojemnik ciepłą wodą (nie wrzącą) w ilości wystarczającej do całkowitego zanurzenia protezy lub aparatu ortodontycznego.
- Wrzuć jedną tabletkę RAPIDENT® do wody.

2. Zanurzanie i czyszczenie

- Zanurz protezę lub aparat ortodontyczny w roztworze.
- Pozostaw na **co najmniej 1 minutę** dla szybkiego czyszczenia.
- Dla głębszego oczyszczenia zaleca się pozostawienie na **co najmniej 10 minut**.
- Można pozostawić protezę lub aparat w roztworze **na całą noc** w celu dokładnej dezynfekcji.

3. Płukanie

- Wyjmij protezę lub aparat z roztworu.
 - Dokładnie optucz pod bieżącą wodą przed ponownym założeniem.
-

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Wyrób medyczny RAPIDENT® TABLETKI jest przeznaczony do codziennego czyszczenia protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych.
-

PRZECIWWSKAZANIA

- RAPIDENT® TABLETKI nie są odpowiednie dla osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników zawartych w formule.
-

IDEALNE TAKŻE DO APARATÓW ORTODONTYCZNYCH

- Idealne do czyszczenia protez, aparatów ortodontycznych i nakładek na zęby.
-

DLA LEPSZEGO UTRZYMANIA PROTEZY

 Zaleca się stosowanie **RAPIDENT® PASTA ADHEZYJNA**, aby:

- Uzyskać lepszą przyczepność nawet na wilgotnych dziąsłach (+30% większa siła klejenia).
 - Zapewnić większy komfort i bezpieczeństwo przez cały dzień.
 - Stworzyć barierę ochronną przed dostawaniem się jedzenia pod protezę.
-

 Produkt zgodny z europejskimi normami dotyczącymi wyrobów medycznych.
