

Wskazania

MedCu Opatrunki Przeciwdrobnoustrojowe z Tlenkiem Miedzi są wskazane do leczenia ran i zapewnienia bariery przeciwdrobnoustrojowej. Opatrunki są nakładane miejscowo i mają bezpośredni kontakt z raną. Opatrunki przeznaczone są do następujących wskazań:

Wskazania do stosowania OTC:

Miejscowe leczenie ran powierzchownych, drobnych oparzeń, otarć i ran szarpanych (rozdarcia).

Wskazania do stosowania RX:

Rany częściowej i pełnej grubości, odleżyny (stadium I-IV), owrzodzenia cukrzycowe, owrzodzenia żyłne, owrzodzenia tętnic, oparzenia I i II stopnia, rany chirurgiczne, dostęp naczyniowy lub miejsce wkucia obwodowego IV, zewnętrzne miejsca szpilek ortopedycznych oraz rany ostre, takie jak rany szarpane, otarcia i rozdarcia skóry.

Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów, o których wiadomo, że są nadwrażliwi na miedź.

Przygotowanie łóżyska rany:

- Dokładnie oczyścić i osuszyć obszar wokół rany przed nałożeniem opatrunku zgodnie z procedurą placówki.
- W razie potrzeby oczyścić tkankę martwiczą przed nałożeniem opatrunku.
- Nawadniać rany z niskim wysiękiem lub bez wysięku zgodnie z procedurą placówki.
- Jeśli to konieczne, leczyć infekcję zgodnie z procedurą placówki.

Dla dwóch zastosowań OTC i RX

Zakładanie opatrunku:

- Wybrać odpowiedni rozmiar opatrunku, oderwać sterylny woreczek z góry i aseptycznie wyjąć opatrunek.
- Należy nałożyć pomarańczową stronę opatrunku na miejsce rany. Przykryć opatrunkiem wtórnym i zabezpieczyć taśmą mocującą lub owinąć.
- Lekarz powinien ocenić każdą ranę i pacjenta, aby określić najlepszą metodę mocowania opatrunków MedCu.
- Lekarz może wybrać dowolną metodę mocowania zgodnie z procedurami placówki.

Częstotliwość zmiany opatrunku:

- Częstotliwość zmiany opatrunku na ranę może się różnić w zależności od stanu rany i okoliczności klinicznych.
- MedCu można pozostawić na miejscu do 7 dni.

Zmiana i zdejmowanie opatrunku:

- MedCu należy wymieniać gdy widoczne są oznaki nasycenia opatrunku lub gdy wymaga tego praktyka kliniczna lub procedury placówki.
- Aby zmienić nieprzylepne opatrunki MedCu, należy zdjąć bandaż mocujący lub taśmę i ostrożnie zdjąć opatrunek z rany. W razie potrzeby zwilżyć sterylną solą fizjologiczną, aby ułatwić usunięcie opatrunku.
- Aby zmienić przylepne opatrunki MedCu należy ostrożnie oderwać warstwę konturową i delikatnie zdjąć opatrunek z rany.

Środki ostrożności:

- MedCu można stosować na zakażone rany leczone zgodnie z instytucjonalnymi procedurami klinicznymi w celu zmniejszenia infekcji jako uzupełnienie standardowego schematu leczenia
- OTC stosowanie jest dozwolone tylko w przypadku ran powierzchownych, drobnych oparzeń, otarć i skaleczeń.
- Jednorazowego użytku.
- Nie sterylizować ponownie.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Sterylność jest zachowana, dopóki sterylny woreczek nie zostanie naruszony.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.