

PROTEKT®

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, Polska
tel.: +48 42 29-29-500
www.protekt.com.pl
e-mail: handlowy@protekt.com.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NOSZY PŁACHTOWYCH DX080



Spis treści

1. Opis	3
2. Wymiary	3
3. Zastosowanie	3
4. Instrukcja obsługi	4
5. Czyszczenie i dezynfekcja	4
6. Gwarancja i warunki gwarancji	4
7. Kontrola okresowa	5

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie noszy lub nie zastosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji.



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji.


1. Opis

Nosze płachtowe DX080 są ergonomiczne i proste w użyciu. Ich kompatybilna konstrukcja sprawia, że zajmują niewiele miejsca w transporcie. Nosze te znajdują zastosowanie gdzie do transportu poszkodowanego nie jest wymagane jego usztywnienie (gdzie nie ma podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa lub miednicy).

Nosze płachtowe są wyposażone w osiem uchwytów umieszczonych po obu dłuższych stronach. Nosze są produkowane z pławilu o wysokiej odporności na uszkodzenia i przetarcia. Nosze spełniają wymagania normy PN-EN 1865-1:2010.

Nosze DX080 przystosowane są do przenoszenia i transportu osób o masie ciała nie większej niż 150 kg.

2. Wymiary

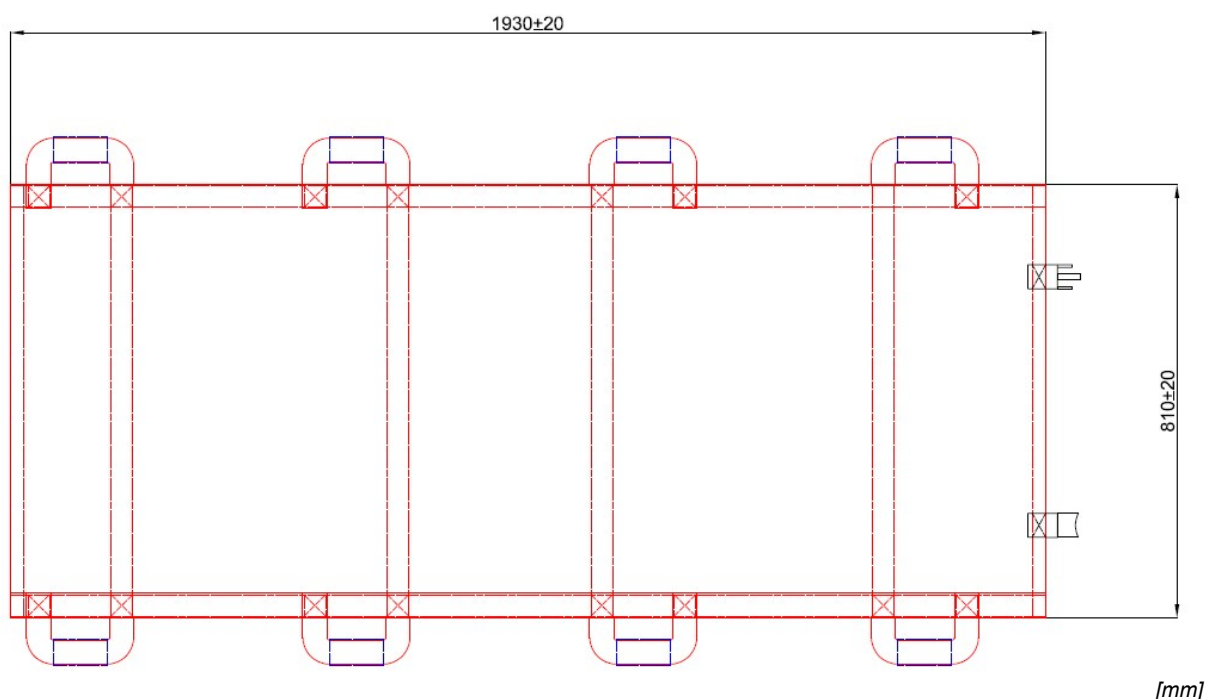

3. Zastosowanie

Nosze płachtowe DX080 muszą być rozkładane na równych powierzchniach. Pasy poprzeczne (wzmocnienia) powinny być umieszczone na spodniej stronie. Aby zapewnić prawidłowy transport pacjenta, musi on być umieszczony na środku noszy.

4. Instrukcja obsługi

Nosze płachtowe DX080 powinny być przenoszone przez przynajmniej 4 osoby. Ratownicy powinni być rozmieszczeni równo dookoła noszy. Pozwoli to na uniknięcie nienaturalnego lub męczącego ułożenia pacjenta lub pogorszenia jego stanu zdrowia podczas transportu. Po opuszczeniu trudno dostępnego terenu, pacjent natychmiast powinien być umieszczony na środku odpowiednim do transportu (materacu próżniowym, noszach typu deska, itd).

5. Czyszczenie i dezynfekcja

Do czyszczenia i szybkiej dezynfekcji wystarczy, aby umyć nosze łagodnym środkiem zawierającym mydło. Nosze płachtowe z pławilu są łatwo zmywalne przy wykorzystaniu środka czyszczącego do 60°C.

Do dezynfekcji należy użyć alkoholowego preparatu dezynfekująco-myjącego (np. MERIDA DESINFECTIN COMPLEX M430 PLUS)

Po czyszczeniu i/lub dezynfekcji, nosze płachtowe muszą być rozłożone i rozwieszone do wyschnięcia. Noszy płachtowych nie należy suszyć w suszarce ani w wirówkach. Nosze powinny być całkowicie wysuszone przed złożeniem, schowaniem i ponownym użyciem. Należy głównie zwrócić uwagę na taśmy włókiennicze zastosowane w produkcie.

6. Gwarancja i warunki gwarancji

Producent udziela 12-sto miesięcznej gwarancji na nosze płachtowe DX080. Producent zapewnia, że produkt jest wolny od wad materiałowych oraz tych powstałych w procesie produkcji.

Producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność, działanie swoich produktów tylko wówczas, jeśli:

- usługi serwisowe, naprawy, regulacje i modyfikacje są wykonywane przez producenta lub osoby przezeń upoważnione,
- produkt używany był właściwie, ściśle według instrukcji użytkowania, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne oraz wyniki z dokonywanych bez jego upoważnienia napraw lub przeróbek, a także spowodowane przez zdarzenia losowe lub niewłaściwe użytkowanie produktu lub jego części.

Gwarancja nie obejmuje skutków zwykłego zużycia oraz plam, przebarwień, wyblaknięć lub innych drobnych uszkodzeń, które nie zmniejszają walorów użytkowych produktu.

7. Kontrola okresowa

- Kontrola okresowa (min. 1 raz na rok) powinna być przeprowadzona przez osobę kompetentną (z firmy PROTEKT lub autoryzowany serwis producenta).
- W przypadku niejasności należy kontaktować się z producentem, firmą PROTEKT.

Czynności kontrolne:

- Kontrola pęknięć, przetarć, uszkodzeń materiału
- Kontrola kompletności i obecności elementów plastikowych
- Kontrola taśm wzmacniających
- Kontrola szwów

