

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Transfer na wannę

Kod produktu: TGR-R TW 330




1. Wykonanie

Transfer na wannę wykonany jest z PCV o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć. Składa się z siedziska, wyprofilowanego uchwyty oraz blokujących nóżek rozporowych.

Części składowe:

- a. siedzisko
- b. uchwyt (rączka)
- c. nóżki rozporowe

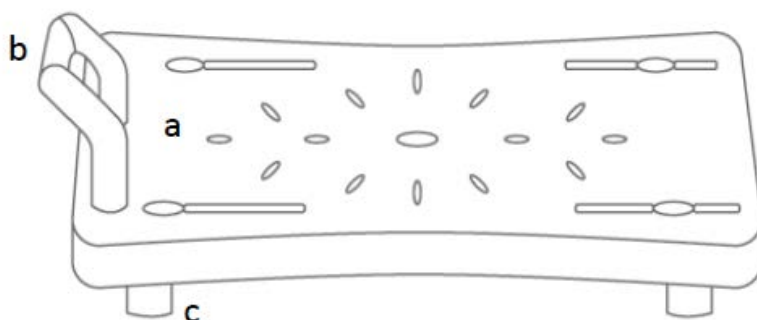

2. Zastosowanie

Transfer na wannę jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

3. Montaż

Krok 1. Należy zamontować uchwyt i nóżki rozporowe w płycie głównej.

Krok 2. Następnie dostosować transfer do szerokości wanny, w tym celu należy wyregulować nóżki rozporowe, tak by ich rozstawienie odpowiadało szerokości wanny.

Krok 3. Należy dokręcić nóżki rozporowe.

Uwaga! Przed pierwszym użyciem transferu należy sprawdzić poprawność montażu.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	70 cm
Głębokość całkowita	41 cm
Wymiary siedziska	42 x 29 cm
Waga ławki	2,8 kg
Maksymalne obciążenie	135 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z transferu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Transfer należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wytrzeć do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym:
 - dokręcenie nóżek rozporowych
 - stan płyty głównej i uchwytu (pod kątem pęknięć)

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021