

Instrukcja obsługi

Domowy test zdrady



Strip Detective



2 minuty



10 testów

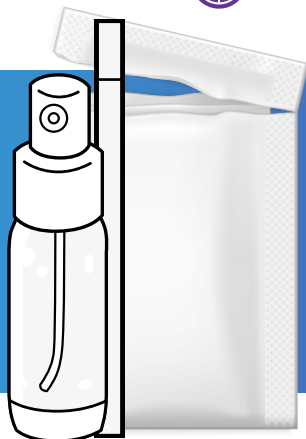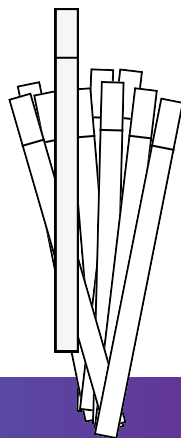


Zawartość zestawu

- Saszetka zawierająca 10 testów (+ desykant)
- 1 buteleczka ze spryskiwaczem
- Instrukcja obsługi w j. angielskim


1. Przygotuj test

Wyjmij jeden patyczek testowy z saszetki.
Desykant silikonowy pozostaw w saszetce.

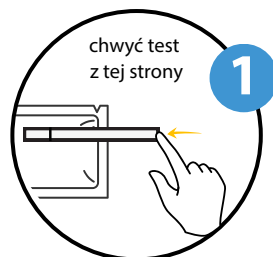

2. Spryskaj płamę

Napełnij buteleczkę wodą. Zwilż
płamę dwukrotnie przyciskając
pompkę.

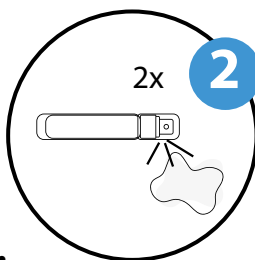

3. Wybierz jedną z metod:

instrukcje video



jasne materiały



ciemne materiały



materiały, których nie chcesz
popalić

✓ jasne materiały

✓ ciemne materiały


✓ materiały, których nie chcesz popalić

4. Zwilż 1 raz pole testowe

Przyciśnij pole testowe do płamy




(!) Odróżniające się pole testowe powinno być zwrócone do płamy. Pozostaw je na płamie.

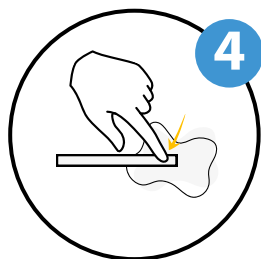

4. Przygotuj patyczek do czyszczenia uszu (nie jest zawarty w zestawie) i zwilż go jeszcze 3 razy.


Przyciśnij patyczek do płamy

Obracaj patyczek bawełniany w płamie. Upewnij się, że jest mokry z każdej strony.

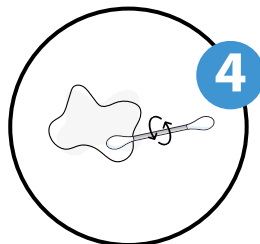

4b. Przyciśnij patyczek bawełniany do pola testowego

Pozostaw patyczek bawełniany na polu testowym - powinny się cały czas dotykać.

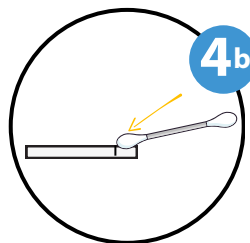


5. Poczekaj 2 minuty




6. Sprawdź wynik

Kolor pola testowego zmieni się w fioletowy, jeżeli płama zawiera spermę.

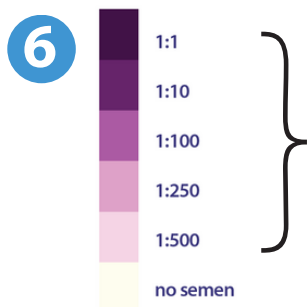

Pozytywny: Badany materiał zawiera spermę

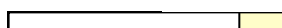

Negatywny: Badany materiał nie zawiera spermy

Jeśli nie masz pewności co do ostatecznego wyniku, możesz wykonać kontrolę negatywną. Weź nieużywany pasek i spryskaj go wodą. Oczekaj 2 minuty i porównaj wynik kontrolny ze swoim wynikiem. Jeśli kolor testu kontrolnego jest taki sam jak twój - zinterpretuj swój test jako negatywny.

Interpretacja testu, przykłady, pytania

Strip Detective

Domowy test zdrady (na obecność nasienia)


Co mogę zrobić jeżeli nie jestem pewien wyniku?

Jeżeli nie jesteś pewny wyniku, możesz wykonać kontrolę negatywną.

Wymij z opakowania świeży patyczek i zwilż go wodą 2 razy. Odczekaj dwie minuty i porównaj kolor patyczka z kolorem Twojego wyniku. Jeżeli kolor pola testowego będzie podobny - Twój test jest negatywny

Przykłady:

negatywny wynik

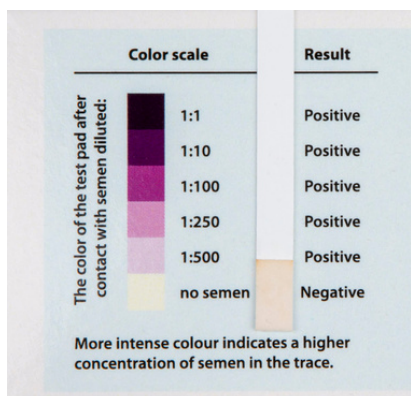

pozytywny wynik

