

Lampa Laser do Usuwania Grzybicy Paznokci

Urządzenie laserowe do leczenia grzybicy paznokci

 Czas zabiegu: 7 minut

Czas odliczania zabiegu
420 sek

Gdy licznik osiągnie 0, urządzenie automatycznie się wyłączy

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

 Należy zapobiegać bezpośredniemu lub odbiciemu kontaktowi promieniowania laserowego z oczami

 Kobiety w ciąży nie powinny używać urządzenia w pobliżu macicy

 Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

 Osoby poniżej 18 roku życia powinny używać urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej

 Urządzenie należy używać zgodnie ze środkami ostrożności zawartymi w niniejszej instrukcji

WAŻNE: Produkt jest bezpieczny i nie powoduje skutków ubocznych przy prawidłowym użytkowaniu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie przez 3-4 godziny

2 Sprawdź, czy urządzenie jest w pełni naładowane (diody LED zgasną po pełnym naładowaniu)

3 Umieść urządzenie bezpośrednio na porażonym paznokciu

4 Urządzenie automatycznie rozpocznie 7-minutowy zabieg

5 Po 7 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie

6 Po zakończeniu zabiegu zdejmij urządzenie z paznokcia

CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Stosowanie: 2 razy dziennie

Czas zabiegu: 1-2 cykle (7 lub 14 minut)

Okres kuracji: 3 miesiące

Efekty: Poprawa widoczna po 3 miesiącach regularnego stosowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 5V

Wejście: 100-240V/60Hz 0,2A

Czas ładowania: 3-4 godziny

Bateria: 602040400 mAh

Intensywność lasera: 20

Maks. intensywność impulsu: 22W

Długość fali lasera: 940nm (niewidoczna)

Światło niebieskie: 500nm

Ilość diod LED: 4 sztuki

Ustawienie czasu: 7 minut

INFORMACJE O DIODACH LED



Laser 940nm

Niewidoczny gołym okiem
Główne działanie terapeutyczne



Światło niebieskie 500nm

Widoczne
Sygnalizacja pracy

Uwaga: Długość fali 940nm jest niewidoczna gołym okiem, dlatego urządzenie ma tylko 3 widoczne diody LED.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Czas ładowania: 3-4 godziny

Wskaźnik: Po pełnym naładowaniu diody LED na urządzeniu zgasną

Problem z ładowaniem? Jeśli urządzenie nie świeci się po włączeniu, najpierw naładuj urządzenie. Jeśli po pełnym naładowaniu nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Urządzenie laserowe
Lampa Laser
1 sztuka



Kabel USB-C
Do ładowania
1 sztuka



Instrukcja obsługi
Niniejszy dokument
1 sztuka

DZIAŁANIE URZĄDZENIA

Zasada działania: Urządzenie wykorzystuje światło laserowe o długości fali 940nm do zwalczania grzybicy paznokci. Promienie laserowe penetrują paznokcie i niszczą grzyby bez uszkodzania zdrowych tkanek.

Skontroluj działanie:  Urządzenie działa prawidłowo, gdy diody świecą się podczas zabiegu i automatycznie wyłączą się po 7 minutach.

SERWIS I WSPARCIE

Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu

Reklamacje: W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą

WAŻNE INFORMACJE

Urządzenie Lampa Laser do Usuwania Grzybicy Paznokci jest przeznaczone do domowego leczenia grzybicy paznokci.

Przechowuj instrukcję przez cały okres użytkowania urządzenia.

W przypadku poważnych problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem.

© 2024 | Lampa Laser do Usuwania Grzybicy Paznokci | Degtes