

SenSura[®]Mio



Besondere Aufbewahrungsbedingungen

Bewahren Sie das Produkt in horizontaler Lage auf.

SenSura[®]Mio Convex

Einteiliger offener Stomabeutel

Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Stomaversorgung

Anwendung



Gebrauchsanleitung


23324203 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.©

Velcro[®] ist Eigentum der Velcro Industries B.V


2020-08-20

Vorbereiten

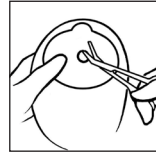


Anschließend eine Öffnung in Größe und Form des Stomas zuschneiden. Zum Ausschneiden empfiehlt sich eine gebogene Schere.


Größe und Form des Stomas auf der Stomaschablone mit einem Stift markieren. Um Undichtigkeiten und Hautprobleme zu vermeiden, muss die Öffnung in der Haftfläche exakt um das Stoma herum abschließen.

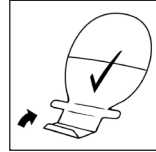


Den Beutel mit der Haftfläche nach unten auf einen Tisch oder eine flache Fläche legen. Der Auslass wird geschlossen, indem die untere, kleinere Platte über die obere, größere Platte gelegt wird und dann zweimal nach oben gefaltet wird, bis der Klettverschluss-Streifen (Velcro[®]) sichtbar wird

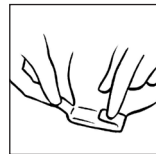


Falten Sie die zwei türkisen Laschen nach innen, um den Klettverschluss zu schließen.

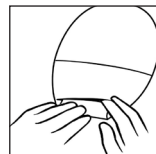

Der Auslass kann entweder mithilfe des Klettverschluss-Punktes direkt über dem Auslass oder mit dem Klettverschluss-Streifen in der Mitte des Beutels geschlossen werden.

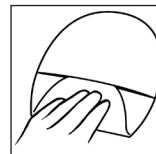

(Dies gilt nicht für transparente Beutel, die keine Klettverschluss-Punkte in der Mitte des Beutels aufweisen.)

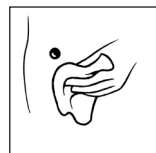

Das Stoma und die stomaumgebende Haut gründlich reinigen. Vor dem Anbringen der Basisplatte muss die Haut sauber und trocken sein.

Verwendungszweck

Der Stomabeutel ist dafür vorgesehen, die Ausscheidungen aus einem Stoma passiv aufzufangen. Die Hautschutz-Basisplatte wird am Stomabeutel angebracht und ist dafür vorgesehen, auf intakter Haut um das Stoma zu haften.

Indikation

Das Produkt ist für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang (Stoma) indiziert.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereiten, Waschen, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und ein zusätzliches Körperverletzungs- oder Infektionsrisiko für den Anwender verursachen.

Vorsichtshinweise

Zur korrekten Anwendung wenden Sie sich vor der ersten Verwendung eines gewölbten Produkts an Ihre medizinische Fachkraft.

Information

Stomabeutel zum Einmalgebrauch.

Die Produkte sollen bis zum Gebrauch in der Verpackung aufbewahrt werden, da die Verpackung die Produkte schützt. Das Etikett auf der Verpackung enthält wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfalldatum und einen eindeutigen Strichcode.


Das Produkt muss vor einer Untersuchung im Kernspintomografen nicht entfernt werden, da es MR-sicher ist.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.


Applizieren



Entfernen Sie zunächst die transparente Schutzfolie. Fixieren Sie dazu die Lasche mit dem Daumen und ziehen Sie die Schutzfolie mit der anderen Hand ab.

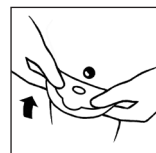


Richten Sie den Hautschutz rund um das Stoma aus und drücken Sie ihn fest an die Haut. Der Hautschutz muss rund um das Stoma eng anliegen. Um Leckagen zu vermeiden, muss auf eine gute Abdichtung rund um das Stoma geachtet werden. Beim Andrücken des Hautschutzes/des Beutels an die Bauchdecke sollten Sie im Bereich nah am Stoma beginnen und den Hautschutz fest an die Haut drücken. Fahren Sie mit dem Finger um das gesamte Stoma herum entlang, um sicherzustellen, dass der Hautschutz dicht anliegt. Glätten Sie den Hautschutz vom Stoma weg nach außen bis zum Rand, um sicherzustellen, dass der Hautschutz vollen Kontakt zur Haut hat.

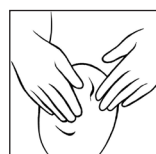

Die Versorgung von unten nach oben fest auf die Haut drücken, um ein rasches Haften und einen sicheren Halt zu gewährleisten.

Ausleeren des Beutels

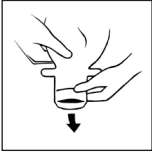


Für das Entleeren des Beutels den Auslass öffnen. Inhalt des Beutels in eine Toilette auslaufen lassen. Und dabei den Beutel mit den Fingern austreichen.



Den Auslass mit einem trockenen Tuch, z.B. Toilettenpapier in einer einzigen Bewegung vom Körper weg abwischen. Die kleine Platte so weit nach hinten falten, dass nur die große Platte sichtbar ist. Der Rand kann nun gereinigt werden. Nach der Entleerung und Reinigung den Auslass durch Auffalten wieder verschließen.

Entfernen

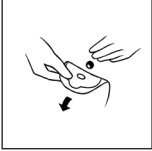

Entfernen Sie die Basisplatte von der Haut, indem Sie sie langsam und vorsichtig nach unten abziehen und dabei gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut gespannt halten um Gegendruck auf den Bauch auszuüben. Gleichzeitig mit der freien Hand die Haut gespannt halten und etwas Gegendruck auf die Haut auf dem Bauch ausüben.

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte gemäß den gültigen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.


Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Filterabdeckung



Falls erforderlich, eine der beiliegenden Filterabdeckungen auf dem Filter anbringen, um ein Entweichen der Gase zu vermeiden.

Gürtel

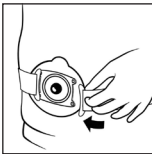

Passen Sie die Gürtellänge durch Ziehen der Bänder so an, dass er um Ihren Körper passt. Es ist nicht nötig, den Stoff zu entfernen, der die Schnalle bedeckt. Befestigen Sie jeden der vier Gürtelhaken mit einer der vier Gürtelösen auf jeder Seite der Basisplatte. Beginnen Sie vorne und wenden Sie leichten Druck in Richtung Magen an. Ziehen Sie dann die Gürtelhaken von der Kopplung weg, bis sie fest „klicken“.

(Bezieht sich nur auf Produkte mit Gürtelösen.)

Meldung von Zwischenfällen

Wenn es während oder infolge der Anwendung dieses Produkts zu einem schweren Zwischenfall kommt, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der entsprechenden Behörde Ihres Landes.

Erläuterung der Symbole



Medizinprodukt



Weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte entspricht



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht wiederverwenden



Bedeutet, dass der Strichcode eine Unique Device Identification enthält



(Global Trade Item Number) Globale Artikelidentnummer



Vor direktem Sonnenlicht schützen



Hier oben



Wiederverwertbare Packung



MR-sicher