



MYCIE I DEZYNFEKCJA WSTĘPNA NARZĘDZI MEDYCZNYCH

Aniosyme X3

**MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI MEDYCZNYCH
I CHIRURGICZNYCH ORAZ SPRZĘTU
ENDOSKOPOWEGO PRZED STERYLIZACJĄ**

- Opatentowana formuła
- Działanie mikrobójcze już w 5 min
- Nie powoduje korozji materiałów




Aniosyme X3

Mycie i dezynfekcja narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją


WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Kompleks trzech enzymów w połączeniu z niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym
- Udowodniona skuteczność (DCP*) *ang. Degreasing Cleaning Power
- Odtłuszczająca Moc Myjąca
- Neutralne pH: kompatybilne ze stopami metali
- Formuła nie zawierająca chlorków: nie powoduje korozji materiałów
- Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych
- Niebieski płyn
- Wartość pH roztworu przygotowanego w wodzie wodociągowej: ok. 7,5


INSTRUKCJA UŻYCIA

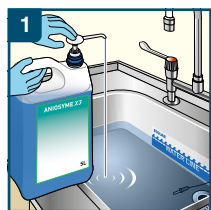


Koncentrat. Należy stosować przez zanurzenie przy wymaganym stężeniu, z zachowaniem czasu kontaktu.

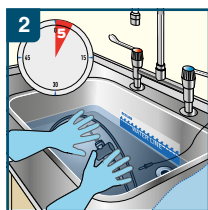

Sprzęt medyczny należy w pełni zanurzyć. W trakcie dezynfekcji przez zanurzenie wanny z roztworem dezynfekcyjnym należy przykryć pokrywą. W razie potrzeby doczyścić szczoteczką.

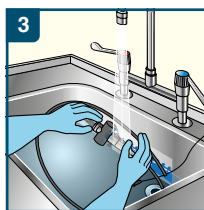

Dokładnie spłukać wyroby medyczne wodą o jakości wody pitnej, aby usunąć wszelkie pozostałości preparatu i zabrudzeń organicznych.

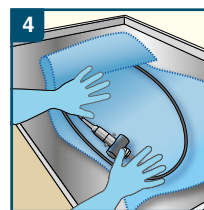

Aby zachować skuteczność produktu, należy wymieniać roztwór roboczy zawsze, kiedy jest widocznie zanieczyszczony, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

TABELA DOZOWANIA

ILOŚĆ ROZTWORU	STĘŻENIE ROZTWORU 0,5%
	objętość koncentratu (ml)
1 l	5 ml
2 l	10 ml
4 l	20 ml
8 l	40 ml

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SPÉKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE	CZAS DZIAŁANIA
Działanie bakteriobójcze zgodnie z EN 13727, EN 14561, warunki brudne	0,5%	5 min
Działanie drożdżakobójcze zgodnie EN 13624 i EN 14562, warunki brudne	0,5%	5 min
Działanie wirusobójcze na wirusy otłonkowe zgodnie z EN 14476/EN 17111, warunki brudne	0,5%	7 min

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Aniosyme X3	12 x 1 l butelka	3102400
Aniosyme X3	2 x 5 l kanister	3103990



0459

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych: narzędzia chirurgiczne i medyczne, narzędzia termolabilne i sprzęt endoskopowy przed ich sterylizacją.

INSTRUKCJA UŻYCIA

W postaci koncentratu. Należy stosować przez zanurzenie przy wymaganym stężeniu, z zachowaniem czasu działania.

Sprzęt medyczny należy w pełni zanurzyć. W trakcie dezynfekcji przez zanurzenie wanny z roztworem dezynfekcyjnym należy przykryć pokrywą. W razie potrzeby doczyścić szczoteczką.

Dokładnie spłukać wyroby medyczne wodą o jakości wody pitnej, aby usunąć wszelkie pozostałości preparatu i zabrudzeń organicznych.

Aby zachować skuteczność produktu, należy wymieniać roztwór roboczy zawsze, kiedy jest widocznie zanieczyszczony, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

SKŁAD

Czwartorzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza i amylaza), substancje zapachowe, barwnik, substancje pomocnicze.

PRZECHOWYWANIE

Niebezpieczeństwo – należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

DOKUMENTACJA

Wyrób medyczny. Dokumentacja produktu Aniosyme X3 dostępna jest na życzenie.

STOSUJ OSTROŻNIE WYRÓB MEDYCZNY

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

ECOLAB®

www.ecolab.pl