


CZYSZCZENIE USZU

ELEKTRYCZNY CZYŚCIK DO USZU Z SYSTEMEM IRYGACYJNYM

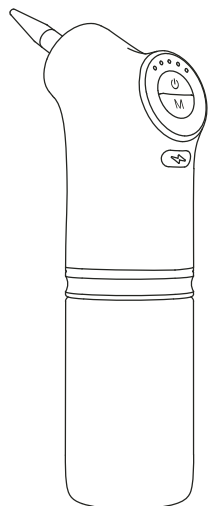

INSTRUKCJA OBSŁUGI NV350

PL

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję w całości i zachowaj ją do użycia w przyszłości.

POMOCNE WSKAZÓWKI

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i wskazówki. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia ciała i straty mienia.


1. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie czyść całego urządzenia.
2. Nie trzymaj urządzenia do góry nogami, w przeciwnym razie woda dostanie się do urządzenia i je uszkodzi.
3. Nie używaj tego produktu, jeśli masz infekcję ucha, dziurę w błonie bębenkowej, wyciek krwi z uszu lub jakiegolwiek rodzaj urazu ucha. Jeśli nie jesteś co do tego pewien, powinieneś zwrócić się o pomoc lekarską.
4. To normalne, że odczuwasz ucisk, ale nie odczuwasz bólu. Jeżeli poczujesz ból, natychmiast przestań używać tego produktu i skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.
5. Dzieci lub osoby niepełnosprawne powinny używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej lub opiekuna.
6. Ten produkt nie jest zabawką, proszę przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Ten produkt jest wyposażony w baterię, należy trzymać go z daleka ognia, wilgoci i środowiska o wysokiej temperaturze. Może eksplodować w wyniku przegrzania.
8. Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu.
9. Upewnij się, że podłączyłeś odpowiedni zasilacz DC5V, aby naładować produkt.
10. Nie należy stosować roztworu chłodniejszego niż temperatura ciała, może to powodować zawroty głowy. Ciepła woda, jeśli jest to zalecane (nie powinno być zbyt gorąco: +/- 37 stopni).

11. Nie zmieniaj ani nie modyfikuj produktu ani nie demontuj urządzenia wewnętrznego, może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

12. Nie klasyfikuj go jako odpadu domowego. Jeżeli nie będziesz już używać tego produktu, należy go zutylizować w ramach procesów recyklingu obowiązujących w lokalnych władzach i wysłać do lokalnej stacji recyklingu sprzętu elektronicznego.

Wskazówki: Wszystkie obrazy w instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą występować różnice między rzeczywistym produktem a obrazami ze względu na aktualizacje lub ulepszenia produktów. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

ELEKTRYCZNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA USZU

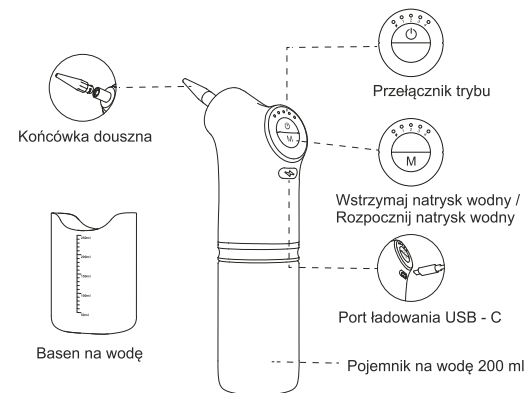

PRZYCISKI FUNKCJI

1. Włączyć

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” zasilania przez 1-2 sekundy, aż diody LED zaczną migać.

2. Wyłączyć

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 1-2 sekundy, aż diody LED zgasną.

3. Przycisk przełącznika natrysku „M.”


Krótkie naciśnięcie powoduje rozpoczęcie lub wstrzymanie strumienia wody.

4. Oszczędzanie energii

Urządzenie do czyszczenia uszu ma funkcję oszczędzania energii przez 10 minut i wyłączy się automatycznie, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna czynność.

OPIS LAMPEK KONTROLNYCH I TRYBÓW

Urządzenie do czyszczenia uszu domyślnie działa w trybie normalnym. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać pożądaną tryb.

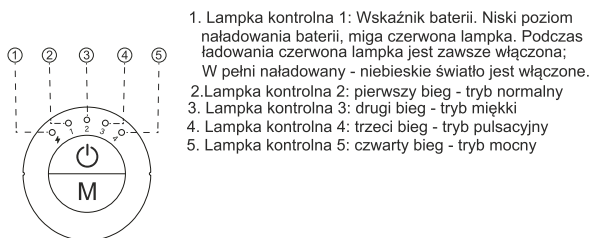

1. Lampka kontrolna 1: Wskaźnik baterii. Niski poziom naładowania baterii, miga czerwona lampka. Podczas ładowania czerwona lampka jest zawsze włączona; W pełni naładowany - niebieskie światło jest włączone.
2. Lampka kontrolna 2: pierwszy bieg - tryb normalny
3. Lampka kontrolna 3: drugi bieg - tryb miękki
4. Lampka kontrolna 4: trzeci bieg - tryb pulsacyjny
5. Lampka kontrolna 5: czwarty bieg - tryb mocny

Tryb normalny: Umiarkowane ciśnienie wody, odpowiednie dla większości ludzi.

Tryb miękki: Średnie ciśnienie wody, skuteczne i głębokie oczyszczanie.

Tryb pulsacyjny: naprzemienny silny i słaby przepływ wody, różne uczucia czystości.

Tryb mocny: Silne ciśnienie wody, eliminuje najtwardszą woskowinę.

KROKI UŻYCIA:

Krok 1

Używaj ciepłej wody o temperaturze ciała.

Krok 2

Założ jednorazową końcówkę douszną.

Krok 3

Umieść miszkę pod uchem w celu nawadniania.

Krok 4

Poruszaj się płynnie, okrężnie, aby zwiększyć efekt czyszczenia.

Krok 5

Blokada zniknęła i zakończono irygację uszu.

PRZED UŻYCIEM

1. To normalne, że w produkcie (butelce na wodę, rurze wodnej itp.) znajdują się resztki wody destylowanej użytej do testowania wydajności.

2. Przy pierwszym użyciu zaleca się użycie trybu pierwszego. Wybierz inne tryby w zależności od potrzeb.


3. Przed irygacją zaleca się zmiękczenie ciężkiej lub twardej woskowiny.

KOŃCÓWKI DOUSZNE

Miękka końcówka douszna jest higieniczna i można ją zdjąć, co ułatwia wymianę.

ZAINSTALUJ KOŃCÓWKI DOUSZNE

Założ jednorazową końcówkę na koniec dyszy i dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

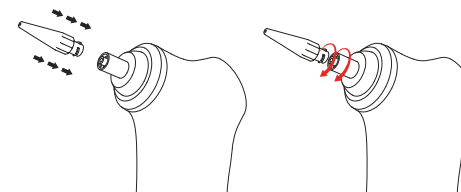


WSKAZÓWKI

- 1. Jest to jednorazowa końcówka douszna. W przypadku infekcji ucha zużyte końcówki douszne należy wyrzucić.
- 2. Aby kupić dodatkowe jednorazowe miękkie końcówki douszne, skontaktuj się ze sklepem, aby uzyskać więcej informacji.


NAPEŁNIJ CIEPLĄ WODĄ

Wyjmij z opakowania butelkę na wodę wielokrotnego użytku, dodaj ciepłą wodę <200 ml i zakręć ją na urządzeniu do czyszczenia uszu.

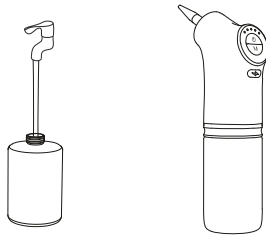


- 1. Zalecana jest ciepła woda.
- 2. Może mieć temperaturę ciała lub +/- 37 stopni.
- 3. Nie wstrzykuj substancji chemicznych, takich jak ciała stałe, które mogłyby zablokować lub uszkodzić urządzenie do czyszczenia uszu.

POJEMNIK NA WODĘ

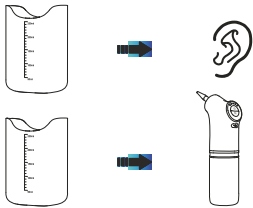

- 1. Zbiornik ma ergonomiczny kształt z małym i szerokim bokiem radialnym.
- 2. Umieść małą stronę radioaktywną pod płatkim ucha, aby zebrać płyn podczas irygacji.

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

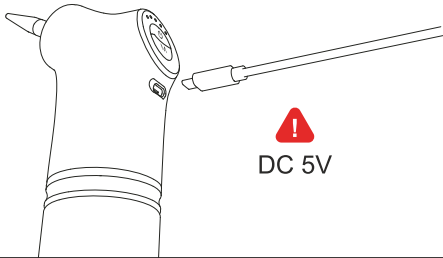

- 1. Przy pierwszym użyciu należy naładować urządzenie do czyszczenia uszu. Przed ładowaniem wyłącz urządzenie do czyszczenia uszu.
- 2. Upewnij się, że urządzenie do czyszczenia uszu i Twoje ręce są suche, aby podłączyć kabel typu C (w zestawie) do urządzenia do czyszczenia uszu i podłączyć je do portu ładowania USB 5V DC.

WSKAZÓWKI

- 1. Nie używaj produktu podczas ładowania.
- 2. Ładuj urządzenie do czyszczenia uszu w środowisku o temperaturze od 15 do 35 stopni.
- 3. Czas pracy może się skrócić w przypadku ładowania w środowisku o niskiej temperaturze, poniżej 15 stopni.
- 4. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska, ładowanie może nie być możliwe.

SPECYFIKACJA

Pojemność baterii	2000 mAh
Moc	1.3 V
Wejście	Typ C 5V/1A
Czas ładowania	Okolo 3 godziny
Czas pracy	Okolo 7 godzin
Pojemnik na wodę	200 ml

KONSERWACJA

- 1. W trybie wyłączenia wyjmij butelkę z wodą i wylej resztę wody.
- 2. Włącz urządzenie do czyszczenia uszu, aby spuścić resztki wody z urządzenia wewnętrznego i dyszy.
- 3. Zdejmij końcówkę douszną i wyrzuć ją.
- 4. Produkt czyść wilgotną bawełnianą szmatką. Nie należy stosować żadnych roztworów czyszczących ani żrących cieczy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- niskiego poziomu naładowania baterii.
- 2. Jeśli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest naładowane. Jeśli urządzenie jest naładowane, ale nie działa, sprawdź, czy jest prawidłowo podłączony. Jeśli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest naładowane. Jeśli urządzenie jest naładowane, ale nie działa, sprawdź, czy jest prawidłowo podłączony.
- 3. Jeśli diody LED nie działają podczas ładowania, sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
- 4. Jeżeli ciśnienie wody jest zbyt niskie, wymień nową końcówkę douszną w przypadku zablokowania lub uszkodzenia; Lub wybierz silniejszy tryb w zależności od potrzeb.

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu