



Oxivir Plus Spray

Bezpieczna dezynfekcja,
lepsze mycie

Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie nadtlenu wodoru

Wysoka skuteczność dezynfekcyjna

Oxivir Plus Spray jest silnym dezynfektantem o pełnym spektrum działania łącznie ze sporami, którego działanie zostało udowodnione w badaniach z obciążeniem biologicznym. Jego opatentowana formuła oparta jest na innowacyjnej technologii nadtlenu wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide: Przyspieszony Nadtlenek Wodoru), która skutecznie niszczy między innymi takie patogeny alarmowe jak MRSA, Hepatitis C, Rotawirus, Norowirus, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger czy Clostridium difficile. Oxivir Plus Spray idealnie nadaje się do codziennego czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w środowisku szpitalnym, ale także do zadań specjalnych takich jak kontrolowanie ognisk zakażeń, inaktywacja zanieczyszczeń organicznych oraz usuwanie biofilmu.

Doskonałe właściwości myjące

Oxivir Plus Spray jest doskonałym, uniwersalnym preparatem myjąco-dezynfekującym do wszystkich twardych powierzchni, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. AHP składa się z nadtlenu wodoru, środków powierzchniowo czynnych oraz środków zwilżających. Składniki te ograniczają zawartość metali, zmiękcza wodę i jednocześnie redukuje napięcie powierzchniowe, przez co następuje efektywna penetracja zanieczyszczeń organicznych występujących na powierzchniach. Produkt posiada właściwości odkamieniające oraz nie pozostawia smug.

Bezpieczny dla powierzchni

Oxivir Plus Spray posiada potwierdzoną kompatybilność z powierzchniami, które odporne są na działanie wody i kwasów, min. takim jak akryl, plastik, ABS, plexiglas, stal nierdzewna, powłoka lakiernicza. Posiada certyfikat bezpieczeństwa WoolSafe, co oznacza, że produkt można nanosić także na tapicerkę czy wykładziny. Produkt nie odbija powierzchni, a jego składniki aktywne są biodegradowalne.

Bezpieczny dla ludzi

Oxivir Plus Spray jest bezpieczny dla użytkowników jak i osób przebywających w dezynfekowanych pomieszczeniach tj. personelu medycznego oraz pacjentów:

- ✓ nie zawiera lotnych związków organicznych
- ✓ nie zawiera substancji zapachowych i barwiących
- ✓ roztwory robocze nie podrażniają dróg oddechowych
- ✓ podczas pracy z roztworami roboczymi nie są wymagane środki ochrony indywidualnej w tym rękawice ochronne, gogle czy maseczka;

Redukuje negatywny wpływ na środowisko

W porównaniu do innych, powszechnie używanych dezynfektantów, Oxivir Plus Spray ma ograniczony wpływ na środowisko, ponieważ nadtlenek wodoru:

- ✓ rozpada się na tlen i wodę;
- ✓ nie odkłada się na powierzchniach, dzięki czemu nie dochodzi do narastania oporności bakterii;





Oxivir Plus Spray

Obszar zastosowania

- ✓ preparat do uniwersalnego zastosowania
- ✓ jest idealny do mycia i dezynfekcji takich powierzchni jak: inkubatory, fotele i stoły zabiegowe, stelaże łóżek, sprzęt rehabilitacyjny, leżanki, obudowa urządzeń medycznych, lampy operacyjne, blaty oraz wszystkich innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu;
- ✓ produkt można nanosić także na obicia materiałowe mebli tapicerowanych, wykładziny, dywany;
- ✓ preparat jest przeznaczony także do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, wydaliny, wydzieliny
- ✓ preparat nadaje się także do skutecznego usuwania biofilmu.

Sposób użycia

Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Z jednego opakowania można umyć i zdezynfekować ok. 100m² pow.

- ✓ Nanieść punktowo na powierzchnię przy pomocy końcówki spieniącej;
- ✓ Za pomocą suchej i czystej ściereczki lub ręcznika jednorazowego rozetrzeć piankę równomiernie po zdezynfekowanej powierzchni;
- ✓ Odczekać wymagany czas, nie wycierać, nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia;

Procedurę usuwania zanieczyszczeń biologicznych za pomocą preparatu Oxivir Plus Spray na Państwa prośbę dostarczy Przedstawiciel Diversey.

Certyfikaty i atesty

- Pozwolenie Urzędu Rejestracji PL, WM i PB na obrót produktem biobójczym nr 5157/13.
- Wyrób medyczny klasy IIa.
- Dla obszaru medycznego, produkt był testowany wyłącznie zgodnie z normą europejską EN 14885.

Skład preparatu

natlenek wodoru, kwas salicylowy, substancje powierzchniowo czynne

Skuteczność mikrobójcza

Norma EN	działanie	mikroorganizmy	czas kontaktu	warunki
EN14476	pełne wirusobójcze	poliowirus, adenowirus	5 min	brudne
EN13727	pełne bakterioobójcze	staphylococcus aureus, enterococcus hirae, pseudomonas aeruginosa, MRSA	5 min	brudne
EN13624	pełne grzybobójcze	candida albicans, aspergillus niger	15 min	brudne
EN 14348	prątkobójcze wobec prątków gruźlicy	mycobacterium terrae	15 min	czyste

Opakowania handlowe

Oxivir Plus Spray 6x750ml
Oxivir Plus 2x5L*

*Możliwość przygotowania roztworów uzupełniających z koncentratu za pomocą pomp dozujących D-QFM lub pompek typu pelikan. Więcej informacji o produkcie i stężeniach w karcie informacyjnej Oxivir Plus.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylicowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i pasz.

Wchodzi w reakcję z alkali. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczany.



Oxivir Plus Spray

Środki ostrożności

Wdychanie: w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt przez skórę: Myć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody, przez co najmniej 30 minut. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przez ponownym użyciem.

Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Połykanie: Wypłukać usta. Natychmiast wypić szklankę wody. Nie wywoływać wymiotów. Odczekać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Oxivir Plus, ubocznych skutków stosowania zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem, znajdują się w karcie charakterystyki.