

**PŘÍRODA MŮŽE NABÍDNOUT ÚTĚCHU V TĚŽKÝCH DNECH.
ZKUSTE PRIESSNITZOVY ZÁBALY A OBJEVTE, CO MOHOU
UDĚLAT PRO VÁŠ JE TO POKLAD VE VAŠÍ LÉKÁRNIČCE.**

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.
Výrobek je chráněn patentním úřadem. Jeho výroba je protizákonná.



UNI ZÁBAL NA KRK **pro děti**

doporučujeme pro děti od tří let



bolest v krku



bolest hlavy a uší



bolesti zubů

- **Priessnitzův (mokrý zapařovací) zábál:**
- ulevuje při běžném bolení a škrábání v krku
- napomáhá při nachlazení, kašli nebo angíně
- tlumí zánět jícnu a nosních dutin
- pomáhá při laryngitidě
- ulevuje při bolestivém kašli
- **Suchý - teplý zábál:** ulevuje při bolesti krční páteře



Návod na použití Priessnitzova zábalu:

Priessnitzův zábál je krátkodobě studený obklad, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle.

Vnitřní vyjímatelný bavlněný díl zábalového pásu namočte do studené vody (u dětí volíme méně studenou vodu). Dobře vyždímaný bavlněný díl vložte do zábalového pásu podvlečením pod pásky. Přiložte na krk a upevněte suchým zipem, aby zábál co nejlépe přilnul k tělu a mohl být jeho účinek co největší. Zábál aplikujte vždy přímo na pokožku. V případě rýmy či kašle lze vnitřní kapsu uvnitř zábalu využít k vložení nadrobno nakrájené cibule, která svými antiseptickými účinky urychlí samotnou léčbu a uvolní ucpaný nos.

Priessnitzův zábál nenechávejte působit přes noc!! Zábál se také nesmí přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém, a tak podobně. V případě aplikace zábalu u malých dětí je lépe se nejprve poradit s lékařem.

Suchý - teplý zábál je možný použít jako zábál samotný, ale pro zvýšení účinku tepla můžete vnitřní bavlněný díl zahřát např. žehlením. Naše doporučení je použití hřejivých polštářků.

Délka použití zábalu: Zábál nechte působit 20 - 60 minut, opakujte do odeznění potíží, případně se poraďte se svým lékařem.

www.priessnitzuvzabal.cz

Výrobá: BOK&LK s.r.o. IČ: 28731417 DIČ: CZ 28731417 Čsl. Armády 42, Kadaň

PRIESSNITZOVY ZÁBALY PRO CELOU RODINU.

POKLAD VE VAŠÍ LÉKÁRNIČCE.



Před použitím výrobku čtete pozorně příbalový leták.
Výrobek je chráněn patentním úřadem. Jeho výroba je protizákonná.

Při používání dbejte těchto zásad:

- ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci
- teplota praní nesmí překročit 40 °C
- chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat
- při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace
- Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše víceúčelové zábalové produkty jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se svým třívrstevným složením (1, 2, 3), kdy svrchní vrstvu (1) tvoří vlastní zábal ze 100% bavlny a protialergického rouna, spodní vrstvu (3) tvoří odnímatelná vložka z tenkého savého materiálu, a mezi spodní vrstvou (3) a vrchní vrstvou (1) je uložena střední vrstva (2) nepropustná část pásu, která zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.

Naše výrobky jsou vhodné i pro děti mladší 3 let. Tento výrobek vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek. Důležitá je pro nás kvalita. Každý výrobek je originál. K výrobě zábalových pásů jsou pouze použity kvalitní materiály české výroby.

SLOŽENÍ: vnější vrstva - 100% bavlna, jádro : 50 % polyester, 25% bavlna, 25% polyuretan, vnitřní vrstva: 100% bavlna. Upínání: pásky se suchým zipem.



Naše cesta
pro vaše zdraví



Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu naleznete na našem E - shopu:

www.priessnitzuvzabal.cz

Výroba: BOK&LK s.r.o. IČ: 28731417 DIČ: CZ 28731417 Čsl. Armády 42, Kadaň