

INSTRUKCJA UŻYWANIA BALKONIK RF-131

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z balkonika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy	RF-131			
Nr modelu	RF-131/S	RF-131/BR	RF-131/N	RF-131/CZA
Wysokość	77-95 cm / 79-97 cm	77-95 cm / 79-97 cm	77-95 cm / 79-97 cm	77-95 cm / 79-97 cm
Całkowita szerokość (bez kół / z kołami)	57 cm / 60 cm	57 cm / 60 cm	57 cm / 60 cm	57 cm / 60 cm
Całkowita długość (bez kół / z kołami)	46 cm / 49 cm	46 cm / 49 cm	46 cm / 49 cm	46 cm / 49 cm
Średnica przednich kół (bez kół / z kołami)	Nie dotyczy / 5 cal	Nie dotyczy / 5 cal	Nie dotyczy / 5 cal	Nie dotyczy / 5 cal
Max. bezpieczne obciążenie (bez kół / z kołami)	100 kg / 100 kg	100 kg / 700 kg	100 kg / 100 kg	700 kg / 100 kg
Waga (bez kół / z kołami)	2,4 kg / 2,75 kg	2,4 kg / 2,75 kg	2,4 kg / 2,75 kg	2,4 kg / 2,75 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Uchwyty	pianka
Koła	PVC (polichlorek winylu)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)
Przycisk blokujący	Stal

ELEMENTY BALKONIKA

Elementy balkonika są przedstawione na rys. nr 1.

KOLOR

Balkonik jest dostępny w kolorze niebieskim, szarym, brązowym i czarnym



III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Balkonik przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji.

Może być używany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka chodzeniu, korzystaniu z toalety, na spacerze.

Balkonik pomaga w utrzymaniu stabilności podczas poruszania się i pozwala na stałą podporę użytkownikowi. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom może pełnić funkcję balkonika: kroczącego, przestawnego lub z przednimi kołami.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na balkoniku, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed użyciem balkonika każdorazowo sprawdzić czy:
 - balkonik ustawiony jest na prawidłową wysokość;
 - mechanizm blokujący i przyciski do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone;
 - wszystkie stopki balkonika są ustawione na taką samą wysokość;
 - nasadki na stopkach nie są zużyte – jeżeli tak to wymień je.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
3. Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie przechowywać balkonika w temperaturze poniżej 0°C.
6. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego używania może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu wyboru odpowiedniego balkonika i akcesoriów oraz sposobu korzystania, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



UWAGA! Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.



UWAGA! Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmuje rama balkonika.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA


SKŁADANIE I ROZKŁADANIE BALKONIKA

Aby rozłożyć:

1. Postaw balkonik przed sobą opierając go na przednich stopkach.
2. Odchyl obie boczne ramy balkonika do momentu zablokowania się przycisku C-clip na środku ramy poprzecznej (rys. 1).

Aby złożyć:

1. Wciśnij przycisk znajdujący się pośrodku ramy poprzecznej (rys. 1). Spowoduje to zwolnienie blokady.
2. Trzymając wciśnij przycisk złóż obie ramy boczne do środka.

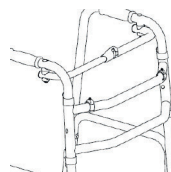

Rys. 1

USTAWIENIE ODPOWIEDNIEJ FUNKCJI PRZESTAWNA

Aby ustawić balkonik na funkcję przestawną ustaw przycisk blokujący na dolnym otworze na ramie bocznej (rys. 3).


MOBILNA

Aby ustawić balkonik na funkcję mobilną załóż kółka w miejsce przednich stoppek (rys. 4):


- Naciśnij przycisk zabezpieczający c-clip, obróć delikatnie stopkę i ścignij ją z ramy balkonika.
- Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce z kółkiem, nasuń stopkę na ramę balkonika, tak aby przycisk blokujący wskoczył w otwór.
- Wyreguluj odpowiednią dla Ciebie wysokość (patrz regulacja wysokości).

REGULACJA WYSOKOŚCI


- Wciśnij przycisk zabezpieczający (rys. 5) na stopce i obróć ją delikatnie.
- Wyreguluj stopkę na odpowiednią wysokość.
- Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
- Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

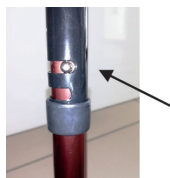


Rys. 2

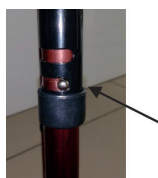

Rys. 3

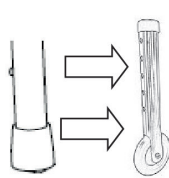

Rys. 4

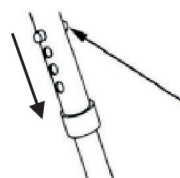

Rys. 5

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość; otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone,
 - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić; żadne inne części balkonika nie są poluzowane lub uszkodzone.
- Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA! Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.



UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności sprzętu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli balkonika zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja – należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania balkonika to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Numer modelu		Góra, nie przewracać
	Data produkcji		Chronić przed wilgocią
	Zajrzyj do instrukcji używania		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Wyrób medyczny		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03–310 Warszawa, Polska (Poland)
email:info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

