

Wyrób medyczny: Orteza stawu kolanowego**/skokowego/stopy****Wersja: Stabilizator stawu skokowego (MEK 9009)
(ze stawkami bocznymi i dodatkowymi taśmami)****1.Opis:**

- Stabilizator wykonany jest z odpornych na zużycie, oddychających materiałów.
- Wyposażony w usztywnienia boczne.
- Konstrukcja wyrobu jest wyposażona w sznurowanie, które umożliwia stosowanie go w przypadku obrzęku.
- Elastyczne pasy zapewniają dodatkowe mocowanie stawu.
- Wygodny w codziennym użytkowaniu, można go nosić z każdym rodzajem obuwia.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 4 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

2.Funkcje:

- Zapewnia średniego stopnia usztywnienie i kompresję stawu skokowego.
- Wzmacnia i stabilizuje aparat więzadłowy stawu skokowego.
- Ogranicza pronację i supinację bez zakłócania ruchów w płaszczyźnie strzałkowej stawu skokowego.
- Zmniejsza obrzęki, ból.

3.Wskazania do stosowania:

- Uszkodzenie więzadeł stawu skokowego.
- Rehabilitacja po urazach, operacjach i unieruchomieniu gipsowym.

- Niestabilność stawu skokowego.
- Choroby zapalne stawu skokowego (artroza, zapalenie stawów, zapalenie błony maziowej).
- Zapobieganie kontuzjom stawu skokowego podczas uprawiania sportu i intensywnej aktywności fizycznej.

4.Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału, z którego jest wykonany produkt.
- Obecność owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zmian zapalnych skóry w miejscu stosowania stabilizatora.

5. Instrukcja obsługi:

Rozmiar ustala się drogą mierzenia obwodu stawu skokowego i dobiera się zgodnie z tabelą.

S	obwód stawu skokowego	20-23 cm
M		23-26 cm
L		26-29 cm
XL		29-32 cm

1. Włóż stabilizator bezpośrednio na ciało lub bawełnianą skarpetę.
2. Zaciśnij i dopasuj ortezę sznurowadłami pociągając zakładki z zapięciem na rzep mocowane po bocznej i przysiódkowej stronie ortezi.
3. Owiń pasek przysiódkowy(wewnętrzny) na grzbiecie stopy, a następnie pod piętą przeciągnij go ponownie na stronę przysiódkową (wewnętrzną) i pociągając pionowo do góry, w naprężeniu przymocuj go rzepem po stronie przysiódkowej (wewnętrznej) ortezi.
4. Owiń pasek boczny(zewnętrzny) na grzbiecie stopy, a następnie pod piętą przeciągnij go ponownie na stronę boczną (zewnętrzną) i pociągając pionowo do góry, w naprężeniu przymocuj go rzepem po stronie bocznej (zewnętrznej) ortezi.

5. W naprężeniu owiń poziomo na górnej części ortezi szeroki pas stabilizujący i przymocuj go rzepem.

6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Przed praniem zapiąć wszystkie zapięcia.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.



- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Kolor: czarny

Data wydania instrukcji używania: 01.2023; wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



9009



Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Stabilizator stawu skokowego (MEK 9009)

