

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kula łokciowa składana


Kod Produktu: **CompactTim**



1. Wykonanie

Kula łokciowa składana posiada wygodny, wytrzymały uchwyt oraz aluminiowy trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwości składania jest bardzo wygodna w codziennym użytkowaniu. Kula posiada ergonomiczny kształt obejmujący oraz prawidłowo dobrany kąt łokciowy, co zapewnia optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt.

- a. obejm
- b. uchwyt
- c. miejsce składania
- d. regulacja długości
(pin blokujący)
- e. blokada regulacyjna
- f. gumowa nasadka

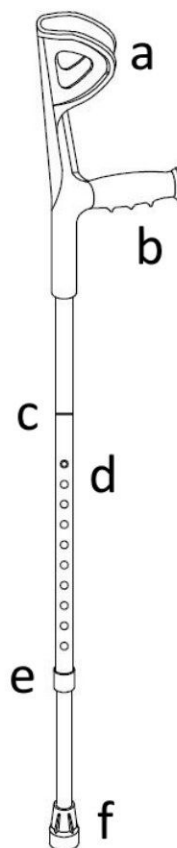

2. Zastosowanie

Kula łokciowa jest sprzętem pomocniczym, służącym do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest u osób wymagających asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po

przebyłym urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Przeciwwskazania: Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na kuli.

3. Montaż i regulacja

- W celu ułatwienia transportu, kula posiada funkcję składania. Przed regulacją długości, kulę należy rozłożyć nakładając na siebie obie części trzonu.
- Aby móc wyregulować długość kuli należy odkręcić blokadę regulacyjną.
- Wcisnąć pin blokujący i wybrać odpowiednią pozycję wewnętrznej rurki. Po ustawieniu ponownie zablokować położenie rurek względem siebie przy pomocy pinu blokującego. Kula jest regulowana skokowo co 2,5 cm.
- Po zakończeniu regulacji długości, należy zakręcić blokadę regulacyjną kuli.
- Długość kul dobiera się w pozycji stojącej z kończyną górną zgiętą w stawie łokciowym pod kątem 20°.
- Kula łokciowa powinna być indywidualnie dostosowana do użytkownika w taki sposób, aby uchwyt kuli znajdował się na wysokości stawu biodrowego, a obejma w górnej części przedramienia.
- Przed użyciem należy sprawdzić właściwe ułożenie pinu blokującego i upewnić się, że kula jest stabilna.
- Zaleca się używanie dwóch kul jednocześnie.

UWAGA! W razie wątpliwości co do sposobu/techniki poruszania się o kulach, należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

4. Specyfikacja techniczna

Trzon: aluminiowy

Regulacja wysokości: 94-116 cm

Wysokość od podłoża do uchwytu: 70-92 cm

Maksymalne obciążenie: 136 kg

Waga kuli: 0,60 kg

Kolor: czarny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Kulę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem trzonu, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą gwarancji).
- Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



10/2023(I)