

Karta produktowa- masażer wibracyjny

evolve izra

Warunki Bezpiecznego Użytkowania Pistoletu Masującego

Aby zapewnić skuteczność oraz bezpieczeństwo podczas korzystania z pistoletu masującego, należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Przed użyciem

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta.
- Upewnij się, że urządzenie jest w dobrym stanie technicznym i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Sprawdź, czy pistolet masujący jest odpowiednio naładowany.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli cierpisz na schorzenia takie jak:
 - ✓ Choroby układu krążenia,
 - ✓ Osteoporoza,
 - ✓ Problemy neurologiczne,
 - ✓ Cięża,
 - ✓ Choroby skóry w miejscach aplikacji.

2. Podczas użytkowania

- Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zaczynaj od najniższego ustawienia intensywności, stopniowo dostosowując je do swoich potrzeb.
- Używaj pistoletu masującego na suchą, czystą skórę lub przez cienką warstwę ubrania.
- Nie używaj bez przerwy przez dłużej niż godzinę. Należy odczekać 30 min. przed ponownym użyciem
- Unikaj stosowania na:
 - ✓ - Kościach (np. kręgosłupie, łokciach, kolanach),
 - ✓ - Miejscach z otwartymi ranami, siniakami lub stanem zapalnym,
 - ✓ - Obszarach o obniżonej wrażliwości (np. w przypadku neuropatii).
 - ✓ - Nie stosuj urządzenia w jednym miejscu przez dłużej niż 1-2 minuty, aby uniknąć podrażnień.
 - ✓ - Unikaj nacisku zbyt dużą siłą na tkanki miękkie.

3. Po użyciu

- Wyłącz urządzenie.
- Przetrzyj urządzenie suchą lub lekko wilgotną ściereczką, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Ładuj urządzenie wyłącznie oryginalnym zasilaczem

4. Przeciwwskazania do użycia

Nie używaj masażera bez zgody lekarza, jeśli:

- Jesteś po niedawnej operacji, w szczególności w miejscach masowanych,
- Masz wszczepione urządzenia medyczne (np. rozrusznik serca),
- Masz skłonność do zakrzepicy lub krwawień,
- Masz gorączkę lub infekcję ogólnoustrojową
- Jesteś w ciąży
- Cierpisz na przepuklinę dysku, kręgoszynek

5. Uwagi dodatkowe

- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
- W przypadku odczuwania bólu, zawrotów głowy lub innych niepokojących objawów natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie

Przestrzeganie powyższych zasad pomoże Ci cieszyć się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem pistoletu masującego.

SPECYFIKACJA

1. Pojemność Baterii: 4800 mAh
2. Ładowarka DC: 16,8V / 1A
3. Ilość nasadek masujących: 8
4. Ilość poziomów prędkości: 7
5. Zakres poziomów prędkości: 1300–3200 rpm
6. Wyświetlacz: LCD
8. Wymiary: 2360x166x75 mm
9. Waga produktu: 0,98 kg
10. Waga całkowita: 1,92 kg

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Czyścić lekko wilgotnym ręcznikiem, wytrzeć do sucha miękką szmatką. Nie używać alkoholu lub
2. środków zawierających alkohol do czyszczenia.
3. Nasadki należy zakładać gdy urządzenie jest wyłączone, wciskając mocno aż do mocnego osadzenia elementu.
4. Nie wkładać urządzenia do wody.
5. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.



Niniejsze urządzenie, Masażer model Evolve Izra jest zgodne z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/EU.

Producent: Berdo Sp. z o.o.

Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 30A/4, 35-328, Rzeszów, POLSKA

Wyprodukowano w Chinach