

Wyrób medyczny: Orteza stawu barkowego/ łokciowego/nadgarstka
Wersja: Stabilizator stawu nadgarstkowego (MEK 6001)

1. Opis:

- Stabilizator wykonany jest z nowoczesnej elastycznej, oddychającej tkaniny, która zapewnia higroskopijność, niezawodną mikro-cyrkulację powietrza.
- Wszechstronność konstrukcji pozwala na regulację pokrycia stawu nadgarstkowego, odpowiednie zarówno dla prawej, jak i lewej ręki.
- Może być używany podczas uprawiania sportu.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

2. Funkcje:

- Zapewnia łatwe mocowanie i kompresję stawu nadgarstkowego.
- Stabilizuje i odciąża aparat torebkowo-więzadłowy stawu nadgarstkowego.
- Zmniejsza ból.

3. Wskazania do stosowania:

- Uszkodzenie aparatu więzadłowego stawu promieniowo-nadgarstkowego, stawów

IFU_6001_v1
Instrukcja używania

nadgarstka i pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego.

- Okres rehabilitacji po kontuzjach, operacjach i unieruchomieniu gipsowym.
- Zespół cieśni nadgarstka.
- Zapobieganie kontuzjom stawu nadgarstkowego podczas uprawiania sportu i intensywnej aktywności fizycznej.

4. Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.
- Obecność owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zmian zapalnych skóry w miejscu stosowania.

5. Instrukcja obsługi:

1. Umieść pętlę na kciuku.
2. Owiń element stabilizujący z tyłu dłoni.
3. Dostosuj stopień napięcia i ucisku stabilizatora na nadgarstek.
4. Zapnij na nadgarstku i zabezpiecz rzepem.

6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Zabezpiecz wszystkie zapięcia przed praniem.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

IFU_6001_v1

Instrukcja używania

7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- WW przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.



- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Kolor: beżowy

Rozmiar: uniwersalny.

Data wydania instrukcji używania: 10.2021;
wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



6001



IFU_6001_v1
Instrukcja używania

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Stabilizator stawu nadgarstkowego (MEK 6001)

