

INTRASITE° GEL

Hydrożelowy opatrunek o zawartości wody 78% w/w

Opis

Opatrunek hydrożelowy INTRASITE° GEL to przezroczysty bezpostaciowy hydrożel zawierający modyfikowany polimer karboksymetylocelulozy, glikol propylenowy o zawartości wody 78% w/w. Jest on dostępny w opakowaniu z pojedynczą dawką, co ułatwia jego stosowanie.

Sposób działania

Opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL wspomaga łagodne oczyszczenie rany w wyniku autolizy poprzez ponowne nawilżenie tkanki martwiczej. Opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL zapewnia wilgotne środowisko rany i nie przylega do rany.

Wskazania

Opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL jest wskazany do usuwania niezdolnych do życia tkanek z płytkich, z osłabioną tkanką pod raną i głębokich ran (np. odleżyn, owrzodzeń nóg, owrzodzeń w stopie cukrzycowej, ran nowotworowych, drobnych oparzeń, ran chirurgicznych, oparzeń, ran szarpanych, otarć i owrzodzeń grzybiczych). Jest on również przeznaczony do leczenia ran zagłębionych z ziarninowaniem i urazów popromiennych.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku stwierdzonej wrażliwości na opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL lub którykolwiek z jego składników.

Docelowi użytkownicy

Opatrunki przeznaczone są wyłącznie do stosowania przez pracowników służby zdrowia.

Środki ostrożności

Upewnić się, że pozostały żel został usunięty przed radioterapią. Jeśli pojawią się oznaki podrażnienia lub nadwrażliwości, przerwać stosowanie. Opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL należy stosować ostrożnie w okolicach oczu oraz w głębokich ranach z wąskimi otworami (np. przetoki i rany ubytkowe). Opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. RYZYKO ZADŁAWIENIA – osłonę ochronną i odłamywaną końcówkę należy usuwać ostrożnie. Unikać połknięcia. Unikać stosowania na pękniętych sutkach. Opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL służy do jednorazowego użytku i nie należy go używać ponownie, ponieważ może dojść do zakażenia krzyżowego lub infekcji i opatrunek może okazać się nieskuteczny. Otwarcie dozownika APPLIPAK° narusza sterylną barierę i dlatego nie wolno przechowywać niewykorzystanego żelu do późniejszego użycia.

Instrukcja używania

W przypadku użycia opatrunku hydrożelowego INTRASITE GEL na zainfekowanych ranach należy zastosować się do lokalnego protokołu klinicznego.

1. Przygotować miejsce rany:

Usunąć zewnętrzny opatrunek. Przepłukać ranę sterylnym roztworem soli fizjologicznej, aby oczyścić miejsce rany.

2. Przygotować opakowanie:

Zdjąć wieczko ochronne z dyszy. Przetrzeć odłamaną końcówkę dyszy i końcówkę opakowania odpowiednim wacikiem antyseptycznym. Odłamać oznaczoną końcówkę dyszy.

3. Wprowadzić opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL do rany:

Trzymając końcówkę dyszy z dala od powierzchni rany, delikatnie nacisnąć pojemnik opakowania, aby dozować żel do rany, unikając rozlewania go na otaczającą skórę. Rozprowadzić opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL na powierzchni rany do głębokości około 5 mm. Wyrzucić niewykorzystany żel.

4. Założyć opatrunek na ranę:

Zakryć zewnętrznym opatrunkiem, takim jak np.: Opatrunek z folii przezroczystej OPSITE° FLEXIGRID°, hydrokomórkowe opatrunki na rany ALLEVYN°, nieprzywierający opatrunek chłonny MELOLIN°.

Po użyciu zutylizować zgodnie z lokalnymi protokołami klinicznymi lub wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

Częstość zmian

W przypadku ran z tkanką martwiczą i z martwicą rozpułzną zaleca się zmianę opatrunku żelowego co najmniej co trzy dni. Na czystych ranach z procesem ziarninowania częstotliwość zmian opatrunku żelowego zależy od stanu klinicznego rany i ilości wytwarzanego wysięku.

Usuwanie opatrunku

Opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL można usunąć z rany poprzez przepłukanie jej sterylnym roztworem soli fizjologicznej. Jeśli opatrunek hydrożelowy INTRASITE GEL stanie się trudny do usunięcia, namoczyć obszar jałową wodą lub roztworem soli fizjologicznej, aby ułatwić usunięcie.

Jeśli podczas używania tego wyrobu dojdzie do poważnego incydentu, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi. complaints@smith-nephew.com

Dostępność produktu

Kod	Rozmiar
7308	8 g
7311	15 g
7313	25 g
66800241	25 g

Dostępność

Kartonik zawiera 10 sztuk
Kartonik zawiera 10 sztuk
Kartonik zawiera 10 sztuk
Kartonik zawiera 3 sztuki

°Znaki towarowe firmy Smith & Nephew. ©Smith & Nephew

Data wydania 08/2022. Rewizja 01

Ten produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem amerykańskim. www.smith-nephew.com/patents