



Sissel® DorsaBack-Car

Specjalnie wyprofilowane, przenośne siedzisko (podpórka korekcyjna z wkładem drewnianym) zostało zaprojektowane tak, aby stanowiło właściwe podparcie na całej długości pleców podczas jazdy samochodem. Drewniany wkład gwarantuje dodatkową stabilność, a miła w dotyku i miękka poszewka zapewnia komfort użytkowania.

Instrukcja użytkowania

Gratulujemy zakupu produktu marki SISSEL®.

Przestrzeganie naszych zaleceń oraz instrukcji zagwarantuje Państwu pełną satysfakcję z zakupu i radość z korzystania z niego każdego dnia.

Wskazania

- bóle pleców (w odcinku lędźwiowym, piersiowym i szyjnym)
- bóle głowy spowodowane wadami postawy
- zapobieganie bólom pleców i kręgosłupa wywołanych długotrwałym siedzeniem
- dyskopatia

Mocowanie

Siedzisko należy zamocować do oparcia siedzenia za pomocą regulowanych pasów. Po jego zamocowaniu może zająć potrzeba ponownej regulacji pozycji fotela. Ułożenie siedziska nie powinno w żaden sposób wpływać na swobodne kierowanie pojazdem.

UWAGA! Nie należy używać siedziska w samochodach wyposażonych w boczne poduszki powietrzne.

Nasze produkty

Nasze produkty zostały stworzone z wysokiej jakości materiałów. Aby jak najdłużej zachować ich właściwości, należy z nimi postępować w odpowiedni sposób.

Zalecamy delikatne zsuwanie pokrowca, bez użycia siły oraz przytrzymywanie całego siedziska, a nie tylko jednego z jego końców podczas zdejmowania pokrowca.

Czyszczenie

Po zdjęciu pokrowiec można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnych środków piorących. Pokrowiec nie może być prany!

UWAGA! Należy chronić drewniany wkład przed kontaktem z wilgocią podczas czyszczenia lub przechowywania.

WWW.SISSEL.COM.PL