

VÍCEÚČELOVÉ ZÁBALOVÉ RUKAVICE

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.

Napomáhá při:

- otoku – bodnutí hmyzem
- revmatických potíží a edémech
- lázeňské a kosmetické procedury



Priessnitzův zábal je krátkodobě studený zábal, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle. Neměl by se přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém apod.

Priessnitzův zábal je léty ověřený a osvědčený přírodní postup, který využívaly naši předkové od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Priessnitzův zábal je ověřenou procedurou, která napomáhá ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím k urychlení hojivých procesů v těle a postupné úlevě od nepříjemných pocitů. Jedná se o studený zapařovací zábal.

Použití Priessnitzova zábalu na klouby při revmatických obtížích a k relaxaci

- vnitřní část zábalové rukavice ponořte do studené vody nebo do příznivě působící lázně
- vložte namočenou část do zábalové rukavice
- navlékněte zábalovou rukavici spolu s vnitřním dílem na ruku a upevněte suchým zipem

Zábal nechte působit maximálně 60 minut, případně se poraďte se svým lékařem. Další zábal je možné aplikovat nejdříve po 3 hodinách. V případě použití u malých dětí je třeba se o použití studeného zábalu nejprve poradit s pediatrem.

Použití Priessnitzova zábalu při lázeňských a kosmetických procedurách

Zábalové rukavice lze použít při lázeňských a kosmetických procedurách, jako je např. parafín, medové či čokoládové zábaly apod. Vnitřní díl zábalové rukavice je možné využít také jako napuštěný přírodními léčivy.

VÝROBCE:

BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, Kadaň

IČ: 28731417, DIČ: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz

PRODEJCE:

Obchodní

zástupce

tel.: 725 961 975

e-mail: objednavkybok@seznam.cz

Priessnitzovy víceúčelové zábalové pásy pro děti a dospělé

Při používání dbejte těchto zásad:

- ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci
- teplota praní nesmí překročit 40 °C
- chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat
- při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace

Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše víceúčelové zábalové produkty jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se svým třívrstevným složením (1, 2, 3), kdy svrchní vrstvu (1) tvoří vlastní zábal ze 100% bavlny a protialergického rouna, spodní vrstvu (3) tvoří odnímatelná vložka z tenkého savého materiálu, a mezi spodní vrstvou (3) a vrchní vrstvou (1) je uložena střední vrstva (2) nepropustná část pásu, která zajišťuje neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.

Naše výrobky jsou vhodné i pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

Důležité je pro nás KVALITA a proto jsou výrobky ručně šity v naší provozovně. K výrobě zábalových pásů jsou použity pouze kvalitní materiály české výroby.

Jedná se o ruční výrobu, která v závěru podtrhuje originalitu a jedinečnost našich výrobků.

Složení:

Vnější vrstva: 100% bavlna

Jádro: 50% polyester, 25% bavlna, 25% polyuretan

Vnitřní vrstva: 100% bavlna

Upínání: pásky se suchým zipem



Výrobce: BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, Kadaň

IČ: 28731417, DIČ: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz



Facebook: Priessnitzův zábal



Instagram: priessnitzuv_zabal