

Wyrób medyczny: Temblak do podnoszenia ramienia

Wersja: Temblak (MEK 5002)

- Opis:**
- Temblak wykonany jest z nowoczesnej elastycznej, oddychającej tkaniny.
- Materiał przepuszcza powietrze i wilgoć.
- Posiada pętlę na kciuk dla wygodniejszego użytkowania temblaka.
- Dostępne dodatkowe wyścielane mankiety.
- Wszechstronność konstrukcji pozwala na noszenie temblaka dla prawej i lewej ręki.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 5 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

Funkcje:

- Delikatnie przytwierdza ramię do tułowia i podtrzymuje przedramię w pozycji zgięcia 90°.
- Odciąża aparat mięśniowo-więzadłowy i stawy kończyny górnej.
- Zmniejsza ból i obrzęk dłoni.

Wskazania do stosowania:

- Rehabilitacja po kontuzjach, sztywnym unieruchomieniu i operacjach stawu barkowego, łopatki, obojczyka i stawu łokciowego.
- Ostre i przewlekłe choroby stawu barkowego i kończyny górnej (zapalenie stawów, artroza,

IFU_5002_v1

zapalenie splotu, zapalenie ścięgna, zespół Sudecka).

- Niedowład, porażenie i atrofia mięśni kończyny górnej.
- Wsparcie dla unieruchomienia gipsowego barku i przedramienia.
- Pierwsza pomoc przy stabilizacji uszkodzonej ręki.

Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.
- Obecność owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zmian zapalnych skóry w miejscu stosowania.

Instrukcja obsługi:

W celu określenia rozmiaru należy zmierzyć długość przedramienia (od wyrostka łokciowego do podstawy małego palca) i wybrać rozmiar z tabeli rozmiarów.

XS		20-24 cm
S	długość przedramienia od	25-29 cm
M	wyrostka łokciowego do	30-34 cm
L	podstawy 5-go palca dłoni	35-39 cm
XL		40-44 cm

- Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru zakładamy temblak na przedramię.
- Wyreguluj długość górnego paska tak, aby kąt przedramienia i barku wynosił 90 stopni.
- Umieść miękki mankiet paska na ramieniu, aby zmniejszyć nacisk.

Porady dotyczące pielęgnacji:

- Zabezpiecz wszystkie zapięcia przed praniem.
- Zalecane pranie ręczne w temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem detergentów do delikatnych tkanin.

IFU_5002_v1

- Po wypraniu nie wykręcać, suszyć w stanie spłaszczonym z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie prasować.

Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
 - W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
 - Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.



Kolor: czarny.

Data wydania instrukcji używania: 10.2021;
wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



5002

IFU_5002_v1

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Temblak (MEK 5002)

