



RENA Spółdzielnia


Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Poduszka do wózka inwalidzkiego

PODUSZKA

PRZECIWODLEŻYNOWA PIANKOWA DO WÓZKA INWALIDZKIEGO

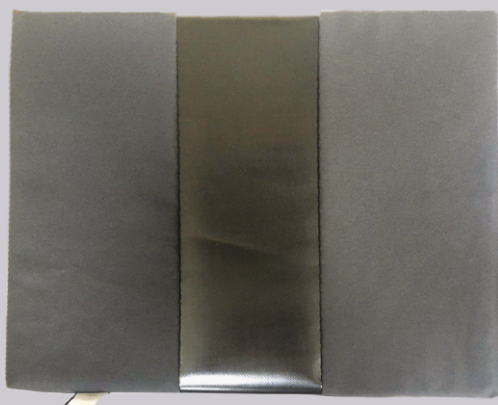

ROZMIAR				
Długość w cm	40	40	40	40
Szerokość w cm	41	43	46	51
Wysokość w cm	5	5	5	5

Numer kat. REF 125

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Poduszka przeciwodleżynowa piankowa stosowana jest jako wyposażenie do wózka inwalidzkiego. Zastosowanie sprężystej pianki poliuretanowej przyczynia się do automatycznego, pełno kontaktowego dopasowania się do indywidualnego pacjenta oraz równomiernego rozkładu ciężaru ciała. Użycie pianki o odpowiedniej budowie i sprężystości zapobiega trwałemu zniekształceniu poduszki, każdorazowo wracając do pierwotnych wymiarów po użyciu, co daje niezmienny komfort pacjenta. Zastosowanie specjalnej wkładki antypoślizgowej w budowie pokrowca, zapewnia stabilną lokalizację poduszki w siedzisku wózka, uniemożliwiając jej niekontrolowane sunięcie się z wózka. Podstawowymi zaletami poduszki, które decydują o skuteczności jej działania jest bardzo duża przepuszczalność gazów, samoczynne działanie i poprawa komfortu osoby siedzącej na wózku.

Przeciwwskazania: Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą oraz w przypadku reakcji alergicznych skóry.

Użytkowanie: Poduszka jest estetycznym, łatwym w użyciu i obsłudze wyrobem do stosowania jako podkład do wózka inwalidzkiego. Wyrób można używać bez ograniczeń czasowych. Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić poduszkę czy nie ma uszkodzeń mechanicznych (popękana pianka, poprute szwy, poprzecierana tkanina pokrowca). Niedopuszczalny jest kontakt poduszki z agresywnymi rozpuszczalnikami, a także wystawianie na oddziaływanie temperatury powyżej 75°C.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Pokrowiec po wyjęciu wkładu, prać ręcznie w ogólnodostępnych łagodnych środkach piorących. Nie prać mechanicznie. Nie prać chemicznie, nie chlorować. Dokładnie wypłukać. Nie wirować, nie wykręcać, wycisnąć i zostawić do samoistnego wysuszenia – nie suszyć przy ogniu, na piecu, na kaloryferze, itp. Nie prasować. Wietrzyć w suche dni.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu. Długotrwałe oddziaływanie światła słonecznego i intensywne oświetlenie mogą spowodować odbarwienie (żółknięcie) pianki, z której wykonany jest wkład.



UWAGI:

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Nie dopuścić do nadmiernego zabrudzenia. Unikać styczności z olejami oraz innymi agresywnymi środkami i oparami chemicznymi, ponieważ mogą one zniszczyć wkład z pianki jak i pokrowiec ze specjalnej dzianiny. Niedopuszczalne są samowolne przeróbki. W przypadku uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeżeli występują działania niepożądane np. alergia, ból - skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacja wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia materiału, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT

40



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3