



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Materace szpitalne

MATERAC

SZPITALNY

W POKROWCU BAWELNIANYM



ROZMIARY			
Długość w cm	200	200	200
Szerokość w cm	90	90	90
Wysokość w cm	10	12	15

Numer kat. REF 122

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Stanowi wyposażenie łóżka szpitalnego. Zastosowanie sprężystej pianki poliuretanowej przyczynia się do równomiernego i pełno kontaktowego podparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa i dodatkowo oddziałuje na spoczynkową regulację napięcia mięśniowego. Pokrowiec wykonany z dzianiny bawełnianej, zamykany na suwak, czyni go łatwiejszym w utrzymaniu czystości. Materac należy ułożyć na łóżku i nakryć go prześcieradłem.

Przeciwwskazania: Zaleca się unikać tworzyw sztucznych w bieliźnie pościelowej i osobistej.

Użytkowanie: Materace są, łatwym w użyciu i obsłudze wyrobem do stosowania jako wyposażenie do łóżka. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Pokrowiec po wyjęciu wkładu piankowego, prać ręcznie w delikatnym środku piorącym w temperaturze ok. 40°C, dobrze wypłukać. W żadnym wypadku nie można suszyć pokrowca przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie pokrowca. Nie prać mechanicznie. Nie prać chemicznie, nie chlorować. Często wietrzyć w słoneczne dni. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu. Długotrwałe oddziaływanie światła słonecznego i intensywne oświetlanie może spowodować odbarwienie (żółknięcie) pianki, z której wykonany jest wkład.



UWAGI:

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT

40



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3