



Rękawice nitrylowe, bez pudrowe

Art. Nr 290481-290485

Classic

Rękawice nitrylowe, Bez pudrowe, czarne



Opis

Rękawice nitrylowe diagnostyczne (Guma Nitrylowo Butadienowa)

Bez pudrowe

Niesterylne

Chlorowane od wewnątrz

Czarne

Mikro-teksturowane końce palców

Rolowane mankiety

Do stosowania w przemyśle spożywczym

Wyprodukowano dla Abena A/S, Dania, w Malezji zgodnie z ISO 9001 i ISO 13485

CE

Podwójne oznakowanie CE-zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz dyrektywą PPE Środki Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC

Klasa I oraz Kat. III

AQL 1.5 w odniesieniu do norm zharmonizowanych z normami EN 455-1

Normy

EN 455-1, 2, 3 i 4

EN374-1 (z wyłączeniem klauzuli 5.3)

EN 374-2

EN 374-3(metoda badania na przenikanie substancji chemicznych przedstawiona poniżej w karcie)

EN 388 (0,0,0,0)

EN 420

Grubość

Dłoń 0.05 mm (+/- 0.02)

Palce 0.08 mm (+/- 0.02)

Średnia waga 3,20 gr. (+/- 0,2)

Przechowywanie i obsługa



Rękawice nitrylowe, bez pudrowe

Art. Nr 290481-290485

Przechowywanie: 5-40°C

Obsługa: Unikać wysokich temperatur, wilgoci, jasnego światła i ozonu

Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji

Właściwości fizyczne

Siła przy rozerwaniu

Przed starzeniem	6 N
Po starzeniu w 70°C przez 166 godziny	6 N
Przez okres przydatności	6 N

Rozciąganie

Przed starzeniem	min. 500 %
Po starzeniu w 70°C przez 166 godziny	min. 400 %
W całym okresie przechowywania	6N

Przeprowadzone testy

Badanie na uczulenie

Badanie na podrażnienia

Cytotoksyczność

Pozostałości środków chemicznych

Siła przy zerwaniu

Przenikanie

Pozostałość pudru

Odporność na wirusy

Test FITkit

Zawartość protein

Zatwierdzenie do stosowania w przemyśle spożywczym (patrz poniżej w karcie)

Przenikanie substancji chemicznych i cytostatyków (patrz wyniki poniżej w karcie)

Skład

Substancja chemiczna	CAS
Nitrile NBR	-
Potassium Hydroxide	1310-58-3
Zinc oxide	1314-13-2
ZDEC	14324-55-1
ZDBC	136-23-2
Sulphur	7704-34-9
Titanium Dioxide	13463-67-7
Wingstay L	68610-51-5
Chlorine	7782-50-5

Ilość i rodzaj użytych substancji jest zgodna z US 21 CFR 177



Rękawice nitrylowe, bez pudrowe

Art. Nr 290481-290485

Substancja	CAS	Czas przebicia	Klasa
1-propanol	71-23-8	3,98 min.	0
2-hydroxyethyl Methacrylate 97%		5,23 min	0
Aceton	67-64-1	< 1 min.	0
Chloramine-T (in Klorill solution) 0,5%		> 480 min	6
Chloramine-T (in Klorill solution) 5-15%		225,9 min.	4
Chlorhexidine gluconate 4%	55-56-1	> 480 min.	6
Chlorhexidine digluconate 20%	55-56-1	> 480 min.	6
Diethylamine	109-89-7	<1 min.	0
Diurethane Dimethacrylate		>480 min.	6
Dismofix K 1%		>480 min.	6
Dismofix B 1%		>480 min.	6
Dismozon pur 1%		>480 min.	6
Dismozon pur 4%		>480 min.	6
Ethanol 70%	64-17-5	3 min.	0
Ethanol 99%	64-17-5	<1 min.	0
Ethidium Bromid 5 %	1239-45-8	>480 min.	6
Formaldehyde 35%	50-00-0	>480 min.	6
Formalin 10%	50-00-0	>480 min.	6
Gluteraldehyde 4%	111-30-8	>480 min	6
Hydrogen Peroxide 3%	7722-84-1	>480 min.	6
Isopropanol	67-63-0	2 min.	0
Kohrsolin FF 0,5%		>480 min.	6
Kohrsolin extra 0,5% for Alcohols		>480 min.	6
Kohrsolin extra 0,5% for Glutaraldehyde		>480 min.	6
Korsolex med AF 1%		>480 min.	6
Korsolex puls 3%		>480 min.	6
Korsolex extra 4% for Alcohols		>480 min.	6
Korsolex extra 4% for Glutaraldehyde		>480 min.	6
Microbac tiissus		>480 min.	6
n- Hexane	110-54-3	<1 min.	0
n- Heptane	142-85-5	<1 min	0
Potassium Carbonate 35%	584-08-7	>480 min.	6
Sodium Hydroxid 40%	1310-73-2	>480 min.	6
Sodium Percarbonate 20%	15630-89-4	>480 min.	6
Triethylene Glycol Dimethacrylate 95%		5,90 min.	0

Cytostatyki

Bortezomib 1.000 ppm	>480 min.	6
Carmustine 3.300 ppm	59,19 min	2
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>480 min.	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>480 min.	6
Epirubicin 2.000 ppm	>480 min.	6
Etoposide 20.000 ppm	>480 min.	6
Fluorouracil 50.000 ppm	>480 min.	6



Rękawice nitrylowe, bez pudrowe

Art. Nr 290481-290485

Gemcitabine 38.000 ppm	>480 min.	6
Irinotecan 20.000 ppm	>480 min.	6
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm	>480 min.	6
ThioTepa 10.000 ppm	>480 min.	6

Użyta metoda testu EN 374-3

Art. nr	Produkt	Rozmiar	Dł. mm	Długość mm (+/-5)	Ilość Op/Karton
290481	X-small	5-6	70-81	240	100/1000
290482	Small	6-7	81-90	240	100/1000
290483	Medium	7-8	90-100	240	100/1000
290484	Large	8-9	100-110	240	100/1000
290485	X-Large	9-10	110-120	240	100/1000