

Skarpeta przewodząca

Opis

Skarpeta przewodząca do elektrostymulacji jest używana w terapii obszarów związanych ze stopą, wspomagając leczenie zapaleń ścięgien, nerwobólów oraz zaburzeń krążenia. Pomaga również w rehabilitacji po urazach i operacjach stopy, łagodzi bóle stopy i poprawia funkcję mięśniową. To skuteczne narzędzie terapeutyczne, które przyspiesza proces gojenia się i poprawia jakość życia osób z dolegliwościami stóp.





Skarpeta przewodząca do elektrostymulacji została zaprojektowana z myślą o łatwym umieszczeniu elektrody w miejscu bólu stopy.

Użytkowanie jest bardzo proste - wystarczy założyć skarpetę na stopę.

Skarpeta umożliwia precyzyjną terapię stopy, co pozwala pacjentom zredukować ból i powrócić do aktywnego trybu życia.

Skóra musi być odpowiednio nawilżona.

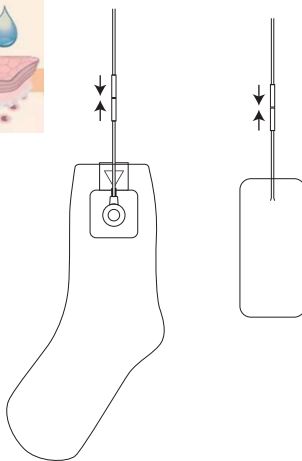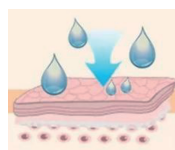

Instrukcja użytkowania

1. Skóra musi być zawsze czysta i wolna od balsamów.
2. Włóż jeden koniec kabla do metalowych zatrzasków, aby połączyć skarpetę przewodzącą z elektrodą samoprzylepną. Upewnij się, że są one prawidłowo połączone, aby zapewnić dobrą wydajność. Przykładowy rysunek znajduje się po prawej stronie.
3. Upewnij się, że skarpetka jest optymalnie umieszczona na stopie. Samoprzylepne elektrody powinny znajdować się w odległości 40 mm od skarpetki przewodzącej.
4. Upewnij się, że Elektrostymulator jest WYŁĄCZONY. Podłącz wtyczkę kabla do Elektrostymulatora. Po podłączeniu włącz Elektrostymulator i wybierz odpowiedni program.
5. Przed zakończeniem użytkowania, najpierw wyłącz Elektrostymulator. Następnie zdejmij złącza i skarpetę przewodzącą ze stopy.



Ostrzeżenie

- Jeżeli w trakcie użytkowania wystąpi jakiegokolwiek uczucie dyskomfortu lub nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować na uszkodzoną skórę. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, natychmiast przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli elektrody są uszkodzone, nie używać.
- Dostosuj intensywność elektrostymulacji zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego i/lub fizjoterapeuty.
- Skarpeta przewodząca i elektrostymulator nie są przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Należy trzymać urządzenie i skarpetę poza zasięgiem dzieci. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie potraktowały urządzenia jako zabawkę.
- Skarpeta przewodząca i elektrostymulator nie są przeznaczone do użytkowania przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, chyba, że zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania urządzenia.
- Jeśli u niektórych osób występuje podrażnienie skóry spowodowane przewodzącymi srebrnymi włóknami na skarpecie, należy przerwać stosowanie skarpety.

Czyszczenie i konserwacja

Skarpetę myjemy w ciepłej, ale nie gorącej wodzie z neutralnym detergentem. Dokładnie opłucz skarpetę z resztek detergentu. Nie wyciskać!. Skarpetę owiń ręcznikiem frotte, aby pozbyć się nadmiaru wody. Następnie pozostaw skarpetę do wyschnięcia na powietrzu w temperaturze pokojowej. Trzymaj z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Nie prać w pralce. Nie wirować. Nie suszyć w suszarce elektrycznej.

Wyprodukowano dla:



BEAUTY LIMITED®

Producent/Dystrybutor:
ARCOTECH
Ul. Budowlanych 46B
45-123 Opole
Polska



Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.

Add: 202, 2/F, Building 27, Dafa Industrial Park, Longxi
Community, Longgang Street, Longgang District,
Shenzhen, China.

Tel: +86-755-23212776

Fax: +86-755-23212776

E-mail: info@roovjoy.com

Website: www.roovjoy.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Email: shholding@hotmail.com