




RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Poduszka przeciwoleżynowa

PODUSZKA DO WÓZKA INWALIDZKIEGO TYPU GOFFER

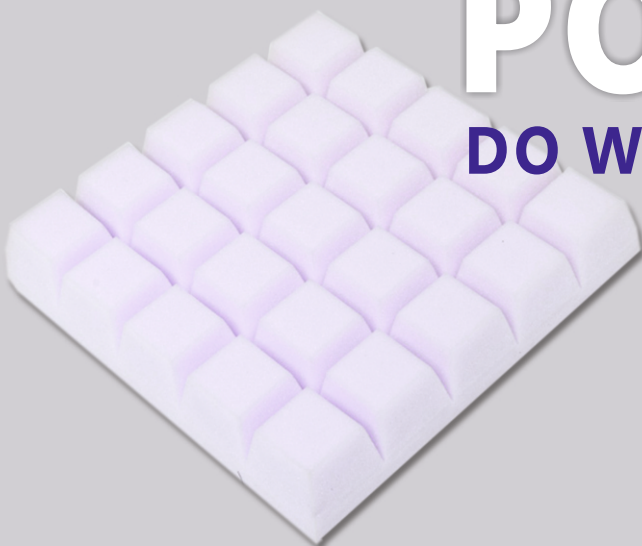

Rozmiar	
Długość w cm	40
Szerokość w cm	40
Wysokość w cm	8

Numer kat. REF 118

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Zastosowanie pianki o odpowiedniej sprężystości sprawia, iż podczas siedzenia poduszka dopasowuje się automatycznie i indywidualnie do siedzącego, równomiernie rozkładając ciężar ciała. Specjalna konstrukcja poduszki w postaci wcięć powoduje ciągły przepływ powietrza między ciałem a poduszką, chłodząc i zapobiegając powstawaniu odleżyn. Pokrowiec wykonany z tkaniny bawełnianej, czyni go łatwiejszym w utrzymaniu czystości. Poduszkę należy ułożyć na siedzisku wózka inwalidzkiego. Zaleca się unikać tworzyw sztucznych w bieliźnie osobistej. Poduszka ta jest przedmiotem osobistego użytku.

Przeciwwskazania: Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą oraz nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry.

Użytkowanie: Poduszka jest estetycznym, łatwym w użyciu i obsłudze wyrobem do stosowania jako podkład do wózka inwalidzkiego. Wyrób można używać bez ograniczeń czasowych. Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić poduszkę czy nie ma uszkodzeń mechanicznych (popękana pianka, poprute szwy, poprzecierana tkanina pokrowca). Niedopuszczalny jest kontakt poduszki z agresywnymi rozpuszczalnikami, a także wystawianie na oddziaływanie temperatury powyżej 75°C.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Pokrowiec po wyjęciu wkładu piankowego, prać w delikatnym środku piorącym w temperaturze ok. 40°C, dobrze wypłukać. W żadnym wypadku nie można suszyć pokrowca przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie pokrowca. Nie prać chemicznie, nie chlorować. Często wietrzyć w słoneczne dni. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.



UWAGI:

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

NIE NALEŻY zaklejać ewentualnych pęknięć na perforacji pianki.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeżeli występują działania niepożądane np. alergia, ból - skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3