

Bradas®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


diamond

rękawice ochronne

nitrylowe

bezpudrowe

diamantowa tekstura

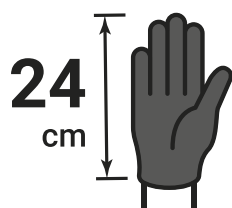

S

6-7

M

7-8

L

8-9

XL

9-10

XXL

10-11

BA Nitrilne rukavice, dijamantska struktura, bez pudera **BG** Нитрилни ръкавици с диамантена текстура, без пудра **BY** Нитрылавая пальчаткі, алмазная структура, беспудравыя **CZ** Nitrilové rukavice, diamantová struktura, nepudrované **DE** Nitrilhandschuhe, Diamantstruktur, puderfrei **DK** Nitrilhandsker, diamanstruktur, pudderfrie **EE** Nitrilkindad, teemantstruktuuriga, pulbrivabad **ES** Guantes de nitrilo, estructura en diamante, sin polvo **FI** Nitrilikäsiineet, timanttirakenteiset, jauheettomat **FR** Gants en nitrile non poudrés, à texture en diamant **GR** Γάντια νιτριλίου, σφρή διαμαντιού, χωρίς πούδρα **HR** Nitrilne rukavice, dijamantna struktura, bez pudera **HU** Nitril, gyémánt szerkezetű, púdermentes kesztyű **IT** Guanti nitrilici, testurizzazione diamantata, senza rivestimento in polvere **LT** Nitrilo pirštinės, deimantinės struktūros, be miltelių **LV** Nitrila cimdi, dimanta struktūra, bez pudera **MK** Нитрилни ракавици со дијамантска структура, ненапудрени **NL** Nitrilhandschoenen, diamanstruktur, poedervrij **NO** Nitrilhansker med diamanstruktur, pudderfrie **PT** Luvas de nitrilo, estrutura em diamante, sem pó **RO** Mănuși de nitril, structură diamant, fără pudră **RS** Rukavice od nitrila, dijamantska struktura, bez pudera **RU** Нитриловые перчатки, алмазная структура, беспудровые **SE** Nitrilhandskar med diamanstruktur, pudderfria **SI** Nitrilne rokavice, diamanтна struktura, brez pudra **SK** Nitrilové rukavice, diamanťová štruktúra, bez púdry **UA** Нітрилові рукавиці, алмазна структура, безпудрові



OPIS WYROBU

1. **Materiał:** 100% nitryl.
2. **Rodzaj rękawicy:** ochronna, bezpudrowa i niesterylna.
3. **Mankiet:** równomiernie rolowany.
4. **Powierzchnia wewnętrzna:** chlorowana.
5. **Powierzchnia zewnętrzna:** diamentowa tekstura na całej powierzchni.
6. **Kształt:** oburęczny pasujący na prawą i lewą dłoń.
7. **Okres ważności:** 3 lata od daty produkcji.
8. **Ilość w opakowaniu:** 50szt.
9. **Dostępne rozmiary:** S(6-7), M(7-8), L(8-9), XL(9-10), XXL(10-11).
10. **Kolor:** czarny.
11. **Model:** RWJNDBC7, RWJNDBC8, RWJNDBC9, RWJNDBC10, RWJNDBC11.

KLASYFIKACJA I PRZEPISY PRAWNE



Środek Ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. Zgodność z EN ISO 21420:2020; EN 16523-1:2015+A1:2018; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016.



Badanie typu UE oraz zapewnienie ciągłej zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną CE2777.
Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Buisness Park Clonee, D15 YN2P



Zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) 10/2011. Przebadane według norm: EN 1186-2:2022; EN1186-3:2022.



Zgodność z wymaganiami rynku rosyjskiego.



Zgodność z wymaganiami rynku ukraińskiego.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.bradas.pl









Poziom odporności chemicznej na przenikanie został zbadany w warunkach laboratoryjnych i dotyczy wyłącznie testowanych próbek pobranych tylko z dłoni (z wyjątkiem przypadków, gdy długość rękawicy jest równa lub większa niż 400mm - wtedy mankiet również jest brany pod uwagę) oraz substancji chemicznych. Wynik może być inny, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie.



Podczas używania, rękawice mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zadzieranie, tarcie czy degradacja spowodowane kontaktem chemicznym może znacznie skrócić rzeczywisty czas używania. W przypadku żrących związków chemicznych, degradacja może być najważniejszym czynnikiem, którego należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawic odpornych chemicznie.


INSTRUKCJA ZAKŁADANIA RĘKAWIC

Przed użyciem należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i nie posiada wad. Nacisnąć miejsce perforacji w górnej części opakowania, aby oderwać owalny kawałek papieru. Usunąć naciętą część opakowania w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do rękawic ochronnych.

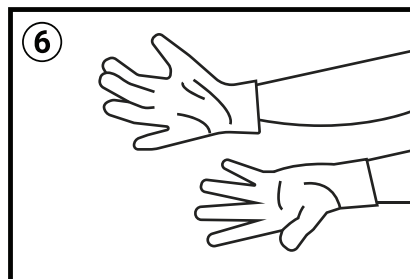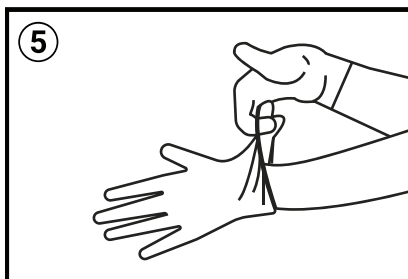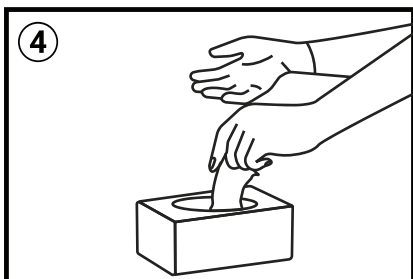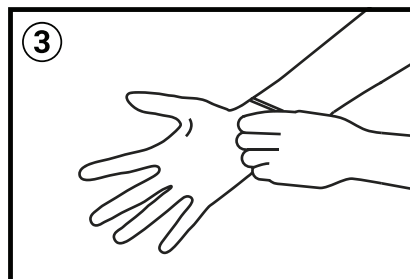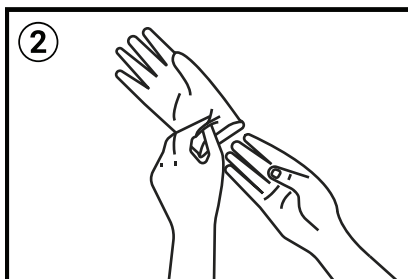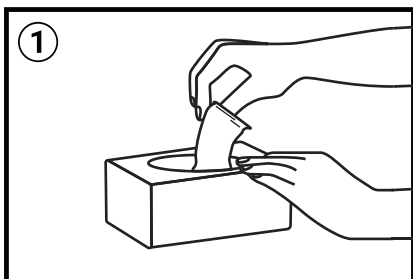

1. Wyciągnąć pierwszą rękawicę z opakowania.
2. Trzymając rękawicę za mankiet, założyć ją na przeciwną dłoń.
3. Naciągnąć rękawicę, aby idealnie ułożyła się na dłoni.
4. Wyciągnąć kolejną rękawicę i założyć ją na drugą rękę.
5. Trzymając rękawicę za mankiet, założyć ją na drugą dłoń bez rękawicy.
6. Ponownie naciągnąć rękawicę, aby upewnić się czy idealnie ułożyła się na dłoni.

INSTRUKCJA ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

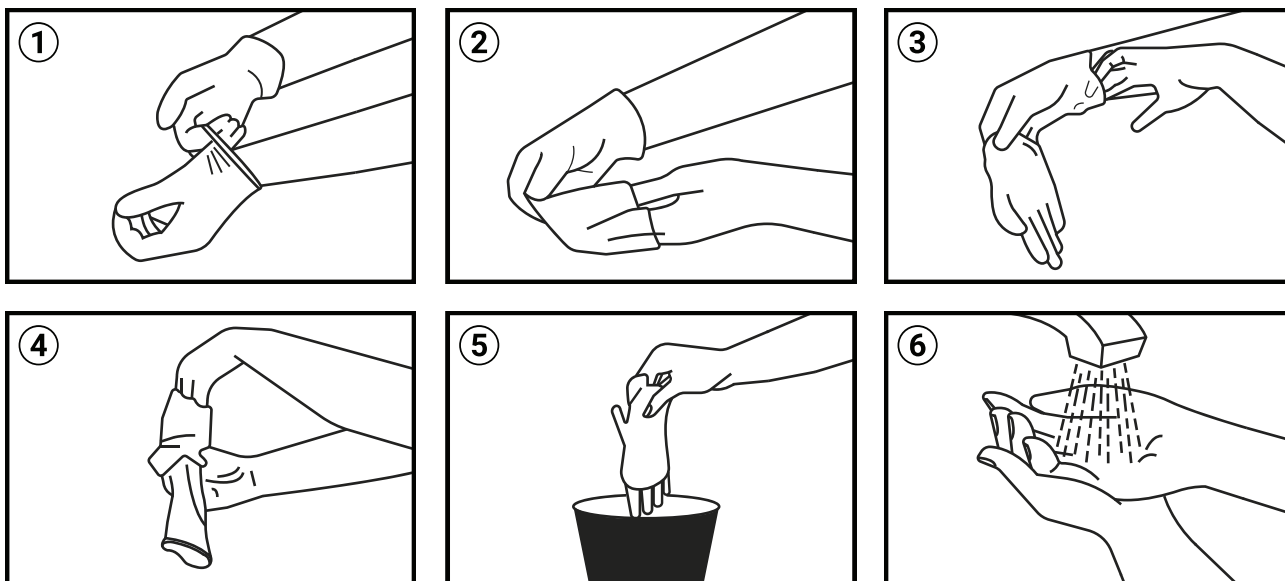

1. Chwycić jedną rękawicę za górną część mankietu.
2. Zdjąć rękawicę z dłoni wywracając ją jednocześnie na drugą stronę.
3. Trzymając ściągniętą rękawicę, włożyć palce dłoni bez rękawicy między nadgarstek, a założoną rękawicę.
4. Trzymając rękawicę od wewnętrznej strony, ściągnąć ją tak samo jak pierwszą rękawicę wywracając ją na „lewą stronę”, aż do całkowitego zsunięcia z dłoni.
5. Zużyte rękawice wyrzucić do kosza o odpowiednim przeznaczeniu.
6. Po ściągnięciu rękawic należy dokładnie umyć ręce mydłem, osuszyć i zastosować krem pielęgnacyjny.

UWAGI I OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem należy sprawdzić czy opakowanie i rękawice nie posiadają jakichkolwiek uszkodzeń lub wad.
2. Należy dobrze osuszyć dłonie przed nałożeniem rękawic.
3. Należy zmienić rękawice w przypadku uszkodzenia mechanicznego.
4. Przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
5. Rękawice nie mogą być używane z każdym rodzajem żywności, ponieważ niektóre z nich mogą uwalniać szkodliwe substancje przechodzące bezpośrednio do żywności.
6. Należy uważać, aby substancje chemiczne nie przedostały się do wnętrza rękawicy poprzez mankiet. W takim przypadku, należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem.
7. Nie zawiera substancji szkodliwych.


8. Niektóre rękawice mogą zawierać składniki będące przyczyną wystąpienia alergii u osób na nie uczulonych, powodując kontaktowe podrażnienia i/lub reakcje alergiczne. W tym przypadku należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza.
9. Czas używania nie odzwierciedla faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami.
10. Nie używać po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu.
11. Trzymać z dala od rozpuszczalników, olejów, smarów i paliwa.
12. Używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Przeznaczone do ochrony dłoni przed substancjami niebezpiecznymi.
14. Nie należy używać do ochrony przed ostrymi narzędziami, zimnymi i gorącymi przedmiotami czy przed porażeniem elektrycznym.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA


1. Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
2. Trzymać z dala od promieni słonecznych, wilgoci, ognia i źródeł ozonu.
3. Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
4. Niewłaściwe przechowywanie zmniejsza właściwości ochronne rękawic.
5. Po użyciu rękawice powinny zostać zutylizowane, gdyż mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami.
6. Utylizować w warunkach kontrolowanych zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi i wewnętrznymi procedurami jednostki.
7. Zalecana utylizacja metodą termiczną lub zakopywanie w kontrolowanych warunkach.
8. Niewłaściwa utylizacja może stanowić skażenie dla środowiska i osób postronnych.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Ze względu na szeroki zakres właściwości, rękawice ochronne znajdują zastosowanie w wielu sektorach branżowych.

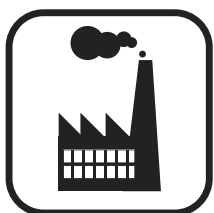

BRANŻA
PRZEMYSŁOWA

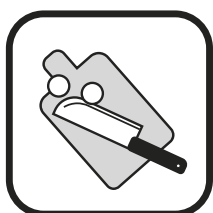

BRANŻA
SPOŻYWCZA



BRANŻA
MOTORYZACYJNA



BRANŻA
MECHANICZNA



BRANŻA
SPRZĄTAJĄCA



PRODUCENT

BRADAS Group Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 5
46-300 Olesno
Polska
www.bradas.pl

BADANIA PRODUKTU

EN ISO 374-1:2016+
A1:2018/TYPE B



JKPT



Testowane zgodnie z EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Type B)		Testowane zgodnie z EN ISO 374-4:2019
Substancja chemiczna	Poziom	Degradacja
40% Wodorotlenek sodu (K)	5	10%
37% Formaldehyd (T)	5	17,5%
30% Nadtlenek wodoru (P)	2	36,5%
n-Heptan (J)	6	44,30%

EN 16523-1:2015+A1:2018
Poziom odporności
na przenikanie

Poziom 1 > 10min
 Poziom 2 > 30min
 Poziom 3 > 60min
 Poziom 4 > 120min
 Poziom 5 > 240min
 Poziom 6 > 480min

EN ISO 374-4:2019

Wyniki degradacji wskazują na zmianę odporności na przebicie rękawic po ekspozycji na testowaną substancję chemiczną.

EN ISO
374-5:2016



VIRUS



Testowane zgodnie z EN ISO 374-5:2016	
Odporność na bakterie i grzyby	WYNIK POZYTYWNY
Odporność na wirusy	WYNIK POZYTYWNY

EN ISO 374-5:2016

Poziom odporności na przenikanie został zbadany w warunkach laboratoryjnych i dotyczy wyłącznie testowanych próbek.



Płyn modelowy imitujący żywność (testowane przez 0,5h w 40°C)	Wyniki (Limit 10mg/cm²)
3% Kwas octowy	WYNIK POZYTYWNY
10% Etanol	WYNIK POZYTYWNY
Oliwa z oliwek	WYNIK POZYTYWNY



Należy sprawdzić czy rękawice są przeznaczone do zamierzonego zastosowania. Warunki w miejscu pracy mogą różnić się od czynników w danym typie testu w zależności od degradacji, temperatury i ścierania.


WYJAŚNIENIE SYMBOLI




ODPOWIEDNIE
DO KONTAKTU
Z ŻYWNOŚCIĄ




NIE ZAWIERA
LATEKSU

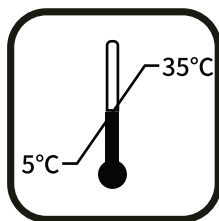

DOPUSZCZALNA
TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA

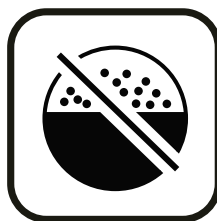

BEZPUDROWE

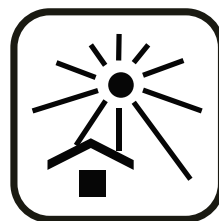


CHRONIĆ PRZED
SŁOŃCEM




KOMPATYBILNE
Z EKRANAMI




CHRONIĆ PRZED
WILGOCIĄ

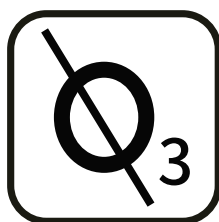

CHRONIĆ
PRZED OZONEM

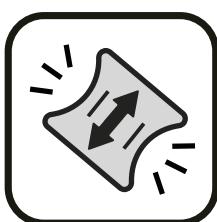


ROZCIĄGLIWY
MATERIAŁ

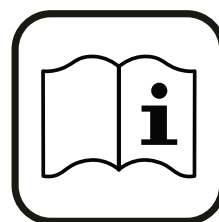

ZAPOZNAĆ SIĘ
Z INSTRUKCJĄ




OCHRONA PRZED
WIRUSAMI,
BAKTERIAMI I
GRZYBAMI

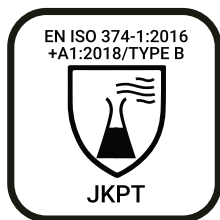


OCHRONA PRZED
ZAGROŻENIAMI
CHEMICZNYMI




NUMER SERII

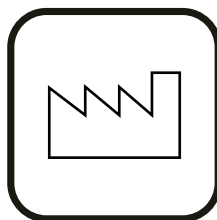

DATA PRODUKCJI

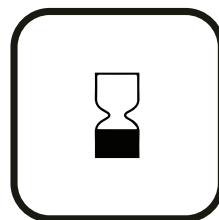

DATA WAŻNOŚCI

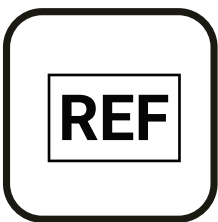


NUMER
KATALOGOWY




ODPAD
KOMUNALNY




OPAKOWANIE
DO RECYKLINGU

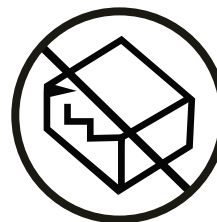

NIE UŻYWAĆ
GDY OPAKOWANIE
JEST USZKODZONE

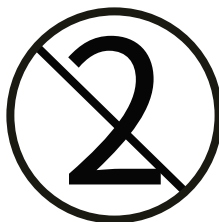

PRZEZNACZONY DO
JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU

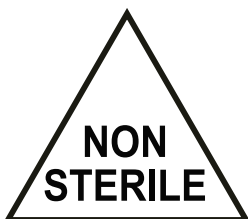

NIESTERYLNE



NITRYLOWE

DOKUMENTY W FORMIE ELEKTORNICZNEJ

Instrukcja użytkowania na opakowaniu powinna być wykorzystywana wraz z informacjami dostępnymi na stronie internetowej oraz pod kodem QR znajdującym się na opakowaniu produktu. Wszystkie instrukcje dotyczące korzystania z produktów ochrony indywidualnej oraz deklaracja zgodności są udostępnione na stronie www.bradas.pl.



SCAN ME



INSTRUCTION AND
DECLARATION OF
CONFORMITY

