

KARTA GWARANCYJNA
BALKONIK REHABILITACYJNY RF-100

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

- Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
- Sprzęt objęty jest 30-miesięcznym okresem gwarancji.
- Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
- Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
- Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją czyszczeniem i regulacją sprzętu opisane w instrukcji użytkowania
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny sprężyny itp.
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania itp.
 - wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywanie samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- Przed oddaniem sprzętu do Punktu Serwisowego należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
- Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
- Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach kulturystycznych.
- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Nabywca będzie obciążony kosztami dojazdu.
- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRZEGLĄD/NAPRAWA (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i Podpis Serwisu
1.					
2.					
3.					



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
www.rehafund.pl

tel. (22) 59 40 300
fax (22) 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BALKONIK REHABILITACYJNY RF-100

Nr katalogowy:	RF-100
Max. bezpieczne obciążenie:	127 kg
Regulacja wysokości:	787 mm – 863 mm
Maksymalna szerokość:	610 mm
Waga:	1,94 kg

UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z balkonika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Balkonik rehabilitacyjny przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji. Może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed użyciem balkonika każdorazowo sprawdź czy:
 - balkonik ustawiony jest na prawidłową wysokość.
 - mechanizm blokujący i przyciski do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone.
 - wszystkie stopki balkonika są ustawione na taką samą wysokość.
 - nasadki na stopkach nie są zużyte – jeżeli tak to wymień je.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
- Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Nie przechować balkonika w temperaturze poniżej 0°C

Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego użytkowania może doprowadzić do poważnych wypadków.

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu wyboru odpowiedniego balkonika i akcesoriów oraz sposobu korzystania, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.

UWAGA!

Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmuje rama balkonika.






SKŁADANIE I ROZKŁADANIE BALKONIKA

Aby rozłożyć:

1. Zdejmij zacisk bezpieczeństwa (rys. 4).
2. Trzymając górną ramę balkonika jedną ręką i przednią ruchomą poręcz drugą ręką, odciągaj je od siebie.
3. Upewnij się, że balkonik jest w pełni rozłożony.
4. Załóż zacisk bezpieczeństwa.

Aby złożyć:

1. Zdejmij zacisk bezpieczeństwa.
2. Chwyc górną ramę balkonika jedną ręką i pociągnij za drewnianą kulkę drugą ręką (rys.2).
3. Kiedy balkonik złoży się (rys. 3) załóż zacisk bezpieczeństwa.

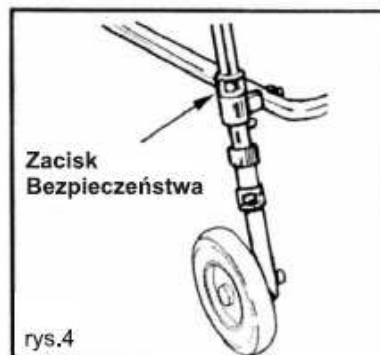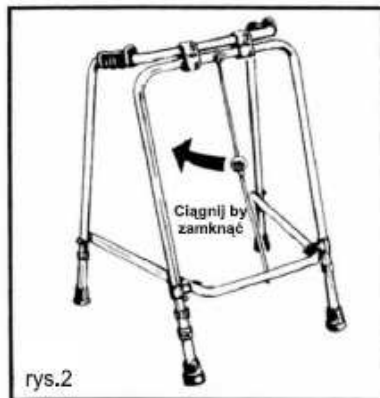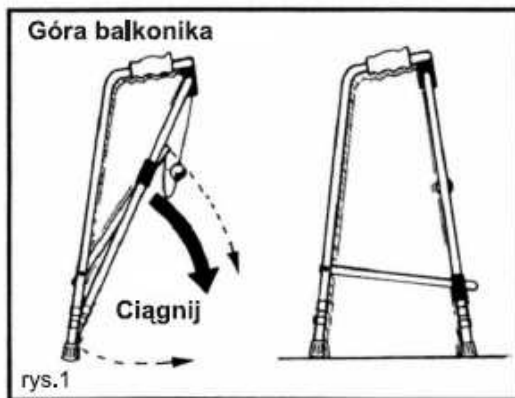

UWAGA!

Dla zachowania bezpieczeństwa, aby zapobiec złożeniu się balkonika podczas użytkowania, zacisk bezpieczeństwa musi być założony na swoim miejscu.

REGULACJA WYSOKOŚCI BALKONIKA


Należy upewnić się, że balkonik jest ustawiony na odpowiednią wysokość dla użytkownika. Do regulacji balkonika może służyć obejmą blokującą lub przycisk blokujący. (rys. 5)

Obejma blokująca:

1. Zdejmij obejmę - chwyć ją pomiędzy kciuk i palec wskazujący, następnie pociągnij na zewnątrz.
2. Przesuń stopkę w dół lub do góry, aby uzyskać żadaną wysokość.
3. Wetknij obejmę z powrotem w odpowiedni otwór.
4. Upewnij się, że obejmą prawidłowo zablokowała daną pozycję stopki.

Przycisk blokujący:

1. Wciśnij przycisk po obu stronach stopki.
2. Obróć lekko stopkę tak aby przycisk nie wskoczył z powrotem na swoje miejsce.
3. Przesuń stopkę na żadaną wysokość, obróć ją lekko i zwolnij przycisk tak aby wszedł w odpowiednie otwory.
4. Upewnij się, że przycisk prawidłowo zablokował daną pozycję stopki.

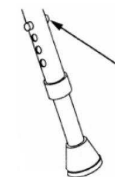

rys. 5

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
- Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

UWAGA!

Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.

PRODUCENT:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03 – 310 Warszawa, POLAND
tel.: +48 22 594 03 00
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl