

**Wyrób medyczny: Brzuszy pas
podtrzymujący, wielokrotnego użytku**
Wersja: Pas brzuszny pooperacyjny
(MEK 3015)
(z 3 niezależnymi rzepami)

1. Opis:

- Wyrób medyczny wykonany jest z oddychającego, hipoalergicznego materiału kompozytowego, co pozwala na stosowanie go zarówno na odzież, jak i bezpośrednio na ciele.
- Anatomiczny kształt sprawia, że użytkowanie pasa jest skuteczne, bezpieczne i komfortowe.
- Klamra z trzema niezależnymi rzepami ułatwia zakładanie opaski i zapewnia anatomiczne dopasowanie do ciała.
- Uniwersalność konstrukcji pozwala na zastosowanie bandaża zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 7 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

2. Funkcje:

- Zapewnia prawidłowe tworzenie się blizny pooperacyjnej dzięki stabilizacji i równomiernemu, elastycznemu uciskaniu przedniej ściany brzucha.
- Ucisk i wzmocnienie powłok brzusznych w okolicy rany pooperacyjnej zapobiega tworzeniu się i progresji przepuklin brzusznych.

IFU_3015_v1

- Zmniejsza ból, zapewnia wczesną mobilizację i skraca okres rehabilitacji.

3. Wskazania do stosowania:

- Okres pooperacyjny po zabiegach na narządach jamy brzusznej, abdominoplastyce.
- Zapobieganie przed rozejściem się szwów pooperacyjnych i powstawaniu przepuklin.
- Oslabienie i rozluźnienie powłok brzusznych, obecność przepuklin brzusznych.
- Okres rehabilitacji po cięciu cesarskim.

4. Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału, z którego jest wykonany produkt.

5. Instrukcja obsługi:

- Wybierz rozmiar zgodnie z tabelą, po uprzednim zmierzeniu obwodu talii.

XS	obwód pasa	64-72 cm
S		72-80 cm
M		80-90 cm
L		90-100 cm
XL		100-110 cm
XXL		110-120 cm
XXXL		120-130 cm

- Wybierz rozmiar zgodnie z tabelą, po uprzednim zmierzeniu obwodu talii.
- Założ pas bez naciągania w stanie niepełnego wdechu leżąc na plecach.
- Zapiąć rzepy stopniowo od góry do dołu.

6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Przed praniem zapnij wszystkie rzepy.

IFU_3015_v1

- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.



- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Kolor: czarny

Data wydania instrukcji używania: 10.2021; wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



3015



IFU_3015_v1

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

***Pas brzuszny pooperacyjny
(MEK 3015)
(z 3 niezależnymi rzepami)***

