

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krzesło toaletowe tapicerowane

Kod produktu: **BLUE-TIM**




1. Wykonanie

Krzesło toaletowe tapicerowane wykonane jest ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Regulacja pozwala na dostosowanie wyrobu do indywidualnych potrzeb pacjenta, a boczne podłokietniki wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Krzesło wyposażone jest w deskę sedesową oraz łatwo wyciągany plastikowy pojemnik sanitarny. Miękkie, tapicerowane siedzisko z oparciem podnosi komfort użytkowania.

Zestaw zawiera: ramę krzesła z oparciem, nóżki (4 szt.), blokady nóżek (4 szt.), miękkie siedzisko, pojemnik sanitarny.

Części składowe:

- a. rama z oparciem
- b. miękkie siedzisko
- c. nóżki
- d. pojemnik sanitarny
- e. nasadki antypoślizgowe

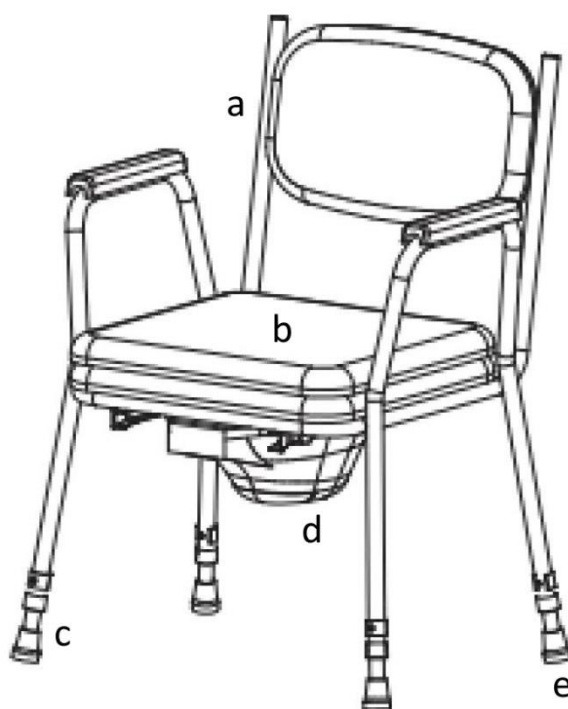

2. Zastosowanie

Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności higienicznych. Zalecane jest dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi, oraz dla osób, które utraciły

zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Krzesło pełni funkcję toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem. Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych użytkownika.

3. Montaż, regulacja i użytkowanie

Rozłożenie krzesła toaletowego

Krok 1. Odwrócić ramę krzesła i włożyć cztery nóżki w otwory montażowe. Zablokować nóżki używając blokad z pinami.

Krok 2. Odwrócić i postawić krzesło na podłożu.

Uwaga: wszystkie nóżki muszą być ustawione na tym samym poziomie. Wszystkie nóżki powinny stać stabilnie na podłożu.

Krok 3. Wsunąć pojemnik sanitarny używając prowadnic pod siedziskiem.

Krok 4. Umieścić miękkie siedzisko na desce sedesowej.

Regulacja wysokości

Aby wyregulować wysokość krzesła, należy wyciągnąć blokadę z pinem, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować ustawioną wysokość blokadą z pinem.

Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga: wszystkie nóżki muszą być ustawione na tym samym poziomie. Wszystkie nóżki powinny stać stabilnie na podłożu.

Użytkowanie

Podnieść miękkie siedzisko, a następnie zdjąć pokrywę pojemnika sanitarnego. Po użyciu przykryć pojemnik pokrywą, a na desce sedesowej umieścić miękkie siedzisko.

Uwaga: pamiętać o opróżnianiu pojemnika po każdym użyciu.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	59 cm
---------------------	-------

Szerokość wewnętrzna	55 cm
Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość oparcia	42 cm
Wysokość siedziska od podłoża	43-53 cm
Wysokość całkowita od podłoża	81-91 cm
Wymiary siedziska	43 cm x 46 cm
Waga krzesła	7,8 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg
Kolor ramy	niebieski

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego krzesła:

- Krzesło toaletowe należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Dokładnie osuszyć.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny rozpuszczalników.
- Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik sanitarny oraz deskę sedesową.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



03/2024(I)