

Plastry dla dzieci

Zestaw plastrów dla dzieci

- hipoalergiczne
- centralnie umieszczony opatrunek na folii perforowanej z klejem akrylowym
- warstwa zabezpieczająca
- nieprzywierający opatrunek
- elastyczne, łatwo dopasowujące się do kształtu ciała



INSTRUKCJA UŻYCIA: Dokładnie oczyścić ranę i osuszyć jej okolice. Wyjąć plaster z opakowania. Usunąć jeden z dwóch papierków ochronnych i nakleć pierwszą połowę plastra, pod warunkiem, że gaza znajduje się pośrodku rany. Usunąć drugi papierek ochronny i dokończyć aplikację plastra. Ostrożnie dociśnij plaster. Poczekać kilka minut aż plaster idealnie będzie przylegał do skóry.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

W przypadku wystąpienia poważnych incydentów należy poinformować producenta lub właściwy urząd.

Natubay sp. z o.o.
ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin