

骨传导拾音器耳机使用说明书

User manual for Bone conduction sound collector
hearing impaired headset

聴覚補助用骨伝導集音器ヘッドホン取扱説明書



HA13

A, ----1 szt

B, TYP C ----- 1 szt

C, TYP C ----- 1 szt



,
, USB

1) ,


,)

2)

3) TYPEC /

4)(,)

5)

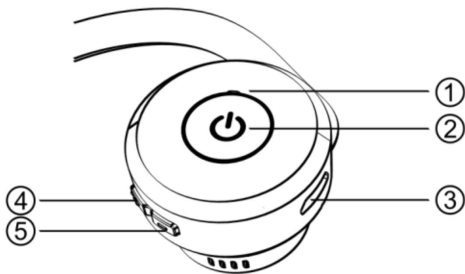

1)

Power ON

Power Off

2) TYPEC TYPEC ;

3) , , ,

4) 3 :

, Mode 1, , Mode2,

Mode3,

5) / : -

1)()

TYPEC 1 ,

: .



2) ,

, ,

3) ,

,

4) , ,

5) , ,



Maksymalne napięcie: 250 mAh Maksymalne napięcie: -58dB

: 9 miesięcy : 45 miesięcy

: 1

:

Złącze USB: 40 cm

Maksymalne pasmo: 100 Hz – 18 kHz

Maksymalne natężenie dźwięku: 88 dB




Instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego do aparatu słuchowego z przewodnictwem kostnym

1. Produkty A.

Zestaw słuchawkowy-----1 szt.

B. Odłączany mikrofon-----1 szt.

Kabel ładujący typu C -----1 szt.

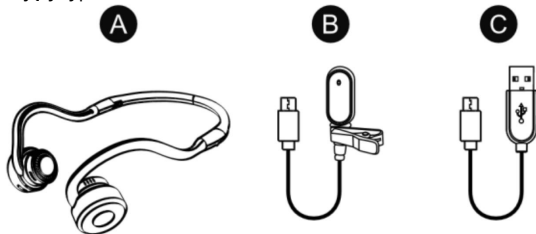

2. Cechy 1) Słuchawki

z pałąkiem na szyję i odłączanym mikrofonem, dobrze zamocowane i wygodne w noszeniu.

2) Odpowiednie dla osób niedosłyszących, u których problemy ze słuchem wynikają z uszkodzenia lub starzenia się zewnętrznego kanału słuchowego i błony bębenkowej.

3) Słuchawki bezprzewodowe, nie powodują uszkodzenia błony bębenkowej.

4) Wbudowana bateria litowa, ładowalna przez kabel USB, nadająca się do recyklingu.

3. Interfejs zestawu słuchawkowego

1) Kontrolka pracy – świeci długo

na czerwono podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu kontrolka gaśnie.


- Po włączeniu zasilania zielone światło pozostaje włączone.

- Po wyłączeniu zasilania światło gaśnie.

2) Przycisk włączania/wyłączania; przycisk wielofunkcyjny.

3) Port ładowania typu C / Port mikrofonu 4) Głośność +
(Pojawia się, gdy głośność jest ustawiona na maksymalną)

5) Objętość -

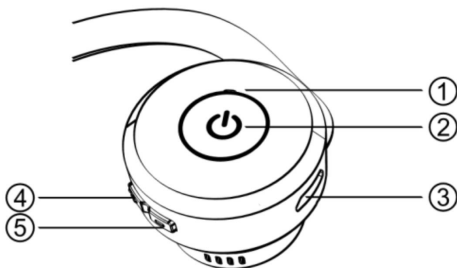

4. Obsługa 1) Naciśnij

i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć zestaw słuchawkowy. Rozlegnie się dźwięk informujący o włączeniu i zaświeci się kontrolka działania. Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć zestaw słuchawkowy. Rozlegnie się dźwięk informujący o wyłączeniu.

2) Podłącz mikrofon do gniazda typu C zestawu słuchawkowego.

3) Załóż zestaw słuchawkowy i włącz tryb aparatu słuchowego. Możesz słyszeć swój głos lub dźwięki otoczenia. Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego dożądanego poziomu. Po ustawieniu zestawu na maksymalny poziom głośności, usłyszysz sygnał dźwiękowy. 4) Tryb 3-kanalowy: tryb posiada funkcję pamięci. Domyślnym trybem jest ostatni tryb wybrany po włączeniu. Dwukrotne kliknięcie przycisku wielofunkcyjnego umożliwia przełączanie między trybami 1, 2 i 3.

5) Przełączanie między językiem chińskim i angielskim: Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk głośności -.

5. Uwagi

1) Jeśli używasz zestawu słuchawkowego po raz pierwszy lub nie ładowałeś go przez dłuższy czas, musisz ładować zestaw słuchawkowy przez 1 godzinę. Podczas ładowania będzie świecić się kontrolka stanu, a po zakończeniu ładowania zgaśnie.

(Uwaga: zestawu słuchawkowego nie można używać podczas ładowania).



2) Załóż zestaw słuchawkowy na szyję i jednocześnie załóż czujniki przewodnictwa kostnego na kości przed obiema głowami. uszy jak na poniższej ilustracji. (Ostrzeżenie: nie należy zakładać słuchawek na uszy.)



- 3) Gdy bateria jest słaba, migająca czerwona dioda przypomina o konieczności naładowania. Należy naładować zestaw słuchawkowy w odpowiednim czasie.
- 4) Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go raz w miesiącu, aby sprawdzić żywotność baterii.

7. Specyfikacje

Bateria: litowa 250mAh

Czas pracy: 9 godzin

Czas ładowania: 1 godzina

Typ sterownika: czujniki przewodnictwa kostnego

Zakres częstotliwości: 100 Hz-18 kHz

Czułość sterownika: 88 dB

Waga zestawu słuchawkowego: 45 g

Mikrofon: -58 dB

1,

A. ----- 1 SZT. B.TYPEC


----- 1szt C.TYPEC -----

1szt

A



B

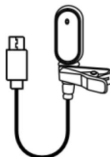

C



2,



USB


3 1) (

2) ;

3) TYPEC

4)+()

5) 音量-ボタン

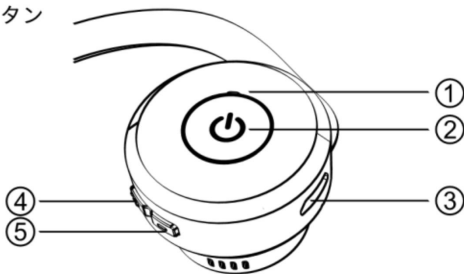

4,

1) Poweron

Poweroff LED

2) TYPEC TYPEC

3)

4)3 :

Mode1

Mode2

Mode3

5) / : -



5,

1)

TYPEC

1

(:

2)

3)

4)

5)

1



6,

:250mAh

: 9

: 1

:

Zakres częstotliwości: 100 Hz, 18 kHz

: 88dB

Poziom głośności: -58dB

: 45g

Rozmiar USB: 40 cm

12



	HA13	1 dzień	

1. , , ,
 () 2. , , .3. 4, , , , , , .