

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AT51032 ŁAWKA NAWANNOWA



Uwagi i ostrzeżenia

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA PROMIENI SŁONECZNYCH I ŹRÓDŁA CIEPŁA.

NIEDOPUSZCZALNE JEST STAWIANIE NA ŁAWCE NAWANNOWEJ. REGULARNIE SPRAWDZAĆ SPRZĘT POD KĄTEM USZKODZEŃ I ZUŻYCIA.

W WYPADKU JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE

NIE należy użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, przestroż lub instrukcji, przed próbą złożenia wyrobu skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej, dystrybutorem lub pracownikiem technicznym, aby uniknąć skaleczenia się lub uszkodzenia produktu.

Zastosowanie

Ławka ułatwia użytkownikowi z obniżoną sprawnością ruchową korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych.

Montaż/użytkowanie

Czynność montażu może wykonać jedna osoba, lecz w przypadku znacznej dysfunkcji konieczna może być Pacjentowi pomoc osoby trzeciej. Montaż należy przeprowadzać w następującej kolejności (patrz części składowe)

Do ramy siedziska wprowadź elementy ramy bocznej, kolejno z jednej i drugiej strony. Wprowadzając element ramy bocznej zablokuj go w odpowiednim miejscu za pomocą miedzianego bolca zabezpieczającego. Następnie w taki sam sposób zamontuj oparcie. Sprawdź poprawność zamontowanych elementów oraz odpowiednią szerokość ławki. Rama ławki musi mieć taką szerokość aby odpowiadała szerokości wanny, a nasadki antypoślizgowe miały pełen kontakt z brzegiem wanny. Korzystając z przyrządu należy zachować odpowiednią kolejność czynności. Siadanie, uchwycenie brzegów wanny, przełożenie kolejno nogi bliższej wanny, a następnie dalszej i zgięcie nóg. Wstawanie z przyrządu odbywa się poprzez uchwycenie brzegów wanny, wyprost nóg, przełożenie nogi bliższej brzegu wanny, a następnie dalszej z jednoczesnym obrotem tułowia. Nie należy przenosić Pacjenta z ławki do wewnątrz wanny.

Należy ustawić ławkę stabilnie, tak by była nieruchoma.

Cechy produktu

- lekka aluminiowa konstrukcja,
- dwustopniowa regulacja szerokości 83-78 cm,
- nasadki antypoślizgowe uniemożliwiające przesuwanie się ławki,
- siedzisko z otworami co ułatwia odprowadzenie wody,
- oparcie dla lepszej stabilności użytkownika.

Produkt zawiera: ławka nawannowa

Parametry techniczne:

szerokość wewnętrzna 67 – 69 cm

szerokość całkowita 83 – 78 cm

wymiar wgłębny 18 cm

szerokość siedziska 40 cm

głębokość siedziska 23 cm

wysokość z oparciem 40 cm

waga: 1,92 kg

maksymalna masa użytkownika 120 kg



TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA

Konserwacja

1. Stelaż czyścić za pomocą wody i środków czystości (unikać substancji o działaniu żrącym).
2. Siedzisko i oparcie czyścić przy pomocy łagodnych środków czystości.
3. Podczas czyszczenia nie należy szorować.
4. Nieużywany produkt powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu.
5. Dla zachowania parametrów użytkowych niezwykle ważne jest utrzymanie produktu w czystości oraz sposób przechowywania.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny

UWAGA: Wszelkie czynności takie jak wsiadanie, zsiadanie czy zmiana pozycji pacjenta wymagają pomocy opiekuna.

UWAGA: Podczas użytkowania i obsługi ławki oraz podczas regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.

Model:

Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży
i czytelny podpis Sprzedawcy:

1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na ławkę, poczynwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.

2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.

4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.

5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.

6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.

7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.

8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.

9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net

