





REA TAPE SLEEP is made from cotton material that is soft and breathable. Once it's in place, the patch stimulates the skin, triggering a neurological response in the muscles of the face and gently holds the mouth closed to direct airflow through the nose, reducing snoring, improving sleep and improving oral appliances.


REA TAPE SLEEP wykonany jest z bawełnianego materiału, który jest miękki i oddychający. Po nałożeniu plaster stymuluje skórę, wywołując reakcję neurologiczną w mięśniach twarzy i delikatnie utrzymuje zamknięte usta, tak aby skierować przepływ powietrza przez nos, zmniejszając chrapanie, poprawiając sen i ulepsząc aparat jamy ustnej.

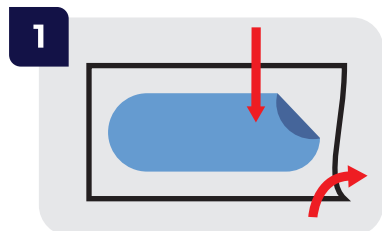

1 Peel the patch from the release paper.
Odklej plaster z podkładu.

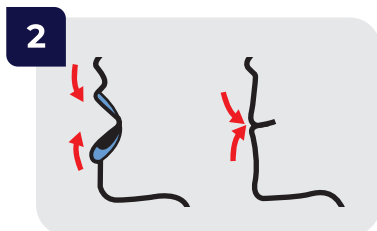


2 Tuck your lips.
Zaciśnij usta.

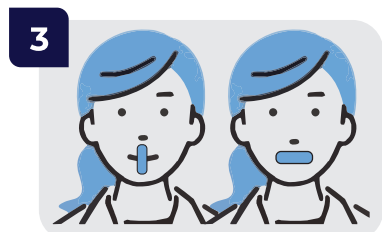

3 Apply the patch with no stretch.
• For the first 2-3 times apply the patch vertically.
• When you get used to the feeling apply the patch horizontally.

Naklej plaster bez rozciągania.
• Podczas pierwszych 2-3 aplikacji plaster naklej pionowo.
• Kiedy „oswoisz się” z uczuciem towarzyszącym naklejaniu plastru na usta, możesz zacząć przyklejać go poziomo.

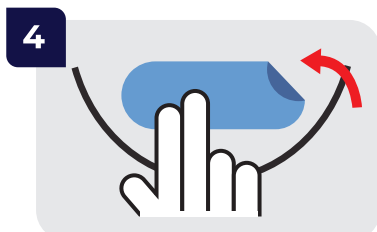

4 To remove, gently peel off the patch with one hand while preventing the skin from lifting by holding it down with the other hand.

Aby usunąć plaster, jedną ręką przytrzymaj skórę, aby zapobiec jej podnoszeniu się, a drugą ręką delikatnie odklej plaster.

FRONT

Before use:

Remove any excess oils, sweat or dirt prior the application. Run a test patch before application. In case of any adverse reaction such as rash discontinue use. Do not use on wounds.

Przed użyciem:

Przed aplikacją plastra oczyść skórę z nadmiaru oleju, potu lub brudu oraz wypróbuj niewielki kawałek plastra na skórze. Jeżeli podczas testu wystąpi podrażnienie, zaczerwienienie lub wysypka, zaprzestań stosowania. Nie stosuj na rany.

Patient target group:

People with snoring disorder and people breathing through the mouth.

Grupa docelowa:

Osoby, które chrapią i oddychają przez usta.

Kiedy nie należy używać taśmy REA TAPE SLEEP?

Taśma służy tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę lub otwarte rany. Przerwać stosowanie w przypadku zaobserwowania podrażnienia lub innych niepokojących zmian. Nie stosować produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Możliwe działania niepożądane.

REA TAPE SLEEP może rzadko powodować działania niepożądane, zwykle zaczerwienienie, podrażnienie lub wysypkę w miejscu aplikacji. Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym objawy niepożądane niewymienione w ulotce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: +48 (22) 492 13 01, fax: +48 (22) 492 13 09, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
Zgłaszanie działań niepożądanych pozwala uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa leków.

Label identification:

Wyjaśnienia symboli użytych na opakowaniu:

CE mark Znak CE	Medical Device Wyrób medyczny	Manufacturer Producent	Catalog number Numer katalogowy
Batch number Kod partii	Do not reuse Produkt jednorazowego użytku	Non-sterile Wyrób niesterylny	Use by date Data ważności
Caution Uwaga	Keep away from direct sunlight Trzymaj z dala od światła słonecznego	Consult instruction for use Zapoznaj się z treścią ulotki	Date of manufacture Data produkcji

TS Co., Lt.
61, Hwanggeum 3-ro 7beon-gil,
Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do,
South Korea

313 Sp. z o.o.
uł. Przędzalnia 60B,
15-688 Białystok, Poland

EC REP

MedEnvoy Global BV
WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595 AM The Hague The Netherlands

Leaflet approval date: 01.09.2023
Data zatwierdzenia ulotki: 01.09.2023

BACK