

Krąg przeciwodleżynowy GUM-MED

Wyrób medyczny

Krąg przeciwodleżynowy GUM-MED pełni funkcję rehabilitacyjną oraz profilaktyczną. Zapewnia wygodę i ulgę w każdych warunkach domowych jak i w placówkach medycznych. Skutecznie zapobiega odleżynom, ułatwia gojenie się ran, sprawdza się po operacjach hemoroidów oraz zapewnia wsparcie kobietom w okresie połogu. Jest idealny dla osób prowadzących siedzący tryb życia oraz dla osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Dzięki przemysłanej konstrukcji krąg zapewnia cyrkulację powietrza, co przekłada się na komfort oraz uczucie maksymalnej świeżości i suchości. Wytrzymuje obciążenie do 135 kg. W razie wątpliwości przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób użycia: napompuj krąg w poniżej opisany sposób. Poluzuj zawór poprzez jego odkręcenie (nie musi być całkowicie odkręcony) i dmuchaj, aby napompować krąg do pożądanej wysokości. Po jego napompowaniu zakręć zawór do momentu aż nie będzie z wyrobu uchodzić powietrze.

Ostrzeżenia: Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek samodzielnych zmian w konstrukcji wyrobu. Unikać bezpośredniego kontaktu kręgu ze skórą, zawsze podczas jego użycia owinać szczelnie krąg ręcznikiem lub szmatką bawełnianą.

Nie należy stosować wyrobu jeśli jest on uszkodzony. Przed rozpoczęciem użytkowania należy każdorazowo upewnić się, że miejsce stosowania (np. łóżko, materac, siedzisko) jest wolne od ostrych krawędzi, metalowych części, sprężyn oraz innych elementów mogących uszkodzić produkt. Za uszkodzenia mechaniczne producent nie ponosi odpowiedzialności.

Kręgu nie należy używać jako urządzenia ratującego życie ani jako zabawki wodnej.

Krąg należy czyścić przy użyciu miękkiej gąbki lub ściereczki za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po wyczyszczeniu należy dokładnie wypłukać powierzchnię kręgu pod bieżącą wodą, przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mieszka (w Polsce: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).


Przechowywanie: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.

Data wydania instrukcji: 10.10.2024 r.

KPG/01



Yangzhou Luminus Rubber & Plastic
Co., Ltd. No. 20
Juxian Road, Shiqiao Town,
Yangzhou, Jiangsu, China

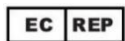

Helbo Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 14A
30-797 Kraków
www.helbo.pl



Helbo Sp z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 14A
30-797 Kraków
www.helbo.pl



PPHU KEJ Sp. z o.o.
Cikowice 241
32-700 Bochnia
www.kej.pl