



INSTRUKCJA
UŻYWANIA

Przed przystąpieniem do używania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. W celu prawidłowego stosowania wyrobu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem. W każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych lub wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.

KOŁDRA Medical[®]+

REF

KM 01
KM 02
KM 03
KM 04

„POZYTYWNA OPINIA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA NR OP-4901, WAŻNA DO 15.04.2020 R.”

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podłożu poliestrowym główny alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego Kołdra MEDICAL[®]+ o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Wyrób może być stosowany wspomagająco*) w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniższych chorób alergicznych**), jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergiczny przewlekły nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatok, krtani, gardła i migdałków podniebiennych).

*) W każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza.

**) Wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

UŻYTKOWANIE

Wyrób powinien być stosowany do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u alergików i osób zdrowych. Kołdrę należy zawsze stosować powleczonej w bawełnianą poszewkę.

Kołdra MEDICAL[®]+ jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użycia.

Wyrób użytkować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, zaleceniami i wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować wyrobu w bezpośrednim kontakcie ze skórą, w przypadku wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.

ZALECENIA

– Specjaliści nie zalecają stosowania zwykłych poduszek u noworodków i niemowląt w pierwszym roku życia. Natomiast nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do stosowania takich kołder u noworodków i niemowląt w pierwszym roku życia.

OSTRZEŻENIA

– Kołdra jest wyrobem osobistego użytku, przeznaczonym do wielokrotnego użycia. W celu zapewnienia właściwych warunków higienicznych, wyrób nie może być używany przez inne osoby. W przypadku konieczności zastosowania wyrobu przez inne osoby, przed ponownym użyciem, należy przeprowadzić właściwą procedurę prania.

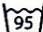




- Należy zawsze używać wyrób powleczonej w bawełnianą poszewkę, w szczególności podczas stosowania przez małe dzieci oraz osoby ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień i uczuleń.
- Podczas użytkowania wyrobu, nie można dopuścić do jego zawilgocenia lub przemoczenia. Nie stosować wyrobu w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. W przypadku silnych zabrudzeń, niemożliwych do usunięcia lub uszkodzenia wyrobu należy wymienić go na nowy, pozbawiony wad.
- Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, może to spowodować zmianę barwy poszycia, natomiast nie ma wpływu na właściwości wyrobu.
- Jednorazowo nie stosować wyrobu dłużej niż 12 godzin. W przypadku konieczności dłuższego użycia, należy przewietrzyć wyrób.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zaprzestać używania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

Wyrób należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem. Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów oraz nadmiernego kurzu i wilgoci.

W celu eliminacji alergenów, wyrób należy poddawać okresowej (raz w miesiącu) procedurze prania w temperaturze, co najmniej 60 °C.

Należy stosować następujące parametry procesu konserwacji:

-  Maksymalna temperatura prania 95°C, proces normalny.
-  Nie stosować bielenia.
-  Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej, suszenie w normalnej temperaturze.
-  Nie prasować.
-  Nie czyścić chemicznie.

SKŁAD

Poszycie: 48% bawełna, 52% poliester

Wypełnienie: 100% poliester silikonowany Hollow

AMW NAWROT SP.J.

