

Dentemp® – Használati Útmutató

Ideiglenes fogtömés és koronarögzítő cement

Használatával gyors fájdalomcsillapítást és a kényelmetlenség megszűnését érheti el, amíg fel nem keresi fogorvosát. Otthonában elvégezheti, saját magának.

Kellemes ízű, biztonságos és hatékony. A világon a legnépszerűbb ideiglenes fogtömés a Dentemp®.

HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓKAT. TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL.

VIGYÁZAT!: Ezt a terméket nem szabad használni, ha lüktető fájdalom vagy duzzanat jelentkezik az érintett területen. Azonnal forduljon fogorvosához. Ez a termék ideiglenes gyógymód. Minél előbb keresse fel a fogorvosát a szükséges munka elvégzéséhez. Ennek elmulasztása fertőzést vagy súlyos sérülést okozhat. Szobahőmérsékleten, zárva tárolja, hogy az anyag puha maradjon.

Az elveszett tömés pótlása:

1. **Előkészület:** Mosson kezet. Öblítse ki az üreget meleg vízzel, és hagyja nedvesen.
 2. **Adagolás:** Az applikátor segítségével távolítson el kis mennyiségű anyagot a tégelyből, formázza gömbé az ujjával, és erősen nyomja az üregbe.
 3. **Simítás:** Kaparja le az anyagot az ujjáról úgy, hogy az ujjával végigkaparja a fog szélét. Ne emelje fel egyenesen az ujját, mert ez megláthatja az üregben lévő anyagot.
 4. **Beállítás:** Többször harapjon rá a megfelelő harapás biztosítása érdekében. Távolítson el minden felesleges anyagot.
 5. **Befejezés:** Öblítse ki a száját. A teljes kötés miatt várjon két (2) órát az étkezéssel. A fogorvos könnyedén eltávolítja.
-

A laza sapkák vagy koronák újra rögzítése:

1. **Tisztítás:** Mosson kezet. Készítse elő a koronát a lehető legtöbb régi cement óvatos eltávolításával a korona belsejéből. Alaposan öblítse le.
2. **Fog előkészítése:** Tisztítsa meg és öblítse le a fog területét vízzel, és hagyja nedvesen.
3. **Próba:** Helyezze vissza a koronát a fogra, mielőtt új anyagot alkalmazna. Ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e. Ha ez nem így van, akkor ne folytassa a munkát! Keresse fel fogorvosát.
4. **Rögzítés:** Az applikátor segítségével távolítson el egy kis mennyiségű anyagot a tégelyből. Helyezzen nagyon kis mennyiségű anyagot a korona nyitott végének belső széle mentén.
5. **Beillesztés:** Helyezze a koronát a nedves fogra, és erősen nyomja meg. Többször harapjon rá a megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében. Ha a harapás nem teljesen kényelmes, távolítsa el, és ismétlje meg az összes lépést, amíg a koronát normálisnak érzi.
6. **Befejezés:** Távolítson el minden felesleges anyagot. A teljes kötés miatt várjon két (2) órát az étkezéssel. A fogorvos könnyedén eltávolítja.

Információk és Vásárlási Feltételek:

- **Email:** ideiglenesfogtomes@gmail.com
- **Facebook:** [facebook.com](https://www.facebook.com)
- **Telefon:** +36 20 916 8288

Vásárlási információk: A számlát a termék átvétele után e-mailben küldjük ki. Utánvétel vásárlás esetén minden esetben visszahívásos egyeztetés történik a postázás előtt. Amennyiben a kiküldött terméket a vásárló nem veszi át, a csomag oda-vissza postaköltsége a vevőt terheli (a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet alapján). 8 napon túli nemfizetés esetén a követelés kezelő cégnek kerül átadásra.

Forgalmazó: Hun Organic Consulting KFT