

Incidin™ Pro



Skoncentrowany preparat do szybkiego i skutecznego mycia i dezynfekcji.

Skoncentrowany płyn do mycia i dezynfekcji.

Dzięki formule SMART-BALANCED, Incidin™ Pro zapewnia nowy standard mycia i dezynfekcji powierzchni.

- Skuteczny
- Szybki
- O doskonałej tolerancji materiałowej

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Skuteczny wobec bakterii, drożdży i różnych wirusów (w tym Norowirusa), Incidin Pro nadaje się do obszarów wysokiego ryzyka i różnego rodzaju powierzchni, od oddziałów ogólnych i pomieszczeń publicznych, po sale operacyjne i oddziały intensywnej terapii.

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI MYJĄCE I TOLERANCJA MATERIAŁOWA

Został szeroko przetestowany na wszystkich typach powierzchni powszechnie spotykanych w placówkach opieki zdrowotnej - od metali, linoleum i PCV po ceramikę, gumy i tworzywa sztuczne - z doskonałymi wynikami.

FORMUŁA BEZ ALDEHYDU I SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

Nie posiada substancji lotnych i zapachowych, co zapewnia wygodne i bezpieczne stosowanie produktu.



Incidin™ Pro

Skoncentrowany płyn do mycia i dezynfekcji.



Incidin™ Pro
Butelka 2 l



Incidin™ Pro
Kanister 6 l

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Roztwór o barwie przezroczystej do jasnożółtej
- Wartość pH koncentratu w temp. 20°C: ok. 11
- Wartość pH dla roztworu (0,5%): ok. 9,5
- Wartość pH dla roztworu (2,0%): ok. 10,0
- Gęstość w temp. 20°C: 1,01 g/ml
- Współczynnik refrakcji: 1,385

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

SPÉKTRUM DZIAŁANIA	STÉŻENIE (%) / (ml/L)	CZAS DZIAŁANIA
Bakteriobójczy wg EN 13727 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Drożdżakobójczy wg EN 13624 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy wg EN 14348	1,5% / 15	60 min*
Ograniczone spektrum działania wirusobójczego wg EN 14476 (Adenowirus - Norowirus)	2,0% / 20 1,0% / 10	30 min* 60 min*
Działanie na Norowirus wg EN 14476	1,5% / 15	30 min*
Działanie wirusobójcze na wirusy ostonkowe wg EN 14476	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 30 min*

* warunki brudne

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
Incidin™ Pro	3 x 2 l	3148508
Incidin™ Pro	6 l	3146208



OBSZAR ZASTOSOWANIA

Wyrób medyczny: Skoncentrowany płyn do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Produkt biobójczy: do powierzchni ogólnych.

INSTRUKCJA UŻYCIA

6l: Rozcieńczyć koncentrat wodą (maks. 60°C) do pożądanego stężenia. Aby rozcieńczyć np. do stężenia 0,5% (5 ml/l), dodać 40 ml na 8 litrów wody. Nanieść odpowiednią ilość (+/- 30 ml/m²) za pomocą czynności mechanicznych (np. przecieranie, mopowanie). Przestrzegać zalecanego czasu kontaktu w celu uzyskania wymaganej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

2l: Rozcieńczyć koncentrat wodą (maks. 60°C) do pożądanego stężenia. Aby rozcieńczyć np. do stężenia 0,25% (2,5 ml/l) na 8 litrów, obrócić butelkę raz, aby dodać jedną porcję 20 ml. Aby rozcieńczyć do stężenia 0,5% (5 ml/l) na 8 litrów, obrócić butelkę dwa razy, aby dodać dwie porcje 20 ml (łącznie 40 ml). Nanieść odpowiednią ilość (+/- 30 ml/m²) za pomocą czynności mechanicznych (np. przecieranie, mopowanie). Przestrzegać zalecanego czasu kontaktu w celu uzyskania wymaganej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

SKŁAD

100 g zawiera: 10,0g 2-fenoksyetanolu (CAS nr 122-99-6), 8,0g N-(3-amino propylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy (diaminy) (CAS nr 2372-82-9) i 7,5g chlorku alkilo (C12-16) dimetylobenzyloamoniowego (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS nr 68424-85-1).

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 0°C do +25°C. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed wilgocią.

WYROBY MEDYCZNE I PRODUKTY BIOBÓJCZE UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



PRODUKT BIOBÓJCZY PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI (KATEGORIA 1 - PT2).

WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

ECOLAB SP. Z O.O.

ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

www.ecolab.com



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™