

Instrukcja używania Materacy dziecięcych i młodzieżowych



Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Warunkami Instrukcji Używania.

Przed przystąpieniem do używania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji Używania. W celu prawidłowego stosowania wyrobu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w Instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym przez producenta zastosowaniem.

Przewidziane zastosowanie

Materace przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do stosowania w połączeniu z łóżkiem dziecięcym lub wybranymi produktami.

Materace firmy Rücken zapewniają swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu zapobiegają nadmiernemu poceniu w trakcie snu.

Atutem materacy jest elastyczność oraz właściwości ortopedyczne tzn. dopasowują się one do kształtu ciała oraz pozycji, jakie przybiera się w czasie snu, a tym samym kręgosłup ma prawidłowe i równomierne podparcie na całej długości.

Wskazania

- zmniejszenie ryzyka stanu zapalnego skóry (odparzeń) i podrażnień,
- profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa,
- zapobieganie powstawaniu potówek (miliarii).

Charakterystyka

Model	Rozmiar	Przeznaczenie	Budowa
AERO	120x60 cm, 140x70 cm	łóżko dziecięce i młodzieżowe	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości. Siatka 3D-PES
ASEPTIC	120x60 cm, 140x70 cm	łóżko dziecięce i młodzieżowe	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości.
NATURA	120x60 cm, 140x70 cm	łóżko dziecięce i młodzieżowe	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR, mata kokosowa, fizelina.
STABIL	120x60 cm, 140x70 cm	łóżko dziecięce i młodzieżowe	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości. Mata lateksowa.
EGG	75x37x3,5 cm	łóżko dziecięce dostawne, kosz Mojżesza i wybrane wózki	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości.
UNO	90x40x6 cm	łóżko dziecięce dostawne, kosz Mojżesza i wybrane wózki	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości.

EGGE	72x33x5 cm	łóżko dziecięce dostawne, kosz Mojżesza i wybrane wózki	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości.
UNOME	82x50x6 cm	łóżko dziecięce dostawne, kosz Mojżesza i wybrane wózki	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości.
STARK	Różne rozmiary	łóżko dziecięce i młodzieżowe	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości.
BASIC	120x60x11, 140x70x11	łóżko dziecięce i młodzieżowe	Pokrowiec: dzianina Tencel i PES/ siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości.
BASIC JUNIOR	Różne rozmiary	łóżko dziecięce i młodzieżowe	Pokrowiec: dzianina Cantana Sanitized przepikowana owatą i flizeliną, siatka 3D- PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR o różnej gęstości.

Modele materacy **ASEPTIC, BASIC, EGG, UNO, EGGE, UNOME, STARK, BASIC JUNIOR** wykonane są z pianki poliuretanowej o różnej gęstości.

Model **NATURA** oprócz pianki poliuretanowej, zawiera dodatkowo warstwę wykonaną z maty kokosowej.

Model **AERO** oprócz pianki poliuretanowej, zawiera dodatkowo warstwę wykonaną z siatki 3D-PES.

Model **STABIL** oprócz pianki poliuretanowej, zawiera dodatkowo warstwę wykonaną z maty lateksowej.

Materace wyposażone są w pokrowce **TENCEL** lub **CANTANA SANITIZED**.

Sposób działania i korzyści kliniczne

Każdy materac posiada dwie strony o różnej twardości. Na ostateczną twardość każdej ze stron materaca wpływają poziome i pionowe kanaliki wentylacyjne (profile cięcia) – różna budowa i ilość profili wentylacyjnych wpływa na odczuwalną twardość obu stron materaca. Każda ze stron materaca pełni inną funkcję / „strona do 12 kg” i „strona powyżej 12 kg” /

Taka budowa skonsultowana została z fizjoterapeutami i doskonale współgra ze zmieniającymi się potrzebami szybko rozwijającego się kręgosłupa dziecka. Ważne by kręgosłup był równomiernie podtrzymywany bez nadmiernych nacisków na uwypuklone miejsca pleców dziecka. Dodatkowo wycięte profile w piankach oraz pionowe kanaliki umieszczone są tak, by wzmocnić przepływ powietrza właśnie w tych wysuniętych miejscach kręgosłupa. Możliwość korzystania z dwóch stron materaca zmniejsza ilość namnażanych drobnoustrojów i roztoczy poprawiając higienę snu.

Strony twardości materacy oznaczane są na etykiecie produktu dołączanej do niego, a także w przypadku modeli materaca z rekomendowaną stroną do i powyżej 12 kg również na etykiecie zamieszczonej pod pokrowcem (nie dotyczy to modelu STARK i BASIC

JUNIOR). Po otwarciu zamka pokrowca ukazuje się etykieta, która wskazuje strony materaca: „strona do 12kg” i „strona powyżej 12 kg”

Konserwacja wkładu materaca

Materace należy przynajmniej raz na 6 miesięcy obrócić o 180 stopni, zwiększa to żywotność i poprawia higienę snu. Materace są po wyprodukowaniu wietrzone, mimo tego mogą odznaczać się własnym specyficznym, zapachem, który zanika w miarę upływu czasu. Wyrób po rozpakowaniu należy wietrzyć przez dobę. Materaca bez wyraźnego oznakowania o możliwości prania, nie należy czyścić chemicznie, prać na mokro lub czyścić przy pomocy pary wodnej, materacy nie należy suszyć na słońcu, materac powinien być regularnie wietrzony. Ewentualne zabrudzenia należy czyścić wilgotną ściereczką. W przypadku zalania, zamoczenia materaca suszyć w pozycji poziomej, nie odwracając go. Woda (wilgoć) powinna odparowywać stale w jednym kierunku. Materac powinien być umieszczony na podstawie gwarantującej dostęp powietrza od spodu. Pokrowiec materaca jest przeznaczony do zdejmowania, należy go zdjąć i suszyć osobno.

Konserwacja pokrowca

Pokrowiec materaca jest pokrowcem zdejmowanym. W środkowej części pokrowca z trzech lub czterech stron wszyty jest zamek, ułatwiający zdejmowanie. Przed praniem pokrowiec należy bezwzględnie zasunąć. Pokrowiec należy prać w temperaturze do 60 stopni Celsjusza lub do 40 stopni Celsjusza (dotyczy modelu BASIC JUNIOR) z użyciem delikatnych detergentów, nie chlorować, nie czyścić chemicznie. Nie suszyć mechanicznie. Suszyć w pozycji pionowej. Nie prasować.

Przeciwwskazania

Nie stosować wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Zalecane jest stosowanie dodatkowego okrycia np. w formie prześcieradła. Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry. Nie stosować w przypadku alergii na lateks (dotyczy modelu STABIL). Nie stosować w przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu, np. rozerwania, rozwarstwienia.

Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem i przewidzianym zastosowaniem.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wyrób po rozpakowaniu należy wietrzyć przez dobę.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru dziecka.

Materaca nie należy kłaść na podłożach takich jak podłoga czy lita płyta, które uniemożliwiają wentylację.

Nie należy wystawiać produktu na działanie źródeł ognia mogących wywołać zapłon.

Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5°C).

Nie należy wystawiać materaca na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które może spowodować jego przebarwienie.

Do każdego materaca wszywana jest metka zawierająca wskazówki pielęgnacyjne. Warto przestrzegać tych wskazówek aby poprzez niewłaściwą pielęgnację nie zniszczyć pokrowca materaca.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Utylizacja

Utylizacja i recykling zużytego wyrobu i opakowania musi być zgodna z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi.

Wyjaśnienie symboli

	Oznakowanie CE. Wyrób jest zgodny z Rozporządzeniem 2017/745
	WYRÓB MEDYCZNY
	Producent
	Data produkcji
	Numer partii
	Kod UDI – niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Zapoznaj się z instrukcją użytkowania
	Ostrzeżenie
	Zawiera naturalny lateks
	Chronić przed wilgocią
	Chronić przed promieniami słonecznymi
	Nie prasować
	Nie chlorować
	Nie czyścić chemicznie
	Nie suszyć mechanicznie



Rücken Sp. z o. o.

ul. Kujawska 44a
86-050 Solec Kujawski

