

**Wyrób medyczny: Orteza stawu barkowego/
łokciowego/nadgarstka**
**Wersja: Orteza na ramię i bark typu Desaulta
(MEK 4005)**
(kamizelka ortopedyczna)

1. Opis:

- Kamizelka typu Desaulta wykonana jest z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkownika.
- Wyrób wspomaga leczenie urazów barku i urazów obręczy barkowej oraz stawu ramiennego i łokciowego.
- Stosuje się przy urazach wymagających unieruchomienia kończyny górnej w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie barkowym.
- Posiada duże możliwości regulacji, dzięki czemu łatwo dopasujemy kamizelkę do sylwetki.
- Pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresach 90°-120°.
- Kamizelka jest uniwersalna, pasuje na lewy i prawy bark, oraz przedramię.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 6 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

2. Funkcje:

- Zapewnia całkowite unieruchomienie w stawie barkowym, stawie barkowo-obojczykowym oraz łopatk.
- Wspomaga wczesną rehabilitację w okresie pooperacyjnym i pourazowym.
- Umożliwia szybką mobilizację stawu łokciowego bez konieczności zdejmowania kamizelki.

3. Wskazania do stosowania:

- Leczenie, doleczenia kontuzji i urazów całej obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny górnej w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej.

- Stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej.
- Zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego.

4. Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.
- Obecność owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zmian zapalnych skóry w miejscu stosowania.

5. Instrukcja obsługi:

- Zaleca się noszenie kamizelki na bawełnianej bieliźnie.
- Dobierz kamizelkę zgodnie z tabelą rozmiarów. Nałóż naramiennik na zaopatrywany bark.
- Zapnij główny pas wokół klatki piersiowej za pomocą rzepa.
- Umieść mankiet podtrzymujący przedramię z przodu tułowia pacjenta, tak aby pionowy pas podpierał przedramię zaopatrywanej kończyny.
- Zegnij zaopatrywane ramię w stawie łokciowym pod kątem 90 stopni i zbliż do tułowia.
- Zabezpiecz przedramię szerokim mankietem na rzep.
- Zapnij pozostałe paski podtrzymujące ramię tak aby ręka była usytuowana ściśle przy ciele.

ROZMIAR	OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
XS	50-70 cm
S	70-90 cm
M	90-110 cm
L	110-120 cm
XL	120-130 cm
XXL	130-140 cm

6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Zabezpiecz wszystkie rzepy przed praniem.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.

- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- WW przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.



- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Kolor: czarny

Data wydania instrukcji używania: 10.2021; wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



4005

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Orteza na ramię i bark typu Desaulta MEK 4005

