

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi

Kod produktu: TGR-R KP 355L



1. Wykonanie


Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy oraz oparcia i szerokiego siedziska wykonanych z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty pokryte materiałem piankowym, ułatwiające korzystanie z przyrządu. Specjalnie zaprojektowane gumowe końcówki nóg skutecznie zapobiegają ślizganiu się na wilgotnych powierzchniach.

Zestaw zawiera:

- siedzisko - 1 szt.
- nóżki z regulacją wysokości - 4 szt.
- uchwyty boczne - 2 szt.
- oparcie - 1 szt.
- rurki montażowe oparcia - 2 szt.
- rurka łączeniowa w kształcie „C” - 1 szt.
- rurki podstawy taboretu – 2 szt.
- śruby montażowe krótkie - 6 szt.
- śruby montażowe długie – 3 szt.

Części składowe:

- a. oparcie
- b. rurka montażowa oparcia
- c. siedzisko
- d. rurka podstawy taboretu
- e. uchwyt boczny
- f. pin blokujący uchwyt
- g. nóżka z regulacją wysokości
- h. nasadka antypoślizgowa

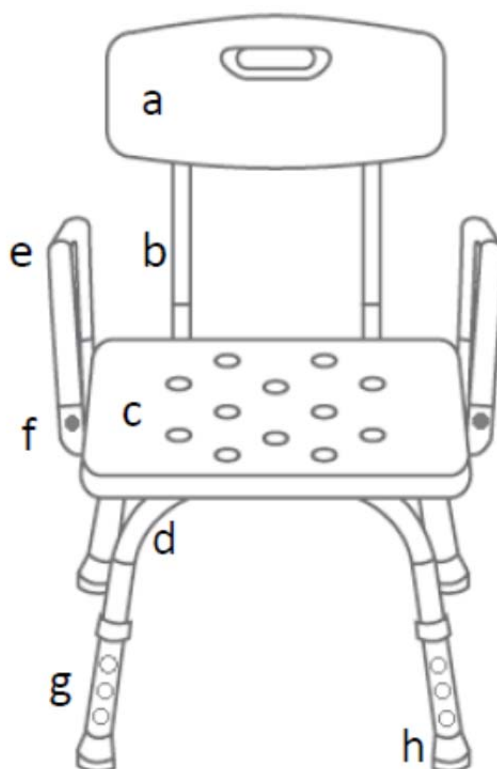

2. Zastosowanie

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż

Krok 1. Siedzisko taboretu położyć płasko na podłożu, przód wskazuje kształt trójkąta na spodzie siedziska. **Krok 2.** W wyznaczonych miejscach na siedzisku ułożyć obie rurki tworzące podstawę taboretu. **Krok 3.** Na skrzyżowane rurki podstawy nałożyć rurkę łączeniową w kształcie „C” (montaż od strony tylnej siedziska), w taki sposób, aby trzy otwory montażowe nachodziły na siebie, w otwory te należy włożyć trzy długie śruby montażowe i przykręcić je do siedziska. **Krok 4.** Za pomocą dwóch krótkich śrub montażowych połączyć siedzisko z rurkami podstawy. **Krok 5.** Oparcie taboretu zmontować z rurkami oparcia przy pomocy czterech krótkich śrub montażowych. **Krok 6.** Pod siedziskiem, w otworach rurki montażowej w kształcie „C”, zamocować rurki oparcia i zablokować je pinami blokującymi. **Krok 7.** Taboret z zamontowanym oparciem postawić na nóżkach. **Krok 8.** Uchwyty boczne zamocować w otworach montażowych znajdujących się po zewnętrznych stronach siedziska i zablokować je pinami blokującymi.



REGULACJA WYSOKOŚCI

- Aby wyregulować wysokość taboretu, należy wcisnąć pin blokujący, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie

zablokować położenie pinem blokującym. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm. **Uwaga!** Wszystkie nóżki muszą być ustawione na tym samym poziomie.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość	48 cm
Głębokość	40 cm
Wysokość siedziska	37-49 cm
Wysokość całkowita	66-79 cm
Wymiary siedziska	40 x 33 cm
Waga	2,3 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z taboretu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Taboret należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha. **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi to uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych). Systematycznie należy sprawdzać: dokręcenie śrub motylkowych, stan pinów blokujących, stan rurek. Zaleca się regularną kontrolę nasadek gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na **www.timago.com**



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie V, data aktualizacji 26.08.2022